

 Anesthesia



気管切開患者用人工鼻

ソフィットベント SV-LO2U

Heat and Moisture Exchangers-Sofit Vent SV-LO2U


SV-LO2U（酸素ポートが太い型式）は酸素ポートが回転します。
酸素ポートは、様々なタイプの酸素チューブに接合出来ます。



気管切開患者用人工鼻 ソフィットベント SV-LO2U


■特長

- 様々なタイプの酸素チューブに接合できます。
- 酸素ポート(太)が回転するので、チューブの捻じれが補正できます。

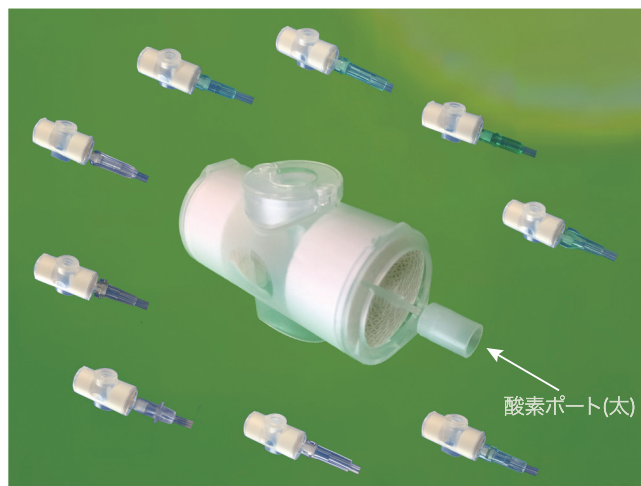

酸素チューブによって接続強度が異なりますので、ご使用になる前にご確認ください。

■使用上の注意

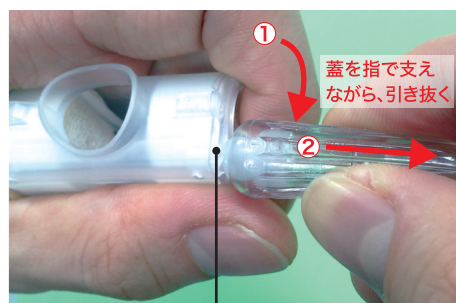

ハウジングの蓋

酸素チューブの着脱操作は、安全のため、気管切開チューブから人工鼻を外した状態で行って下さい。

酸素チューブはハウジングの蓋を指で支えながら外してください。
[支えなく酸素チューブを無理に外すとハウジングの蓋が破損する恐れがあります。]

■仕様

規格/型式	SV-LO2U(回転コネクタ)
1回換気量(mL)	50～
死腔量(mL)	10
※水分損失(mgH ₂ O/L air)	12.9(Vt 500mL)
※流量抵抗(hPa)	0.27(30L/min)
重量(g)	6
コネクタサイズ(mm)	患者側 ID15
滅菌方法	EOG滅菌
商品コード	0025606601
JANコード	14806019611960
包装単位	30個/箱

軽く柔らかな 専用チューブを接続するタイプもあります。



SV-LO2、VFチューブLC接続例

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613)

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
● 2017/11月/3000 ● 認証番号: 221AABZX00197000 ● クラス分類: II ● 不許複製 ● A-92 ● GR-2 ● BA-0339-01
www.mera.co.jp/

製造業者

国名: フィリピン

MERASENKO CORPORATION