

セレス 吸引システム

Serres Suction System



Less is More !!

際立つシンプルなデザイン だから扱いやすい。

セレス吸引システム。



■オンリー・ワン・コネクション

- 吸引バッグを単独で使用する「基本システム」では、患者ポートに吸引チューブを接続するだけで簡単にセットアップが可能です。

■多様な連結システムでも簡単セットアップ

- セレス吸引バッグにはオーバーフローフィルターが搭載されているので、「フィルター付き」と「フィルターなし」といった区別はなく、連結システムでも簡単にセットアップが可能です。



■折りたたむための軽量コンパクトな吸引バッグ

- 頑丈なソフトシート状の吸引バッグは薄く折りたたむので、収納スペースが小さくできます。
- ディスプレイブル吸引バッグは密閉処理が可能なので、感染防止対策に役立ちます。
- 吸引バッグ自体は軽量かつ容積をとらないので廃棄コスト低減にも貢献します。




■環境に優しいPVCフリー

- 環境先進国フィンランド生まれの「セレス吸引システム」はPVCフリー設計です。

■全ての吸引バッグにオーバーフローフィルターを搭載

- オーバーフローフィルターは排気中に含まれるエアロゾル(バクテリア等)を吸引除去し、排液に接触すると瞬時にフィルター内吸水ポリマーが膨張して吸引源への流入を防止します。また、「フィルター付き」と「フィルターなし」といった吸引バッグの区別がないので、取り扱いによる吸引源への排液流入リスクを低減します。

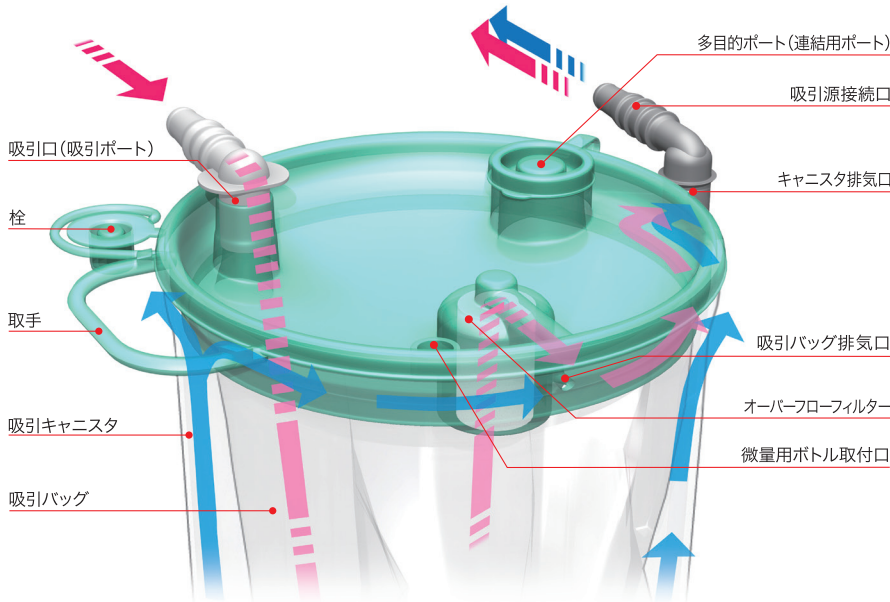

■セレス吸引システムのメカニズム

- ➡ 吸引バッグと吸引キャニスタ間の空気がキャニスタ排気口を通じて吸引源側に排出されることで陰圧となり、吸引バッグが膨らみます。
- ➡ 吸引バッグ内部の空気は吸引バッグ排気口を経由しキャニスタ排気口から排出されます。



■吸引バッグの容量は1000mL・2000mL・3000mLの3種類

- 全ての吸引バッグに連結用ポート・多目的ポート(排液の廃棄・凝固材投入)を搭載しています。
- 1000mL(楕円形)はベッドサイド等の省スペースに適しています。
- 2000mL、3000mLは半円周上に目盛りが幅広く表示されているので排液が容易に読み取れます。



■微量用ボトル

- 微量用ボトルには細かい目盛が表記されており、0~50mLは5mL毎に、50mL~280mLは10mL毎に計測できます。(最大目盛:280mL・最大容量:400mL)



■病理標本採取用カップ

- 吸引バッグの吸引ポートに取り付ければ、病理標本をカップ内のバスケットに採取することが可能です。



■セレス・凝固材(スティックタイプ) ※本品は医療機器非該当品です。

- セレス・凝固材は1本(25g入り)で約1000mLの排液を凝固することが可能です。
- 水溶性のスティック状バックは排液内で溶け凝固材が拡散しゼリー状に排液を凝固させることができるので排液の流出、飛散等を防止し、安全に廃棄物処理することが可能です。

■ 構成部品

■ 吸引バッグ

■ 微量用ボトル

●コード:0151003201

■ 病理標本採取用カップ

●コード:0151003101

■ 連結チューブ

●コード:0151002101

■ バキュームフィルター

●コード:0151003001

■ 吸引キャニスタ

■ 排気用コネクター

●コード:0151004201

■ 排気用バルブ

●コード:0151004101

■ 排気用チューブ

●コード:0151002201

■ ブラケット

●コード:0151003500

Dispo

Reuse

■ トロリー

●コード:0151004300 (トール 6 連結) ●コード:0151004400 (ショート 3 連結)

■ 吸引シフトバルブ

●コード:0151005701

Reuse

■ 感染性廃棄物の適正処理について

感染性廃棄物マニュアル(環境省・環廃産発第040316001号)に基づき「蓋のついた容器に入れ移動途中で飛散、流出するおそれがないようにする」とされており、セレス吸引システムは感染対策を実現します。

商品コード	販売名	規格・型式	販売単位
0151000101		吸引バッグ・1000mL	36 個 / 箱
0151000201		吸引バッグ・2000mL	24 個 / 箱
0151000301		吸引バッグ・3000mL	24 個 / 箱
0151001100		吸引キャニスタ・1000mL L 字型コネクター付	1 個 / 袋
0151001200		吸引キャニスタ・2000mL L 字型コネクター付	1 個 / 袋
0151001300		吸引キャニスタ・3000mL L 字型コネクター付	1 個 / 袋
0151001400		吸引キャニスタ・1000mL ブルー L 字型コネクター付	1 個 / 袋
0151001500		吸引キャニスタ・2000mL ブルー L 字型コネクター付	1 個 / 袋
0151002101	セレス吸引システム	連結チューブ・吸引バッグ連結チューブ・青コネ付	25 個 / 袋
0151003101		病理標本採取用カップ・300mL	18 個 / 箱
0151003201		微量用ボトル・400mL	12 個 / 箱
0151005701		吸引シフトバルブプラスチック	5 個 / 袋
0151002201		排気用チューブ・キャニスタ連結 T 字コネ・チューブ付	10 個 / 袋
0151004101		排気用バルブ・ON-OFF バルブ	10 個 / 袋
0151004201		排気用コネクター・L 字型コネクター	20 個 / 袋
0151004300		トロリー・トール 6 連結	1 台 / 箱
0151004400		トロリー・ショート 3 連結	1 台 / 箱
0151003001		バキュームフィルター	10 個 / 箱
0151003500	※ セレス・部品	セレス ブラケット・テーブル用	1 個 / 袋
0289001101	※ セレス・凝固材	凝固材・スティックタイプ 25g	24 個 / 袋

※本品は医療機器非該当品です。

製造販売業者

MERAS 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1 ■ 問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2019/8月/1000 ●不許複製 ●S-1 ●B-12 ●セレス吸引システム/届出番号:11B1X00016000225 ●クラス分類:1 ●BO-0003-06 www.mera.co.jp/

製造業者

serres セレス 国名:フィンランド