

セレス 吸引システム

Serres Suction System




Less is More !!

際立つシンプルなデザイン
だから扱いやすい。

セレス吸引システム。



- 吸引キャニスタにワンタッチでセッティングできるセレス吸引システムは、病棟や内視鏡室、手術室など、一つのセレス吸引システムで、幅広く使用できます。
- 全ての吸引バッグにオーバーフローフィルターを標準搭載。排液が接触すると瞬時にフィルター内の吸水ポリマーが膨張し、吸引を自動停止するので、吸引源への流入を防止します。

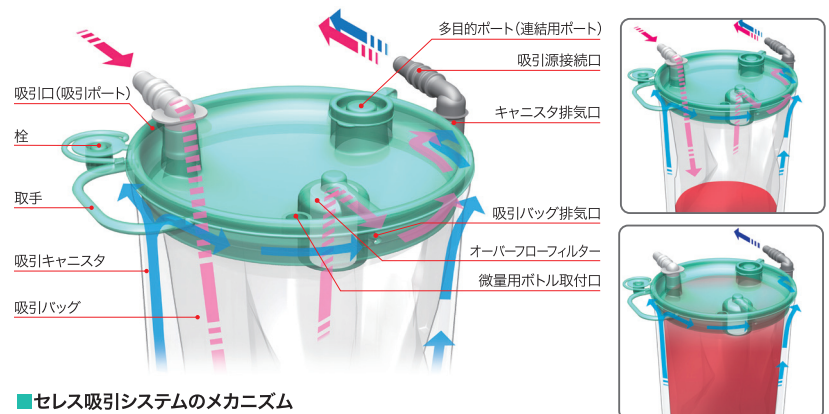

■セレス吸引システムのメカニズム

- ➡ 吸引バッグと吸引キャニスタ間の空気がキャニスタ排気口を通じて吸引源側に排出されることで陰圧となり、吸引バッグが膨らみます。
- ➡ 吸引バッグ内部の空気は吸引バッグ排気口を経由しキャニスタ排気口から排出されます。

凝固材入り吸引バッグは用途に合わせて選べる3種類(1000mL・2000mL・3000mL)



- 凝固材入りの吸引バッグは、排液を集液中にゲル化するプレゲルタイプで、使用後に凝固材を投入する時の不潔な作業を軽減し、感染防止に役立ちます。
- 病棟のベッドサイドに適した、1000mL・2000mLから、洗浄などで大量の吸引を行う内視鏡室や手術室に適した、3000mLまで、3種類の吸引バッグをご用意しています。
- 凝固材後入れタイプの吸引バッグもご用意しています。

ソフトシート・吸引バッグ

- ソフトシート状の吸引バッグは、コンパクトに折り畳んで梱包されていますので、在庫スペースが小さくできます。

ベッドサイド向けのブルー吸引キャニスタ登場

- ベッドサイドで気になる吸引物には、半透明のブルー吸引キャニスタなら、内容物を見えにくくできますので、患者様自身や周りの患者様にも気づかいてくれる吸引環境をご提案できます。
- ベッドサイドの奥行きスペースを小さくするために吸引キャニスタ1000mLは楕円形状を採用しています。

※ブルー吸引キャニスタは1000mL・2000mLタイプをご用意しています。



すぐに使用できるワンタッチセットアップ



- セレス吸引システムをシングルで使用する場合は、患者ポート(L字・白コネクタ)に吸引チューブを接続するだけのワンタッチセットアップで、すぐに吸引することができます。

※吸引キャニスタをつなげて使用する連結システムによる吸引も対応可能です。

■吸引口・排気口の口径

吸引口(白色)は内径6.5mm、排気口(灰色)は内径6mm口径を採用した接続コネクションです。

その他・付属品



●吸引圧力調整器 HK-333型



●バキュームフィルター



●排気用・ON-OFFバルブ



●トローリー



●吸引シフトバルブ
プラスチック

コード番号	販売名	規格/型式	包装単位
0151000101	セレス吸引 システム	吸引バッグ・1000mL	36個/箱
0151000201		吸引バッグ・2000mL	24個/箱
0151000301		吸引バッグ・3000mL	24個/箱
0151000401		吸引バッグ・1000mL(凝固材入)	32個/箱
0151000501		吸引バッグ・2000mL(凝固材入)	22個/箱
0151000601		吸引バッグ・3000mL(凝固材入)	20個/箱
0151001100		吸引キャニスタ・1000mL L字型コネクター付	1個/袋
0151001200		吸引キャニスタ・2000mL L字型コネクター付	1個/袋
0151001300		吸引キャニスタ・3000mL L字型コネクター付	1個/袋
0151001400		吸引キャニスタ・1000mL ブルー L字型コネクター付	1個/袋
0151001500		吸引キャニスタ・2000mL ブルー L字型コネクター付	1個/袋
0151004101		排気用バルブ・ON-OFFバルブ	10個/袋
0151005701		吸引シフトバルブ プラスチック	5個/袋
0151002101		連結チューブ・吸引バッグ連結チューブ・青コネクター付	25個/袋
0151004300		トローリー・トール 6連結	1台/箱
0151004400		トローリー・ショート 3連結	1台/箱
0151003001		バキュームフィルター	10個/箱
0151004800	吸引圧力調整器 HK-333型	P型	1個/箱
0151005000		S型	1個/箱
0151005600	-	吸引キャニスターアタッチメント※	1個/箱

※本品は医療機器非該当品です。

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意 実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書
をよくお読みになってからご使用下さい。

製造業者
serres セレス 国名:フィンランド

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2019/8月/1000 ●不許複製 ●S-1 ●B-14 ●セレス吸引システム/届出番号:11B1X00016000225/クラス分類:I
●吸引圧力調整器HK-333型/届出番号:28B1X00001000006/クラス分類:I/製造業者:エア・ウォーター防災株式会社
●BO-0159-02 www.mera.co.jp/