


 Orthopedics

アレクサネイル (滅菌)

Alexa Nail System

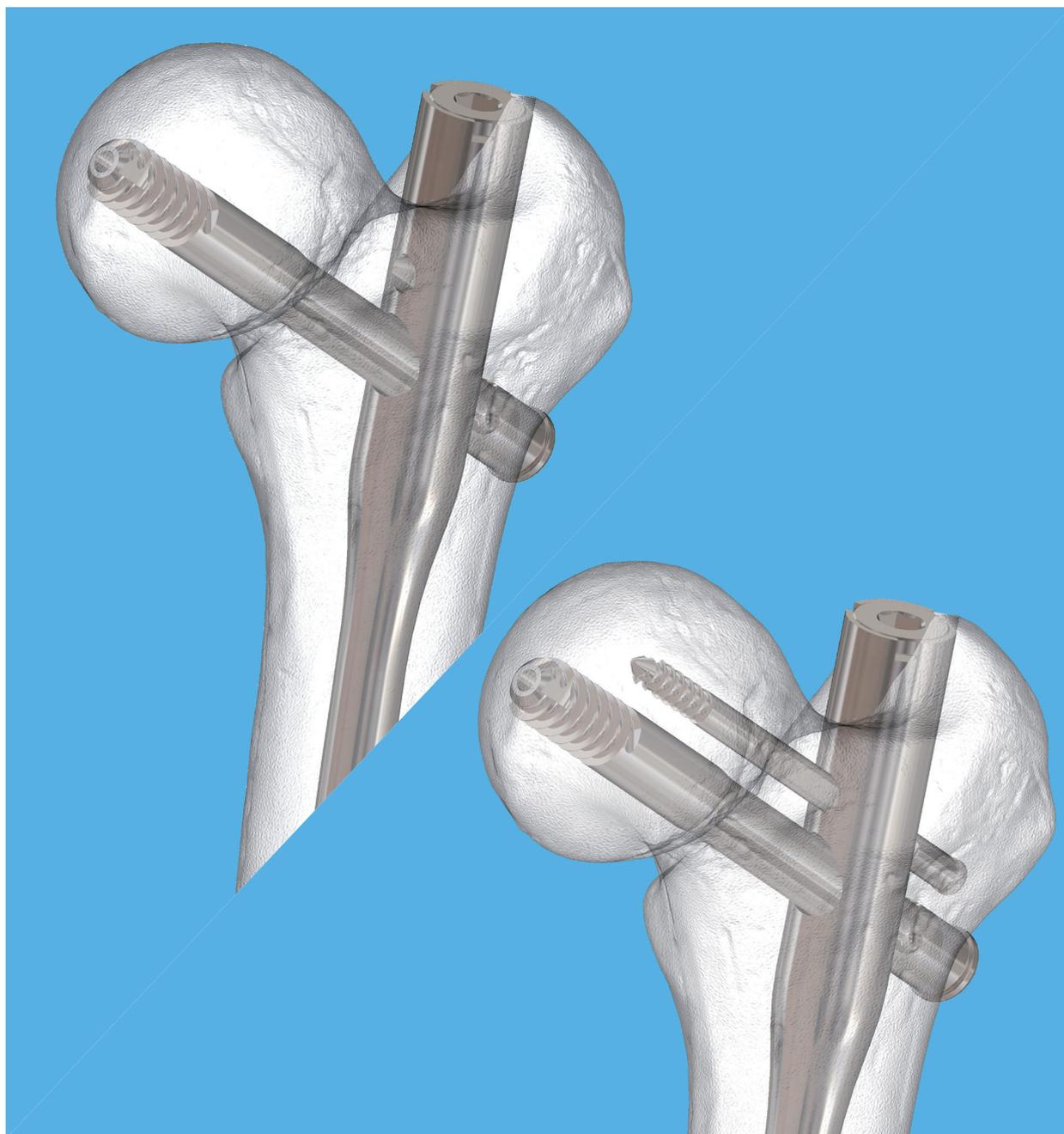

All excellent fixation

Wラグスクリュー

様々な骨折型に対応するシステム

骨折型に合わせてラグスクリュー1本モード、2本モードを術中を選択する事が可能です。

細い頸部にも収まりやすくするため、ラグスクリューと2ndラグスクリューの幅を狭く設計しました。



1本モード

2本モード

Wキード

ラグスクリューの機械的安定性向上

1本モードはもちろんの事、2本モード選択時においてもラグスクリューと2ndラグスクリューを同時にキード状態(回旋防止)にする事が可能です。



Wキード状態にする事で強固な固定が期待出来ます。

Rホール

2ndラグスクリューだけに過度の荷重が掛からないデザイン

上部スクリューがリジットになる事を防ぐ為に 2nd ラグスクリューが通過するネイル外側ホールだけを楕円にデザインしました。

回旋抵抗を高め骨頭への保持力を保ちつつ、2nd ラグスクリューのみに過度の荷重が掛らないデザインにしました。

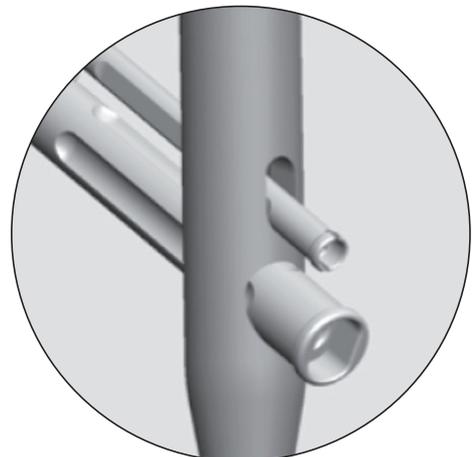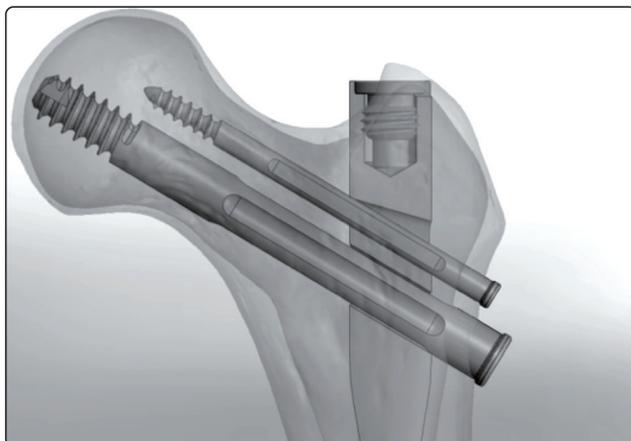

Alexaはあらゆる骨折型に最高の固定をご提供したいとの思いから名付けられました。最高の固定を実現する為にWラグスクリュー、Wキード、Wテーパー、Rホールのシステムを採用し、豊富なサイズバリエーションをご用意いたしました。

Wテーパー

ネイルを理想的な位置に設置しやすいデザイン

●近位部テーパー

近位髄腔が狭い骨形状にも至適位置に設置しやすくするため、可能な限り近位テーパーの距離を短く設計しました。



またバンド角が始まる位置を出来るだけ近位に設計しました。

●遠位部テーパー

前壁皮質にネイル先端が干渉する事を防ぐため、ネイル径が太くなるにつれてテーパーの距離を長くするネイル径毎の専用設計にしました。

Wテーパーの効果によってネイルが挿入しやすくなります。

これによりラグスクリューを理想的な位置に設置しやすくなります。

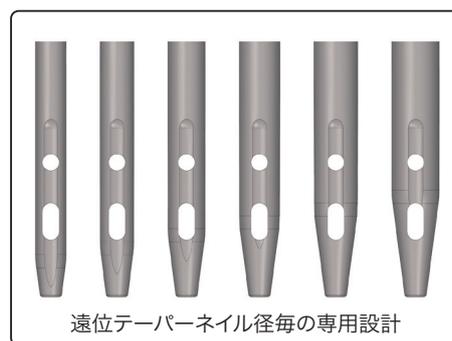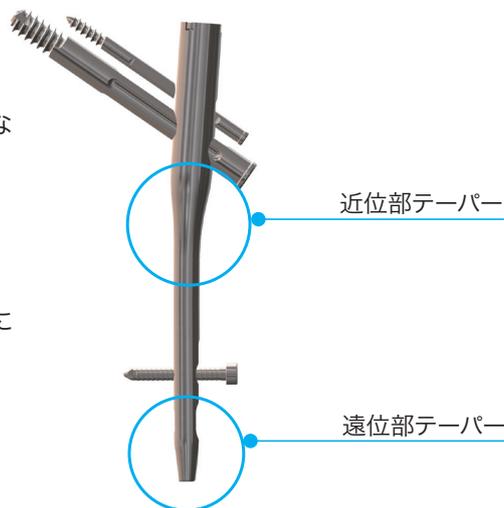


豊富なサイズバリエーション

ノンリーミング+髄腔フィット

髄腔形状に合わせたネイル径を選択出来る様にネイル遠位径を9～14mmまで1mm刻みで用意しました。

髄腔径をノンリーミングで計測できる専用工具を標準工具としました。

ノンリーミング+髄腔フィットする事で髄腔内での安定性を高める事が出来ます。

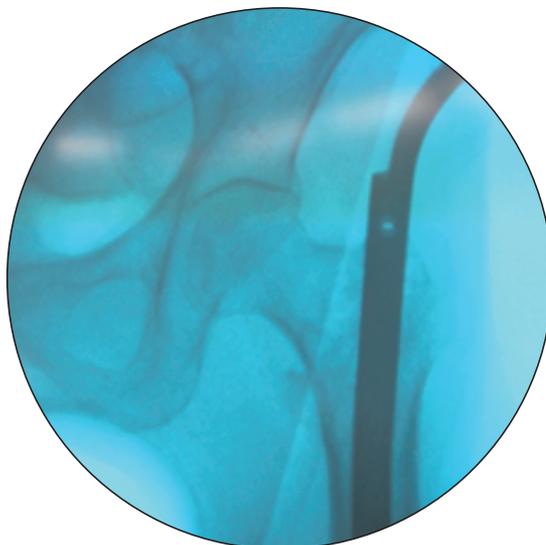

インプラント一覧

ネイル [全長170mm、外反角4°、近位径16.0mm]

商品コード	頸体角	遠位径	製造番号
0530600000	130°	9mm	ONC TJ 209
0530600100		10mm	ONC TJ 210
0530600200		11mm	ONC TJ 211
0530600300		12mm	ONC TJ 212
0530600400		13mm	ONC TJ 213
0530600500		14mm	ONC TJ 214
0530600600	125°	9mm	ONC TJ 309
0530600700		10mm	ONC TJ 310
0530600800		11mm	ONC TJ 311
0530600900		12mm	ONC TJ 312
0530601000		13mm	ONC TJ 313
0530601100		14mm	ONC TJ 314

JMDN分類: 体内固定用大腿骨髄内釘, JMDNコード: 33187000, 分類略称: 髄内釘・F4-c

プラグ

商品コード	プラグ	規格	製造番号
0530607100	スライディング	+0mm	ONC BJ 020
0530608100	ロッキング	+0mm	ONC BJ 030

JMDN分類: 体内固定用大腿骨髄内釘, JMDNコード: 33187000, 分類略称: 髄内釘・F4-c構成

ロッキングスクリュー

商品コード	直径	規格	有効長	製造番号
0530606200	5.0mm	25mm	25.0mm	ONC VJ 025
0530606700		27mm	27.5mm	ONC VJ 027
0530606300		30mm	30.0mm	ONC VJ 030
0530606800		32mm	32.5mm	ONC VJ 032
0530606400		35mm	35.0mm	ONC VJ 035
0530606500		40mm	40.0mm	ONC VJ 040

JMDN分類: 体内固定用ネジ, JMDNコード: 16101003, 分類略称: 髄内釘・F4-f-1



ラグスクリュー

商品コード	直径	規格	製造番号
0530603100	10.5mm	75mm	ONC CJ 075
0530603200		80mm	ONC CJ 080
0530603300		85mm	ONC CJ 085
0530603400		90mm	ONC CJ 090
0530603500		95mm	ONC CJ 095
0530603600		100mm	ONC CJ 100
0530603700		105mm	ONC CJ 105
0530603800		110mm	ONC CJ 110
0530603900		115mm	ONC CJ 115

JMDN分類: 体内固定用ネジ, JMDNコード: 16101003, 分類略称: 髄内釘・F4-f-2

セカンダリーラグスクリュー

商品コード	直径	規格	製造番号
0530604100	5.0mm	55mm	ONC SJ 055
0530604200		60mm	ONC SJ 060
0530604300		65mm	ONC SJ 065
0530604400		70mm	ONC SJ 070
0530604500		75mm	ONC SJ 075
0530604600		80mm	ONC SJ 080
0530604700		85mm	ONC SJ 085
0530604800		90mm	ONC SJ 090

JMDN分類: 体内固定用ネジ, JMDNコード: 16101003, 分類略称: 髄内釘・F4-f-2



医療機器承認番号: 21800BZY10059000
販売名: アレクサネイル(滅菌)
材質: Ti6Al4V

販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先: 本社整形部 TEL.03-3812-3252 FAX.03-3812-4613

製造販売業者

EP-MEDIC
quality products for Every Partner

株式会社 イーピーメディック
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-8-38
TEL 092-408-6811 FAX 092-408-6822

製造業者

groupe lépine グループ レピン 国名: フランス
depuis 1714

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2018/3/2000 ●不許複製 ●F-17 ●BP-0284-02 ●GR-2 www.mera.co.jp/