

ZERUK-W

電気手術器





日本メーカーがお届けする電気メス ZERUK-W

- モノポーラ/バイポーラのダブル型出力
- 国内のユーザーに合わせた操作性
- 安全をサポートするための機能搭載




ZERUK

MERA Electrosurgical Unit


ダブル型は Next Stage へ

モノポーラダブルはもちろん、バイポーラダブル使用が可能に。

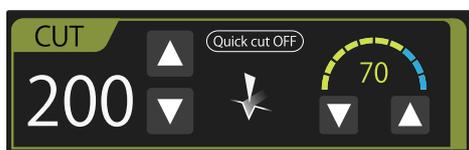

● モノポーラカットモード

カットモードは10~100%ブレンド調整が可能
切開性の設定自由度がUP
術者の理想とする切れ味を提供
Quick Cut は一時的に出力をupさせ、組織への切り込みをスムーズにします。

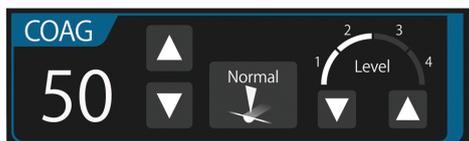


● モノポーラコアグモード

ノーマル/ピール/ホワイト/スプレーの4モードを搭載。
各モードのレベルを調整することで凝固性能の調整が可能です。
ホワイト凝固(低電圧)を標準装備
※ホワイト凝固の同時使用は不可

● メモリ機能

使用した出力は常にバックアップされ最新データに更新されます。術者別、術式別に出力・モードを10通りメモリでき、瞬時に呼び出すことが可能です。また、あらかじめ「起動時メモリ呼出設定」を行うと、本体の起動時に登録されている設定値・モードを自動的に呼び出します。

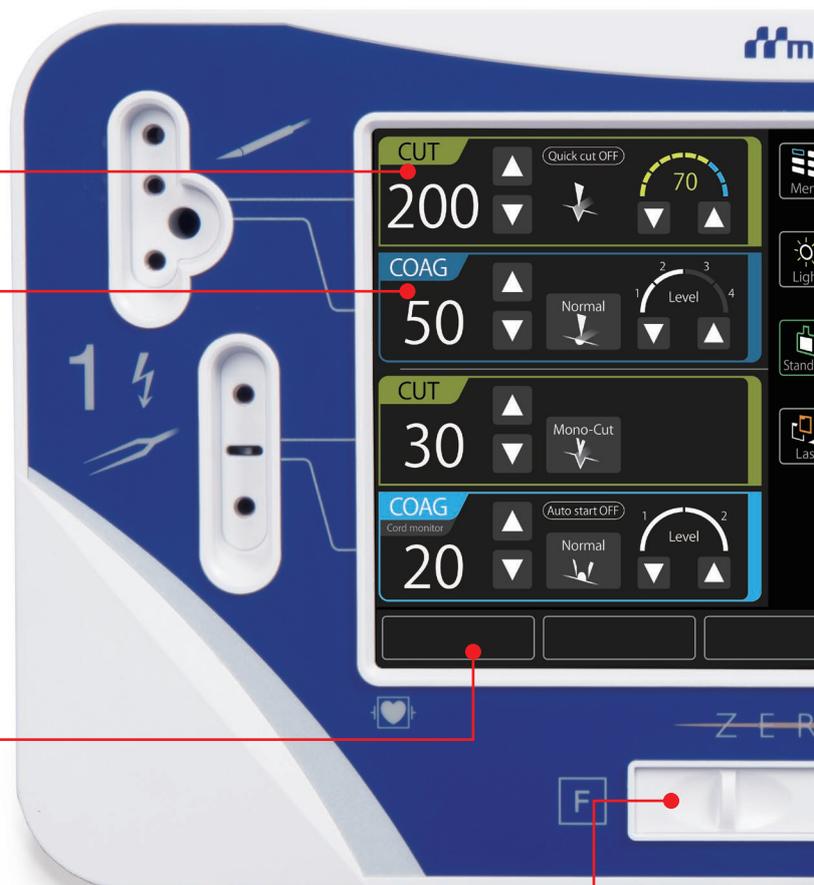

● 対極板接続切り換えスライドスイッチ

スライドを切り換えるだけであらゆる対極板がアダプターなしで使用できます。



(SASパッド/NEジェルパッド使用可能)



● フットスイッチ

● 10.1インチの大型タッチスクリーンディスプレイを採用

シンプルにデザインされ、見やすく、分かりやすく、使いやすさを提供します。

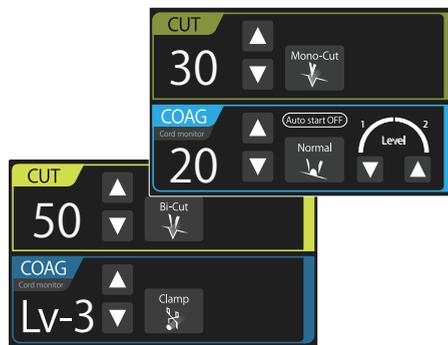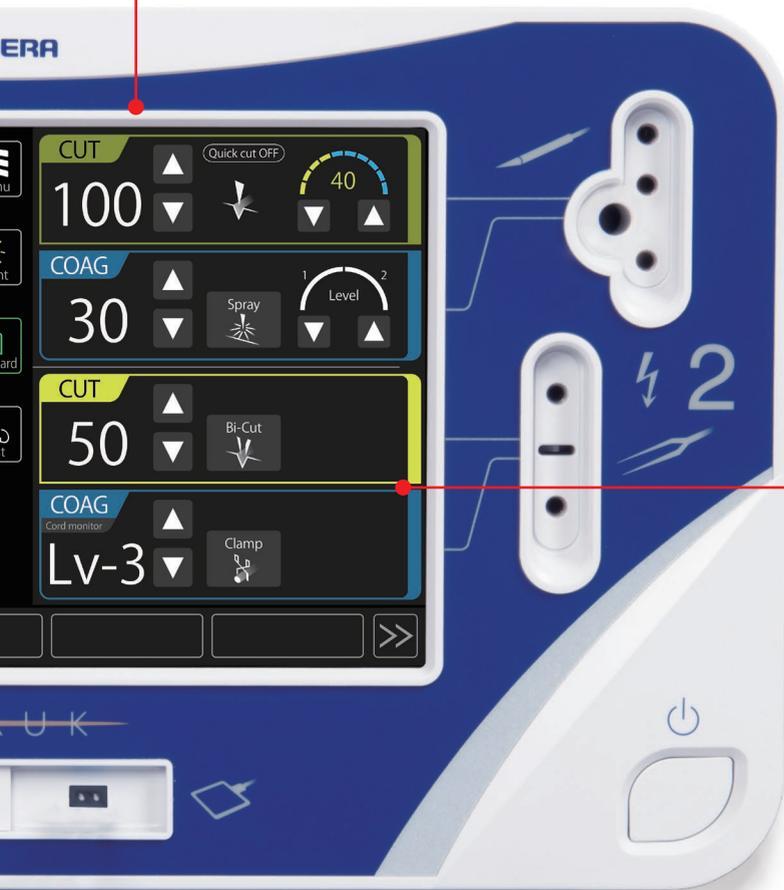

● バイポーラカット/コアグモード

マイクロサージャリーに適したマイクロモード
ウェットな使用部位でも強力に凝固するノーマルモード、組織や血管をシーリングするクランプモードを搭載。レベルの設定を変えることで凝固スピードが変化します。

バイポーラカットも搭載し、各科分野ごとの多様な手技術式、各種デバイスに対応し、オールマイティに使用ができます。

※クランプモードはバイセップ(別売)を用います。



(オプション)



● 安全サポート

不良モニターが作動した場合には、各アラーム警報画面がポップアップ表示されアラーム音と同時に出力が自動停止します。画面上のヘルプを押すと対処方法を表示します。

仕様				
出力形式	出力回路形式	フローティング形		
	分類	クラスI CF形		
出力モード 1側・2側の合計出力の 設定範囲は330W以下	モノポーラ切開 (500Ω負荷)	モード	1側最大出力	2側最大出力
		カット(モード10~100)	50~300W	50~300W
	モノカット	50W	50W	
	モノポーラ凝固 (500Ω負荷)	ノーマル (L1~4)	120W	120W
		ピール	120W	120W
		ホワイト ※1 (L1~5)	100W	100W
		スプレー (L1~2)	80~100W	80~100W
	バイポーラ切開 (100Ω負荷)	バイカット	100W	100W
	バイポーラ凝固 (100Ω負荷)	マイクロ (L1~2)	20W	20W
		ノーマル (L1~2)	100W	100W
クランプ ※2 (L1~8)		100W	100W	
基本周波数	472kHz ±20%			
安全機能	対極板接触状態検知モニター / 対極板コード断線モニター / 連続出力モニター / バイポーラコードモニター 出力エラーモニター / セルフチェックモニター / CPU エラーモニター / オーバーヒートモニター他			
電源	電源	AC100V ± 10% 50-60Hz		
	電源入力	1kVA以下		
外形寸法	本体:W400×D435×H231mm 架台:W576×D591×H800mm			
重量	本体:14.7kg 架台:24.5kg			

※1 100Ω負荷(1側・2側のホワイト凝固は同時使用不可) ※2 30Ω負荷

Ordering Information

商品コード	JANコード	販売名	構成	クラス分類
0120103500	4562147794908	電気手術器 ZERUK-W	1セット(本体・標準付属品)	II

標準付属品

- ①電源コード(CPメディカルプラグ:5m) 1本
②専用架台 商品コード:(0120904400) 1台

オプション

商品コード	JANコード	販売名	構成	クラス分類
0120904500	4562147794939	1ペダルフットスイッチ GS1	5m	I
0120904600	4562147794946	2ペダルフットスイッチ GS2	5m	I

●届出番号:GS1/13B2X00035FS0012 GS2/13B2X00035FS0013

認証番号:230AGBZX00123000

製造販売業者

株式会社 **せらこ** 東京都足立区梅田4-16-8

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■お問い合わせ先:泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意 ご使用前に必ず取扱説明書、電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●2025/7月/1500 ●不許複製 ●B-98 ●GR-1 ●BO-0384-08

お問い合わせ

