


単回使用麻酔用呼吸回路

# パラレルY呼吸回路

Anesthesia Breating Circuit


- 使い易さと経済性を両立させたパラレルY呼吸回路
- 世界初、GSコネクタ採用
- 使用状況に応じた豊富なラインナップ

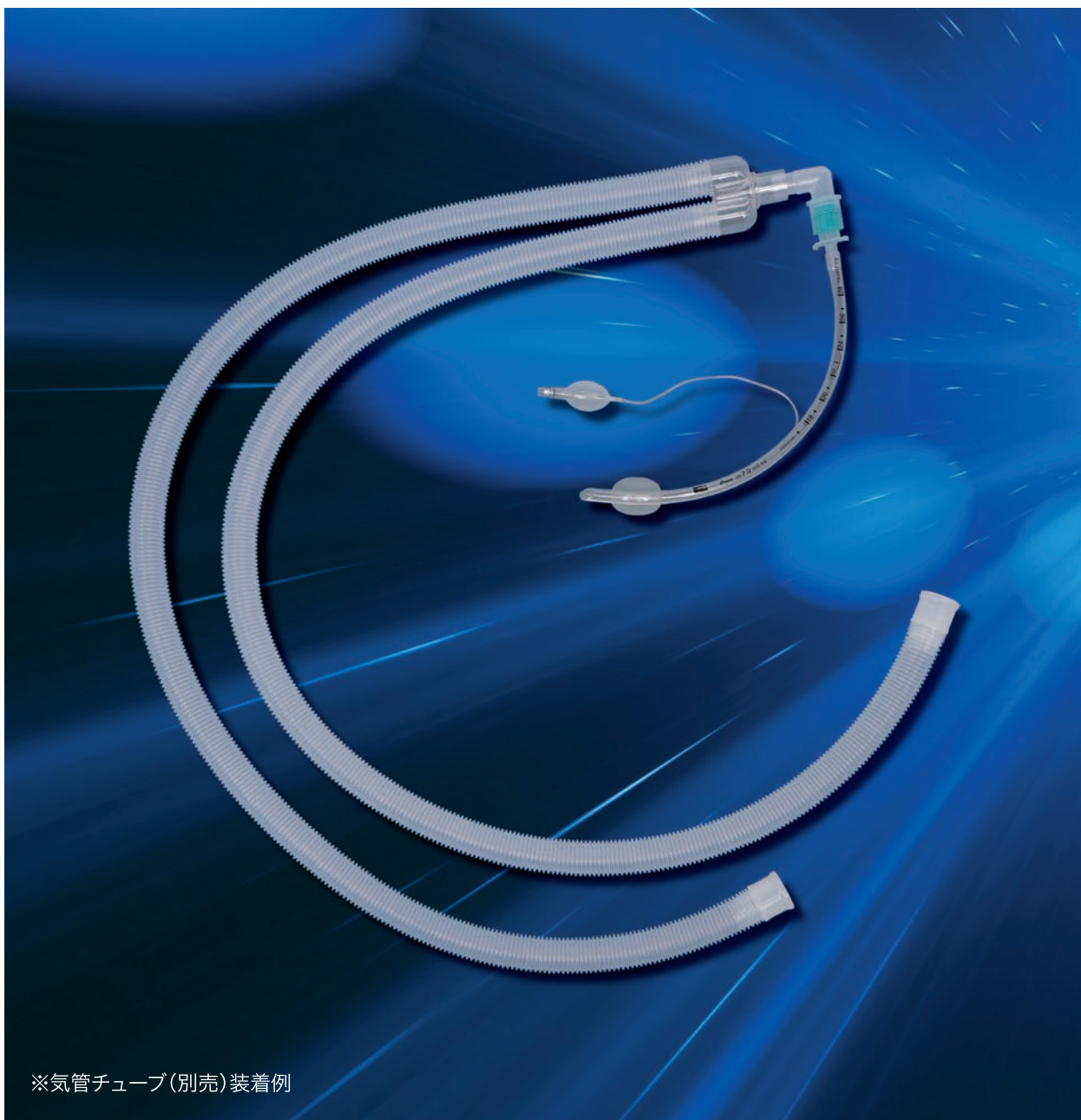

※気管チューブ(別売)装着例

# パラレルY呼吸回路

## ■パラレルY呼吸回路(大人用)

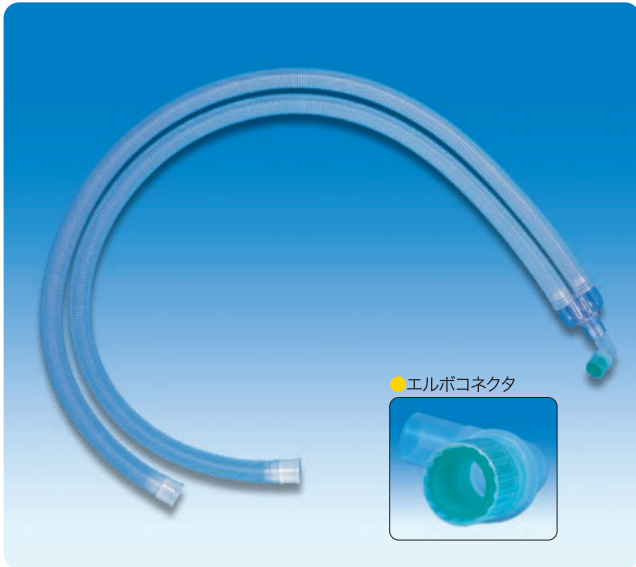

## ■パラレルY呼吸回路(小人用)



### ■仕様

#### ●大人用「YA」シリーズ

型 式	全 長	商品コード
YA-90	90cm	0 0 2 0 0 2 1 6 0 0
YA-120	120cm	0 0 2 0 0 2 1 5 0 0
YA-150	150cm	0 0 2 0 0 2 1 4 0 0
YA-200	200cm	0 0 2 0 0 2 1 3 0 0
※YA-300	300cm	0 0 2 0 0 2 1 2 0 0
※YA-500	500cm	0 0 2 0 0 2 1 1 0 0

#### ●小人用「YP」シリーズ

型 式	全 長	商品コード
※YP-60	60cm	0 0 2 0 0 2 0 5 0 0
YP-90	90cm	0 0 2 0 0 2 0 4 0 0
YP-120	120cm	0 0 2 0 0 2 0 3 0 0
※YP-150	150cm	0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
※YP-200	200cm	0 0 2 0 0 2 0 1 0 0

YA-300/500(※印) YP-60/150/200(※印)は、受注生産対応製品です。  
大人用は22mm呼吸管、小人用は11mm呼吸管を使用しています。  
エルボコネクタ死腔量:9.6mL

### ■エルボコネクタ



世界初、GSコネクタ(ギアードスィベルコネクタ)採用

通常は 回転 → つまむと… ロック

余分な力を使わずに取り外しでき、患者への負担を軽減できます。又、取り付け時には、より確実な嵌合が得られます。



#### 【取り付け時】

15mmオスコネクタに差し込み、回転部をロックして、押しながら回してください。

#### 【取り外し時】

回転部をロックして、回しながら引き抜いてください。

### 警告

- 本製品はディスク製品ですので、再使用しないでください。
- 滅菌はしないでください。
- 呼吸管を極端に折り曲げないでください。

### 注意

- 本製品を組み立てる際に、アルコールやシリコンオイル、界面活性剤の液体を使用して取り付けしないでください。
- リークがないことを確認してから使用してください。
- お取り扱いの際には添付文書をお読みください。

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先 本社商品企画:TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

### 注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。  
●2019/4月/1000 ●不許複製 ●認証番号:220AABZX00158000 ●クラスII ●S-1 ●A-5 ●BA-0120-03