

 Anesthesia

F回路プラスセット

Breathing System



F回路プラスセット デビュー

手術室で「麻酔器用回路」として、ICU・病棟で「人工呼吸器用回路」としてご使用いただけます。


安全性の追求

内管と外管は分離でき、ご使用前に内管のリークテストが可能です。

豊富なバリエーション

細いタイプ(緑色、MS)と太いタイプ(黄色、L)の2サイズを用意しました。MSタイプは小児から大人まで、Lタイプは自発呼吸を残した呼吸管理を行うときに呼吸仕事量の軽減になります。

●呼吸管長さは 90、120、150、180、210cmの5サイズ(標準販売品)

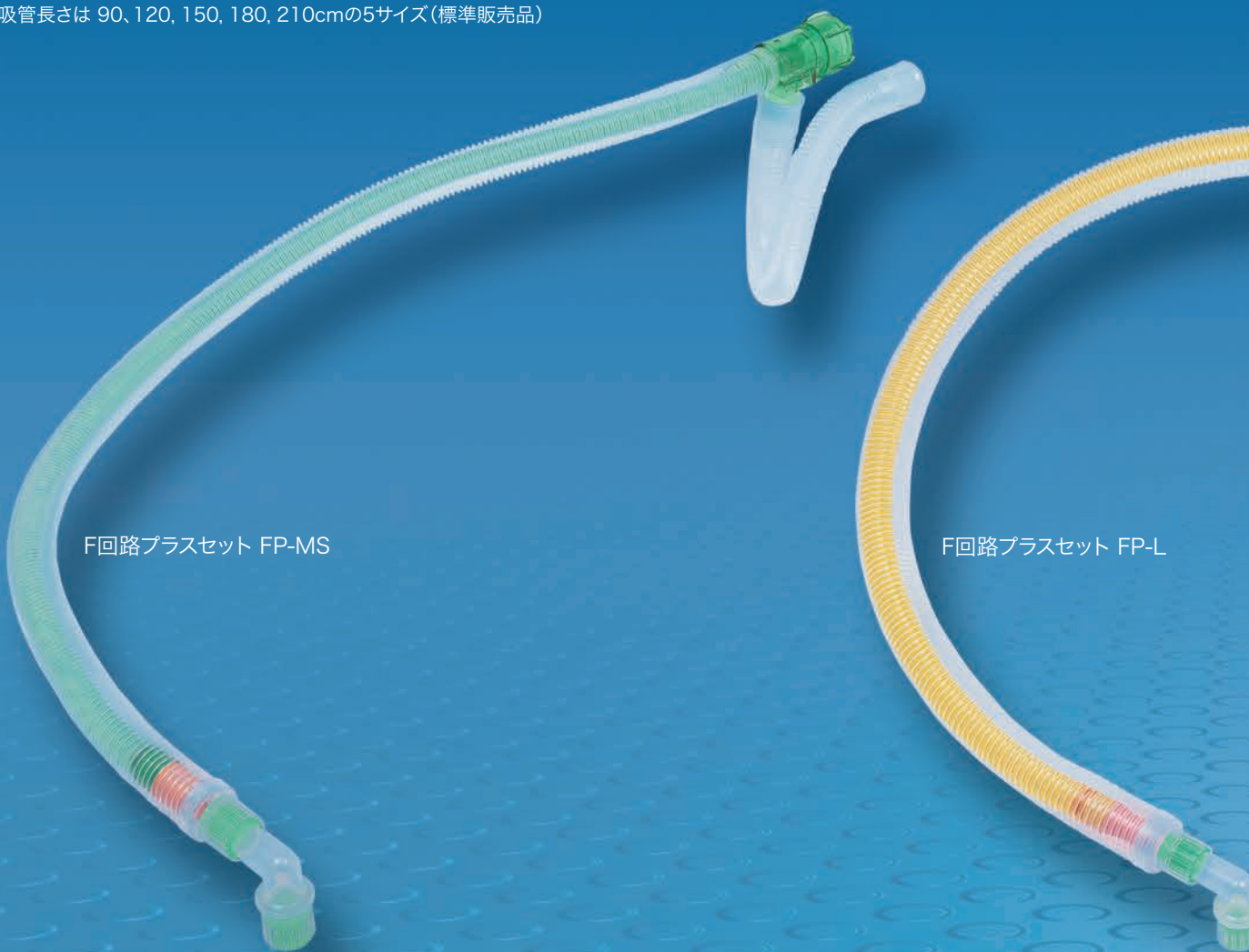

F回路プラスセット FP-MS

F回路プラスセット FP-L

F回路プラスセット FP-MS

商品コード	型式	呼吸管長さ	JANコード	販売単位	受注生産品
0020030001	FP-60MS-35-GS	60cm	14806019606201	2セット/箱	※
0020030101	FP-90MS-35-GS	90cm	14806019606218	2セット/箱	
0020030201	FP-120MS-35-GS	120cm	14806019606225	2セット/箱	
0020030301	FP-150MS-35-GS	150cm	14806019606232	2セット/箱	
0020030401	FP-180MS-35-GS	180cm	14806019606249	2セット/箱	
0020030501	FP-210MS-35-GS	210cm	14806019606256	2セット/箱	
0020030601	FP-300MS-35-GS	300cm	14806019606263	2セット/箱	※
0020030700	FP-500MS-35-GS	500cm	04806019606273	1セット/箱	※
0020030800	FP-800MS-35-GS	800cm	04806019606280	1セット/箱	※
0020030900	FP-1000MS-35-GS	1000cm	04806019606297	1セット/箱	※

※呼吸管の長さはエルボコネクタを除いた回路全長になります。
呼気管長さ35cm

包装単位:1セット/袋

F回路プラスセット FP-L

商品コード	型式	呼吸管長さ
0020040001	FP-60L-35-GS	60cm
0020040101	FP-90L-35-GS	90cm
0020040201	FP-120L-35-GS	120cm
0020040301	FP-150L-35-GS	150cm
0020040401	FP-180L-35-GS	180cm
0020040501	FP-210L-35-GS	210cm
0020040601	FP-300L-35-GS	300cm
0020040700	FP-500L-35-GS	500cm
0020040800	FP-800L-35-GS	800cm
0020040900	FP-1000L-35-GS	1000cm

※呼吸管の長さはエルボコネクタを除いた回路全長になります。
呼気管長さ35cm

す。



新しいT形コネクタはテーパー接合になっています。




※患者接続口とエルボコネクタには
ギアードスイベル(GS)コネクタを採用しています。

ギアードスイベルコネクタ


通常は



つまむと…

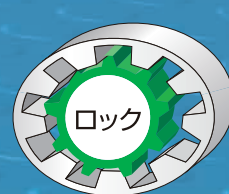

余分な力を使わずに取り外しでき、患者への負担を軽減できます。
又、取り付け時には、より確実な嵌合が得られます。
(特許番号:第4866631号)

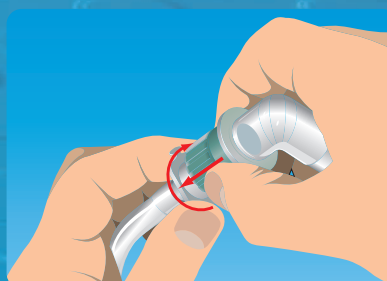

【取り付け時】

15mmオスコネクタに差し込み、
回転部をロックして、押しながら
回してください。

【取り外し時】


回転部をロックして、回しながら
引き抜いてください。

長さ	JAN コード	販売単位	受注生産品
m	14806019606607	2セット/箱	※
m	14806019606614	2セット/箱	
m	14806019606621	2セット/箱	
m	14806019606638	2セット/箱	
m	14806019606645	2セット/箱	
m	14806019606652	2セット/箱	
m	14806019606669	2セット/箱	※
m	04806019606679	1セット/箱	※
m	04806019606686	1セット/箱	※
m	04806019606693	1セット/箱	※

なります。


包装単位:1セット/袋

回路構成

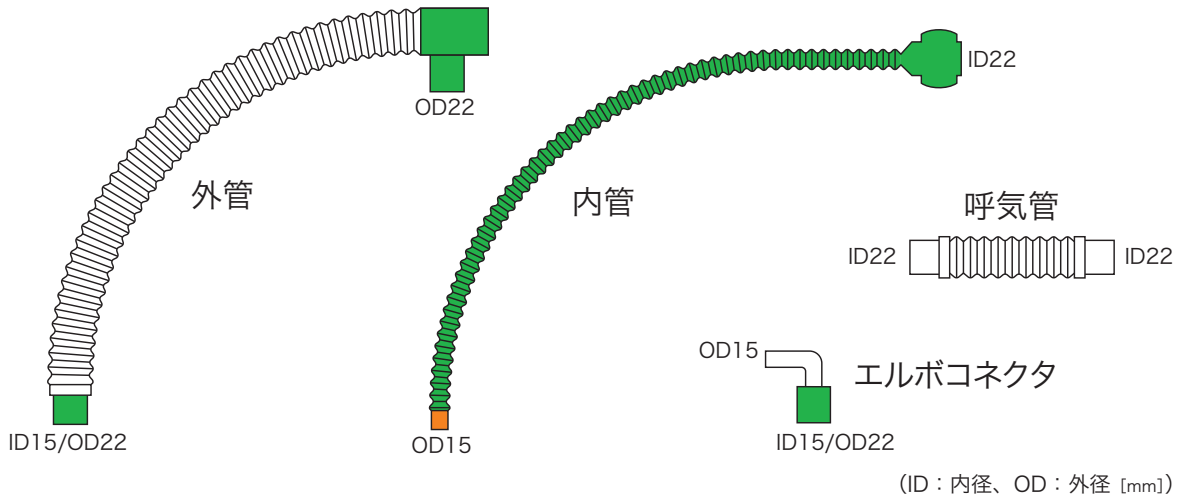


回路リーク検査手順


- ① 内管と外管を分離する。
- ② 内管だけを麻酔器の吸気口に接続する。
- ③ 内管の患者端(オレンジ部)を閉塞させ、回路内の圧力を30hPaまで上げてリーク検査をする。
(内管リーク検査終了)
- ④ 内管、外管、呼気管を組み合わせ、麻酔器に接続する。
- ⑤ 外管の患者端 (ID:15/OD:22mm) を閉塞させ、回路内の圧力を30hPaまで上げてリーク検査をする。
(外管、呼気管リーク検査終了)

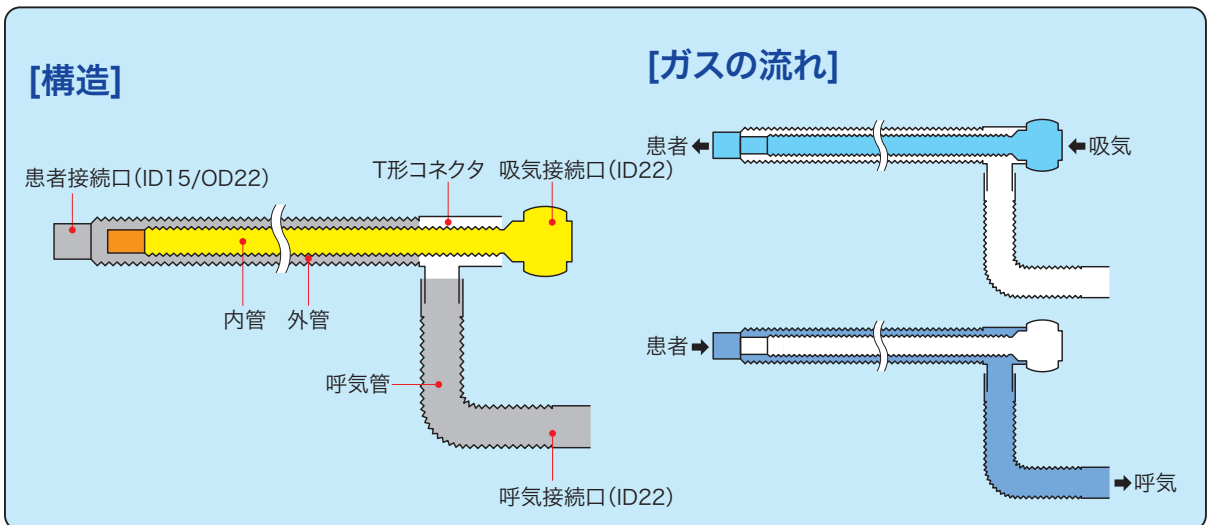

蛇管寸法

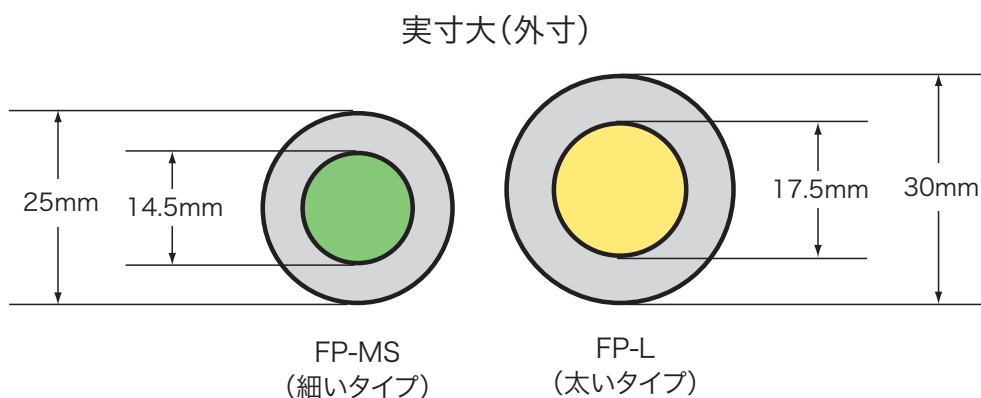

関連製品

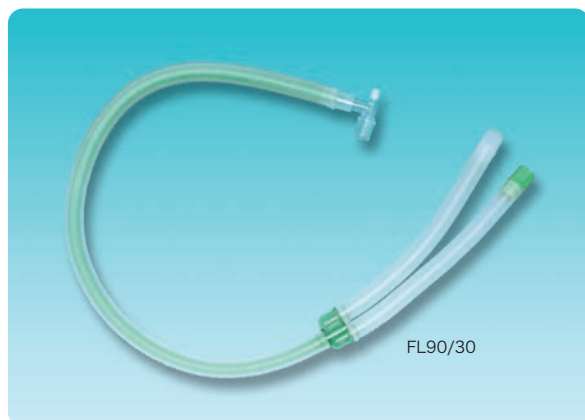

FL90/30

メラ麻醉器用呼吸回路(F回路ライト)

「軽費、軽量、軽快」を追求した麻醉器用呼吸回路です。

型 式	商品コード
FL180/30	0020011100
FL150/30	0020011200
FL120/30	0020011300
FL90/30	0020011400
FL45/90	0020011500

包装単位(袋):1セット

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。



パラレル呼吸回路
(大人用)

パラレル呼吸回路
(小人用)

単回使用麻醉用呼吸回路 パラレルY呼吸回路

呼気蛇管と吸気蛇管を並行させることができる回路です。

大人用(YA)型式	商品コード	小人用(YP)型式	商品コード
YA-90	0020021600	YP-60	0020020500
YA-120	0020021500	YP-90	0020020400
YA-150	0020021400	YP-120	0020020300
YA-200	0020021300	※YP-150	0020020200
※YA-300	0020021200	※YP-200	0020020100
※YA-500	0020021100		

YA-300/500(※印) YP-150/200(※印)は、受注生産対応製品です。
エルボコネクタ死腔量:9.6mL

包装単位(袋):1セット

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。



MF-SB

MF-LB

単回使用人工鼻用フィルタ モイストラップF(ギアードスイベルコネクタ内蔵タイプ)

サイズ3種(S・M・L)と形状2種(直S・曲B)の全6タイプがあります。
全てにサンプリングポートを備えています。

規格/型式	一回換気量(mL)	商品コード
MF-SS	50~250	0025610101
MF-SB	50~250	0025610201
MF-MS	150~1000	0025610301
MF-MB	150~1000	0025610401
MF-LS	200~1500	0025610501
MF-LB	200~1500	0025610601

包装単位(箱):20個 (EOG滅菌済)

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。



MF-SB-N

MF-LB-N

(例)MF-MS-NE
末尾にEが付いた型式はエルボコネクタが
付属されています。

単回使用人工鼻用フィルタ モイストラップF(ギアードスイベルコネクタ無しタイプ)

ギアードスイベル機能のない6タイプ(形式末尾「-N」)です。さらに、形状(直)の
3サイズにはエルボコネクタ付属タイプを用意しました。(形式末尾「-NE」)

規格/型式	一回換気量(mL)	商品コード	規格/型式	一回換気量(mL)	商品コード
MF-SS-N	50~250	0025611101	MF-SS-NE	50~250	0025611701
MF-SB-N	50~250	0025611201	MF-MS-NE	150~1000	0025611801
MF-MS-N	150~1000	0025611301	MF-LS-NE	200~1500	0025611901
MF-MB-N	150~1000	0025611401			
MF-LS-N	200~1500	0025611501			
MF-LB-N	200~1500	0025611601			

包装単位(箱):20個 (EOG滅菌済)

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。

関連製品



人工鼻 モイストラップ

M・L 2種類のサイズには、直・曲の2種類のタイプがあり、全ての製品にサンプリングポートを備えています。15mmメスコネクタにギアードスィベルコネクタ(回転コネクタ)を内蔵した人工鼻です。

規格/型式	一回換気量(mL)	商品コード
M-S3.0	10~50	0025600101
M-S3.5	10~50	0025600201
M-S15	15~75	0025600301
M-MS	50~600	0025600401
M-MB	50~600	0025600501
M-LS	150~1500	0025600601
M-LB	150~1500	0025600701

包装単位(箱):20個 (EOG滅菌済)

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。



呼吸回路除菌用フィルタ バクトキャッチャ

バクトキャッチャは人工呼吸器又は麻酔システム(麻酔器)と呼吸回路の間に取り付けて、ご使用いただけます。ラベルには使用開始の記録が残せるメモスペースが備わっています。

規格/型式	一回換気量(mL)	※濾過効率(%)	商品コード
BC-L	~1500	99.9+	0025616101


器械側コネクタ:ID22mm

患者側コネクタ:ID15mm、OD22mm

※ Nelson Laboratories.の試験結果による。

包装単位(箱):20個 (EOG滅菌済)

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。

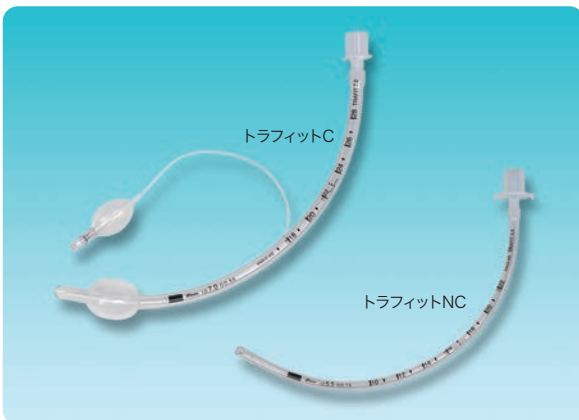

気管チューブ トラフィット

より優しく、より安全に、とてもソフトなカフは当社オリジナルの配合技術とディッピング製法によって、均質でしなやかなカフを実現しました。

■トラフィットC [気管チューブ(カフ付)]

製品のサイズ	商品コード
5.0	0021400501
5.5	0021400601
6.0	0021400701
6.5	0021400801
7.0	0021400901
7.5	0021401001
8.0	0021401101
8.5	0021401201
9.0	0021401301
9.5	0021401401
10.0	0021401501

■トラフィットNC [気管チューブ(カフ無)]

製品のサイズ	商品コード
2.5	0021410001
3.0	0021410101
3.5	0021410201
4.0	0021410301
4.5	0021410401
5.0	0021410501
5.5	0021410601

包装単位(箱):10個 (EOG滅菌済)

★製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2014/2月/3000 ● 認証番号: 222ADBZX00118000 ● 不許複製 ● A-56 ● S-2 ● BA-0151-02

www.mera.co.jp/