

酸素投与キット

メラ酸素供給チューブ

Oxygen tube

ソフィットベント (SV-L、SV-S、SV-LO2、SV-BO2) 各タイプ専用の酸素供給アタッチメント及び酸素供給チューブをご用意しました。


チューブ色は透明と緑の2通りから選択できます。




酸素投与キット メラ酸素供給チューブ

型式


(Cは透明、Gは緑色チューブを表します。)

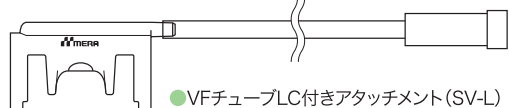


- VFチューブLC付きアタッチメント (SV-L)
- VFチューブLG付きアタッチメント (SV-L)

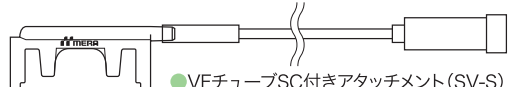

- VFチューブSC付きアタッチメント (SV-S)
- VFチューブSG付きアタッチメント (SV-S)

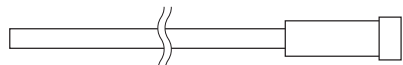


- VFチューブLC
- VFチューブLG

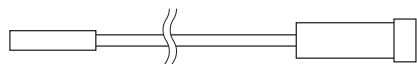


- VFチューブSC
- VFチューブSG

(低流量で使用する場合のチューブの扱い易さを考慮しました。)

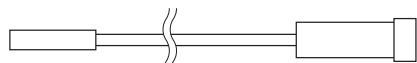


- VFチューブSC
- VFチューブSG


組み合わせ製品 (別売)

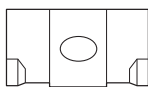


●SV-L

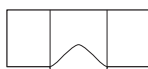


●SV-S

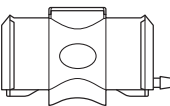

●SV-LO2

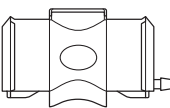

●SV-LO2

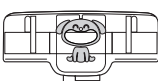

●SV-BO2

参考データ

VFチューブLC付き/LG付きアタッチメント (SV-L)

酸素 (L/min)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
酸素濃度 (%)	26	29	32	35	38	41	43	46	48	50

●一回換気量: 500mL ●呼吸回数: 15回/min

VFチューブSC付き/SG付きアタッチメント (SV-S)

酸素 (L/min)	1	2	3	4	5
酸素濃度 (%)	25	29	33	36	39

●一回換気量: 250mL ●呼吸回数: 20回/min

VFチューブLC/LG

●ソフィットVENT SV-LO2とVFチューブLCの吸気酸素濃度

酸素 (L/min)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
酸素濃度 (%)	26	30	33	36	39	43	47	50	52	54

●一回換気量: 500mL ●呼吸回数: 15回/min

VFチューブSC/SG

●ソフィットVENT SV-LO2とVFチューブSCの吸気酸素濃度

酸素 (L/min)	1	2	3	4	5
酸素濃度 (%)	26	31	35	39	43

●一回換気量: 250mL ●呼吸回数: 20回/min

VFチューブSC/SG

●ソフィットVENT SV-BO2とVFチューブSCの吸気酸素濃度

酸素 (L/min)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
酸素濃度 (%)	22-23	23-25	24-27	26-29	33-35	43-45

●一回換気量: 100mL ●呼吸回数: 20回/min ●I:E比=1:2

吸気酸素濃度は使用環境により変化します。動脈血酸素飽和度のモニタリング等によりコントロールしてください。


商品コード	JANコード	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途
0025632101	14806019607123	VFチューブLC付アタッチメント (SV-L) ※1	透明	5個	SV-L用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632201	14806019607130	VFチューブLG付アタッチメント (SV-L) ※1	緑	5個	SV-L用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632501	14806019607161	VFチューブSC付アタッチメント (SV-S) ※1	透明	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632701	14806019610017	VFチューブSC付アタッチメント (SV-L) 80cm ※2	透明	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632601	14806019607178	VFチューブSG付アタッチメント (SV-S) ※1	緑	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025631101	14806019607086	VFチューブLC ※1	透明	5個 ¹⁾	SV-LO2・メラスピーチバルブ用
0025631201	14806019607093	VFチューブLG ※1	緑	5個 ¹⁾	
0025631301	14806019607109	VFチューブSC ※1	透明	5個 ¹⁾	SV-LO2・SV-BO2 メラスピーチバルブ用
0025631001	14806019610000	VFチューブSC 80cm ※2	透明	5個 ¹⁾	SV-LO2・SV-BO2・メラスピーチバルブ用
0025631401	14806019607116	VFチューブSG ※1	緑	5個 ¹⁾	SV-LO2・SV-BO2 メラスピーチバルブ用
0025635201	14806019607192	酸素用アダプタ	—	5個 ²⁾	流量計接続用

※1チューブの長さ: 200cm チューブ端内径(流量計側): 5.6mm

1) 延長アダプタが1袋に1個付属 2) VFチューブLCが1箱に1本付属

※2チューブの長さ: 80cm チューブ端内径(流量計側): 5.6mm

酸素用アダプタ

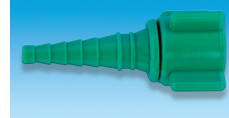

(別売) ソフィットVENT仕様

規格/型式	SV-L	SV-LO2	SV-S	SV-BO2 DG/SV-BO2 DO
一回換気量 (mL)	50~	50~	35~250	20~150
死腔量 (mL)	10	10	6	6
水分損失 (mgH ₂ O/L air)	12.9 (Vt 500mL)	12.9 (Vt 500mL)	13.6 (Vt 250mL)	15.0 (Vt 150mL) / 13.5 (Vt 100mL)
流量抵抗 (hPa)	0.27 (30L/min)	0.27 (30L/min)	0.16 (10L/min)	0.1 (5L/min) / 0.2 (10L/min) / 0.3 (15L/min)
重量 (g)	5	6	3	4.5
コネクタサイズ (mm)	患者側 ID 15	患者側 ID 15	患者側 ID 15	患者側 ID 15
滅菌方法	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌
商品コード	0025606101	0025606201	0025606301	0025606501/0025606401
JANコード	14806019604603	14806019604610	14806019604627	14806019611892/14806019611885
包装単位 (箱)	30個	30個	30個	30個

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

製造業者

MERASENKO CORPORATION 国名: フィリピン

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画): TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2021/3月/1000 ● 認証番号: 224ADBZX00097000 ● クラス分類: II ● 不許複製 ● A-58 ● F-1 ● BA-0156-04

www.mera.co.jp/