



Saliva suction tube with Mouthpiece fixation tool

メラ唾液持続吸引チューブ
唾液吸引用マウスピース固定具

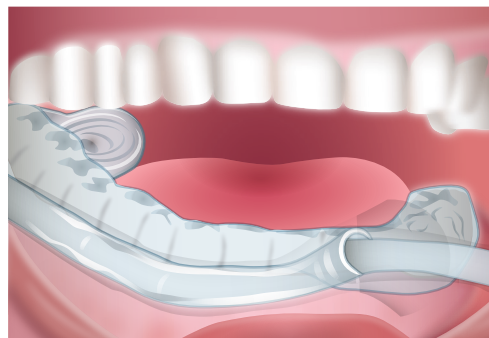

Saliva suction tube with Mouthpiece fixation tool

メラ唾液持続吸引チューブの保持と咬断防止
歯科技工で吸引チューブを固定させるマウスピースが作成できます

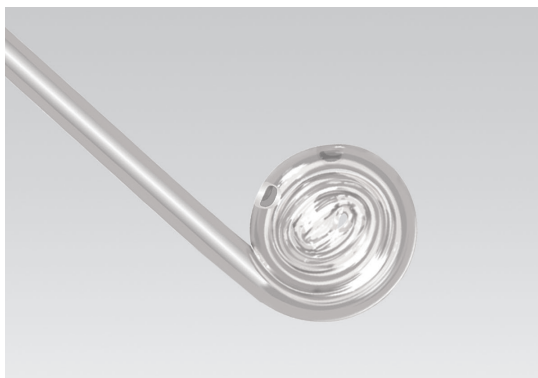


メラ唾液持続吸引チューブ MP-2(太・芯線無)




メラ唾液持続吸引チューブを
マウスピースに保持し持続吸引ができます

歯科技工の手順


① 印象を採り模型を作る

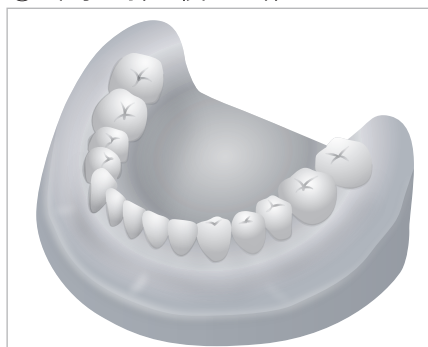


② 固定具を折り曲げ・接着

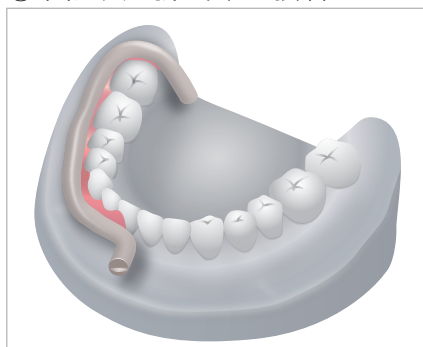

③ シート圧接・トリミング

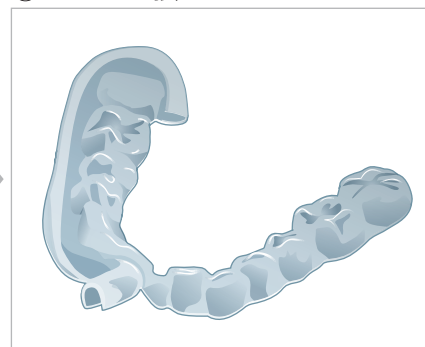

メラ唾液持続吸引チューブを通し完成

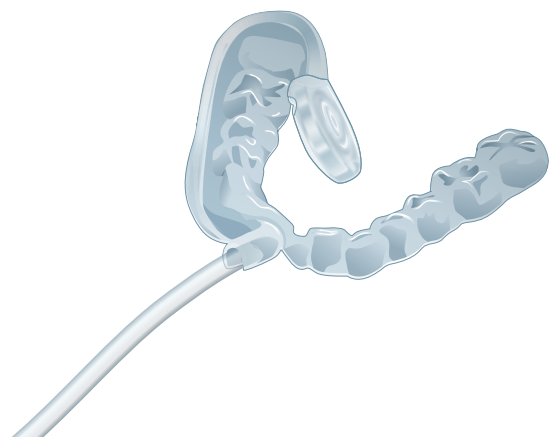

唾液持続吸引用
マウスピース作成の参考動画

YouTubeからご覧いただけます

メラ唾液持続吸引チューブ

商品コード	JANコード(13)	型式	チューブ寸法(mm)			接続口内径 (mm)	芯線の有無	テープ色	包装単位	承認番号
			内径	外径	全長					
0158005401	4806019603753	MP-2(太・芯線無)	φ2.5	φ3.9	1180	φ7	無	緑	10本/箱	15900BZZ01123000


唾液吸引用マウスピース固定具(歯科技工用)

- メラ唾液持続吸引チューブ MP-2(太・芯線無)の専用マウスピースが作成できます
- 柔軟な金属素材(錫 φ4.2mm×150mm)で折り曲げ、接着が可能です



▲柔軟な金属素材の唾液吸引用マウスピース固定具(2本入/袋)

商品コード	JANコード(13)	型式	包装単位	備考
0158002200	4544753213370	唾液吸引用マウスピース固定具 歯科技工用 φ4.2×150(mm)	2本入/袋	医療機器非該当品

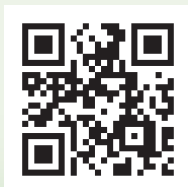

本製品は、PDNショップからも購入ができます

唾液吸引用マウスピースを使った持続吸引の事例 -YouTubeからご覧いただけます-



唾液持続吸引マウスピース①～既存の持続吸引との違い～
「唾液持続吸引マウスピースを使用した唾液誤嚥への対応と臨床評価」



唾液持続吸引マウスピース②～痰吸引の回数が減少する～
「唾液持続吸引マウスピースを使用した唾液誤嚥への対応と臨床評価」



製造販売業者

 **泉工医科工業株式会社** <https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意

実際のお取り扱いの際には電子添付文書を
よくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2024/11月/800 ●不許複製 ●GR-1 ●B-141 ●BO-0535-01

お問い合わせ

