

Be-Gel 150 (ビーゲル 150 廃液凝固剤)

Solidify agent

- 感染予防対策として廃液をゲル状に固められる汎用凝固剤です。
- 体液等を含む廃液をゲル状に凝固することが可能です。
- ボトル式なので適用する廃液の量や性状に合わせて無駄なく使うことが可能です。



■医療機器非該当

Be-Gel 150 (ビーゲル 150 廃液凝固剤)

使用上の注意

- 取り扱い時はグローブ、ゴーグル等の防護具を着用して下さい。
- 手(皮膚)や目に接触しないようにして下さい。
- 飲んだり吸い込んだりしないようにして下さい。
- ゲル化した廃液は、適切な処理方法に基づいて行って下さい。
- 保管は湿気を避け、室温保存して下さい。湿気により凝固性能が低下します。

仕様方法

- ①キャップを外し廃液の量や性状を勘案した量を投入し放置して下さい。
- 目安として本製品の一目盛りで約1 L程度の廃液をゲル化することが可能です。
- ゲル化に要する時間(目安:約10~30分)は廃液の性状により変化します。
- ゲル化が困難な場合には凝固剤を追加投入することでゲル化を促進します。
- 尚、廃液の性状によっては凝固が困難な場合があります。
- ②使用後はキャップをしっかりと締めて下さい。


適用・成分・容量

■適用: 体液等を含む廃液をゲル状に凝固することが可能です。
(Ht, Naが高いと凝固時間が長くなる場合があります。油分は適用外です)

■成分: 高吸収性樹脂(アクリル系重合体)

■容量: 150g

商品コード	販売名	規格・型式	数量
0289001201	Be-Gel 150(廃液凝固剤)	150g	50本/箱

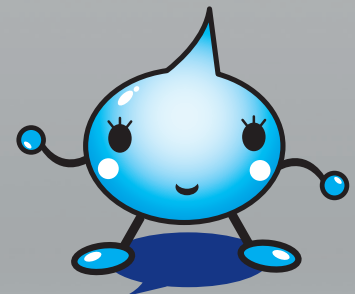

Be-Gel 150 イメージキャラクター



■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

札幌支店

〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階
TEL.011-210-2720 FAX.011-210-2721

東北支店

〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田4-9-6
TEL.022-748-1225 FAX.022-308-8820

青森営業所

〒030-0919 青森県青森市はまなす2-16-15
TEL.017-726-6730 FAX.017-737-0137

盛岡連絡事務所

〒020-0834 岩手県盛岡市永井22地割3-130 コーポ芳本102
TEL.019-601-4622 FAX.019-601-4623

福島連絡事務所

〒960-0112 福島県福島市南矢野目字荒屋敷58-10 企業情報福島ビル1階
TEL.024-555-6601 FAX.024-555-6602

関東支店

〒344-0054 埼玉県春日部市浜川戸2-10-1
TEL.048-761-0521 FAX.048-761-0527

松本営業所

〒399-0007 長野県松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号
TEL.0263-29-1366 FAX.0263-29-1367

新潟連絡事務所

〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-7 ウエルス小新C号室
TEL.025-201-3221 FAX.025-232-9105

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル4階
TEL.03-3812-3331 FAX.03-3812-3332

つくば営業所

〒305-0821 茨城県つくば市春日3-5-20
TEL.029-852-7310 FAX.029-855-7175

横浜営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F
TEL.045-476-8850 FAX.045-476-8859

中部支店

〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-1-15
TEL.052-331-3121 FAX.052-339-3862

静岡営業所

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田59-1
TEL.054-287-7081 FAX.054-287-7082

金沢営業所

〒920-0057 石川県金沢市桜田町2-87
TEL.076-224-7717 FAX.076-224-7727

関西支店

〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-24-2
TEL.06-6764-8030 FAX.06-6764-8040

中四国支店

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原1-3-8
TEL.082-850-1680 FAX.082-871-2370

岡山営業所

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2355-1
TEL.086-209-0071 FAX.086-209-0073

四国連絡事務所

〒760-0077 香川県高松市上福岡町816-1 マルエイビルⅡビル
TEL.087-861-2146 FAX.087-861-2150

九州支店

〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町1-1-14
TEL.092-474-0381 FAX.092-411-1325

鹿児島営業所

〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町25-11 メゾン林A103
TEL.099-256-7843 FAX.099-256-4789

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承下さい。

●2021/3月/1000 ●不許複製 ●F-1 ●B-39 ●BO-0099-01 ●本品は医療機器非該当品です www.mera.co.jp/