

# クリップエイド™ (φ3)

## ClipAid™ for φ3 tubes



■ チューブの引っ張りから  
気切孔を守ります。

■ クリップが回転するので  
チューブの動きを妨げません。

■ 衣類に穴をあけることなく  
チューブがクリップできます。

■ BabyO2 の落下防止にも役立ちます。

(酸素が必要な場合は、チューブを適当な長さに切り端を結んでクリップにセットします)

| 商品コード | JANコード(14)     | 商品名        | チューブ径 | 包装    |
|-------|----------------|------------|-------|-------|
| 9024  | 14562127610867 | クリップエイド 03 | φ3mm  | 3 個/箱 |

Amazon.co.jp にて好評販売中


## ■ 使い方

(トレーナーくらいの厚さまでの布地に使えます)

1 左右の突起を押してホルダーを開きます。2 裏地にボタンをあてホルダーをかぶせます。3 「カチツ」とロックするまで押し込みます。



4 クリップの2本の爪の間にチューブを通します。患者さんの肩に取り付けることをお勧めします。

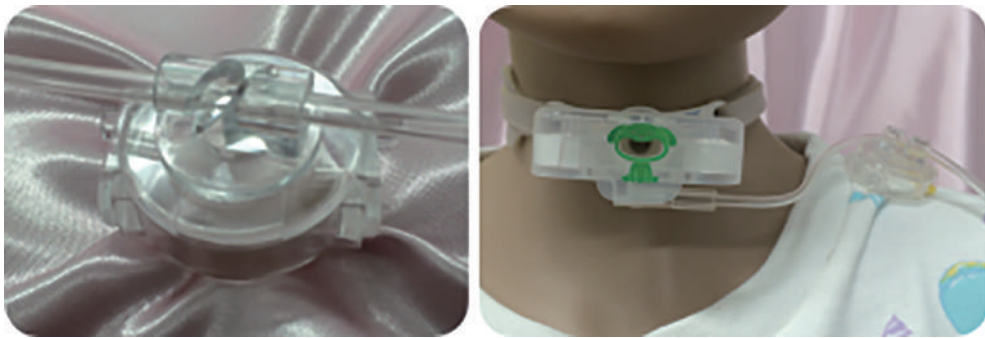

■ **ご注意**      **小さなお子様にご使用になる場合は、誤嚥防止の為  
固定ボタンを縫い付けてご使用下さい。**



裏付け：ボタンを生地の裏側に縫い付けます。  
ホルダーが布地を噛むので、しっかり固定できます。



表付け：ボタンを生地の表側に縫い付けます。  
取り付け後のクリップホルダーに多少ガタツキが出ます。

**泉工医科工業株式会社**

113-0034 東京都文京区湯島 3-20-7 泉工医科工業株式会社 第三別館 2F  
商品企画 麻酔 お問い合わせ専用メールアドレス：Clip@mera.co.jp