

2017年4月 第3版(新記載要領に基づく改訂)
* 2015年6月 第2版
2007年9月 第1版

承認番号：21900BZX00368000



機械器具 29 電気手術器
管理医療機器 処置用対極板 11500002
アクティブ電極
*対極板アダプター (A・B・E)

***【禁忌・禁止】**

- 本品は電気手術器(電気メス)専用の対極板用アダプターの為他の用途には使用しないこと。 [機器の故障や熱傷の恐れがあるため]

***【形状・構造及び原理等】**

形状

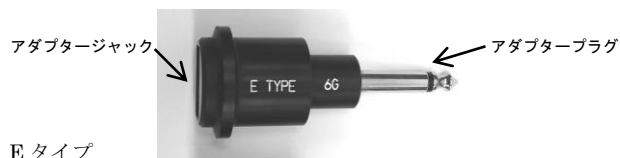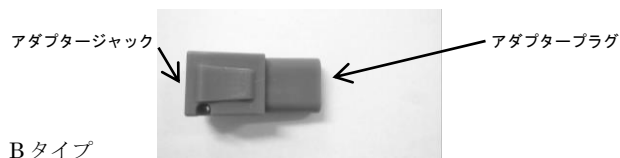

***原理**

アクティブ電極から患者に流れた高周波電流を、対極板で電流を回収する際使用するアダプター。

***【使用目的又は効果】**

電気手術器の対極板出力端子に装着し対極板を接続するアダプター。

***【使用方法等】**

1. 電気手術器の主電源が投入されていないことを確認後、本品を対極板出力端子にしっかりと奥まで差し込むこと。
2. ディスポーザブル対極板を使用する際に、接続部プラグ形状を確認後、アダプタージャックにしっかりと差し込むこと。

***再使用のために必要な処置**

使用後は【保守・点検に係る事項】の滅菌及び使用者による保守点検事項を行うこと。

【使用上の注意】

1. 使用するにあたり接続する電気手術器と対極板の取扱説明書及び添付文書をよく読んでから使用すること。
2. 使用前に必ず製品の外観等の点検を行い、破損、亀裂、変形等の異常があった場合は使用しないこと。
3. 接続部に薬液等の浸入が無いように、注意すること。
- *4. 使用の際は必ず電気手術器の対極板出力端子の奥までアダプタープラグを挿入すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件 温度 0℃～50℃ 湿度 30%～90%
2. 本品は、有効使用期間を定めることが出来ない。 [取り扱い状況、保管状況などの条件で使用期間が大きく左右されるため]

【保守・点検に係る事項】

洗浄・消毒・滅菌

1. 本品は、オートクレーブ滅菌又はガス滅菌等の滅菌を行うと本来の性能が発揮できなくなる可能性があるため、滅菌せず消毒処理とすること。
2. 消毒はアルコールを浸したガーゼ等で拭き、よく乾燥させた後、使用すること。

使用者による保守点検事項

1. 点検は、使用する前日、又は直前に行うこと。
2. 主に外観上の不具合や、作動チェックを中心に行うこと。
3. 本品は接続不良を防止するために定期的(1年間又は100回の使用を目安)に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 セムコ
〒123-0851 東京都足立区梅田 4-16-8

製造元：株式会社 セムコ

販売元：泉工医科工業 株式会社
お問い合わせ先：商品企画 TEL 03-3812-3254