

機械器具 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 エアロゾル注入チューブ 32202000
(単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000)
(単回使用麻酔用呼吸回路 37704000)

メラ蛇管

再使用禁止

【警告】

- * 1. 本品を他の製品と接続する場合は、接続部が確実に接続されていること、接続部位に直線的、又は回転的な過剰な力が加わっていないこと、閉塞やガス漏れ等が生じていないことを、接続時に確認すること。[閉塞、リーク、接続外れにより、換気不全に陥る可能性がある]


【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止
2. 滅菌、洗浄、消毒禁止 [変形によるリークのおそれがある]
3. 火気のある場所及び発火のおそれのある場所では使用しないこと。[火災発生のおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状又は構造
- * 図1. メラ蛇管

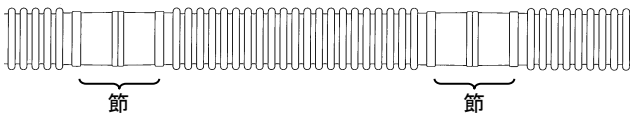

** 表1. メラ蛇管

型式	全長 (本数)	節の間隔	節の内径
3015M	30m (1本)	約15cm	21mm
15015C	1.5m (20本)	約15cm	21mm

* 2. 原理

ネブライザー等のエアロゾル発生器と酸素マスク等の器具を接続することで患者にエアロゾルを供給する。又は、機器側を人工呼吸器もしくは麻酔器に接続することで機器と患者間に流れるガスの経路となる。

* 【使用目的又は効果】

酸素マスク、気管チューブ、加湿器、ネブライザーと接続してエアロゾルを注入するために使用する。又は、人工呼吸器もしくは麻酔器から患者への空気もしくは酸素を含むガスの送入に用いる。

* 【使用方法等】

使用方法

1. 包装から本品を取り出し、必要な長さを取って節の中央部分で切断する。
2. 酸素マスクや気管チューブ等の器具と加湿器やネブライザー等のエアロゾル発生器に接続して、エアロゾルを注入するために使用する。又は、酸素マスクや気管チューブ等の器具と人工呼吸器もしくは麻酔器に接続して、患者への空気もしくは酸素を含むガスの送入に用いる。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 接続部の漏れや閉塞がないことを確認すること。
2. 気管チューブ、気管切開チューブと接続する場合はT型コネクタ等を使用して、必ず患者の呼吸が排出できるようにすること。[呼吸が排出できず、肺もしくは気道を損傷するおそれがある]
3. 加湿器やネブライザー等のエアロゾルを発生する装置に接続して使用する場合は、ウォータートラップ等を用いて蛇管内に結露した水が貯留しないようにすること。[回路の閉塞や細菌感染を防ぐため]
4. 患者又は接続した医療機器の移動に伴って、呼吸管の接続外れや閉塞、ねじれが生じる場合があるので注意すること。

5. 本品は加湿加湿器を併用する場合、最高稼働温度が60℃以上のガスを呼吸管に流さないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 蛇管内に水が貯留しないようにすること。
- * 2. 他の医療機器と組合わせて使用する際は、安全確認を行ってから使用すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

* 保管の条件

水漏れ、ほこり、高温 (50℃以上)、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。

* 有効期間

* 包装箱に記載。[自己認証 (当社データ) による]

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名：フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011