

メラブリージングコネクタ

再使用禁止

【警告】

1. 本品を他の呼吸管理器具 (呼吸回路など) と接続する場合は確実に接続されていること (リーク、閉塞、接続が緩いなどの問題がないこと) を確認し、使用中も十分な管理、観察を行うこと。[接続が不完全な場合、呼吸困難などを引き起こすことがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 滅菌、洗浄禁止
3. 酸素を使用している場合は、周囲で火気及びスパークの発生する可能性のある物を使用しないこと。[発火・爆発を誘発する可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

図1. エルボコネクタ


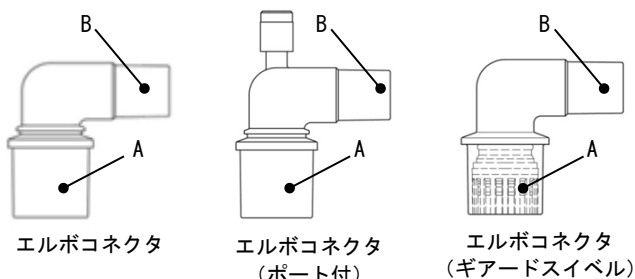


図2. Tアダプタ

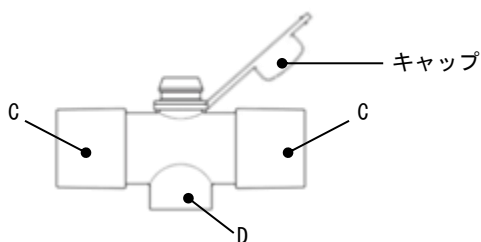

2. 種類と構成

表1. エルボコネクタ

| 型式 | 寸法 | | 死腔 |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|
| | A | B | |
| エルボコネクタ | 15/22mm 雌雄同軸円すいコネクタ | 15mm 雄円すいコネクタ | 約10mL |
| エルボコネクタ (ポート付) | | | |
| エルボコネクタ (ギアードスイベル) | | | |

表2. Tアダプタ

| 型式 | 寸法 | |
|------------|---------------|------|
| | C | D |
| 気管切開用Tアダプタ | 22mm 雄円すいコネクタ | 15mm |

3. 原理

他の医療機器同士を連結することができる。

【使用目的又は効果】

呼吸回路の連結などを目的として使用する。

【使用方法等】


使用方法

本品 (未滅菌) は、単回使用製品であるので、再使用しないこと。

1. 接続しようとする呼吸回路部品に対して、本品のうち適当な形状を選択する。接続部が緩まないように確実に接続する。使用方法等に関連する使用上の注意

1. エルボコネクタ (ギアードスイベル) の15mm 雌円すいコネクタに人工鼻、フィルタ付き人工鼻、マスク等の15mm 雄円すいコネクタを接続するときは、エルボコネクタの15mm 雌円すいコネクタを摘んだ状態 (内部の回転コネクタがロックされる) で捻りながら強く押し込み確実に接続すること。外すときは、同様に15mm 雌円すいコネクタを摘んだ状態で回転させ外すこと。(15mm 雌円すいコネクタは回転機能があるため) (図3参照)

図3. 医療機器の取り付け、取り外し方法

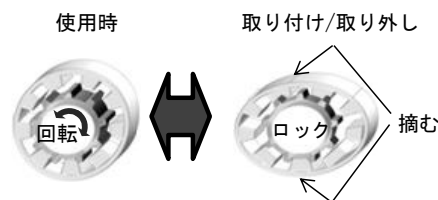

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品はコネクタ接続部の形状が JIS T 7201-2-1 : 1999 に適合した医療機器と接続して使用すること。
2. 薬液 (アルコール、界面活性剤など) で濡らして使用しないこと。[ひび割れ等の危険がある]
3. 他の医療機器と組合わせて使用する際は、安全確認を行ってから使用すること。
4. 本品は未滅菌のため、清潔野で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管の条件

水漏れ、ほこり、高温 (50°C以上)、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。

有効期間

包装箱に記載。[自己認証 (当社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名 : フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011