

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

タバネル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
本品は、E.O.G 滅菌された再使用禁止製品である。
再滅菌・再使用をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

- * 1. 形状・構造
(プレート付)

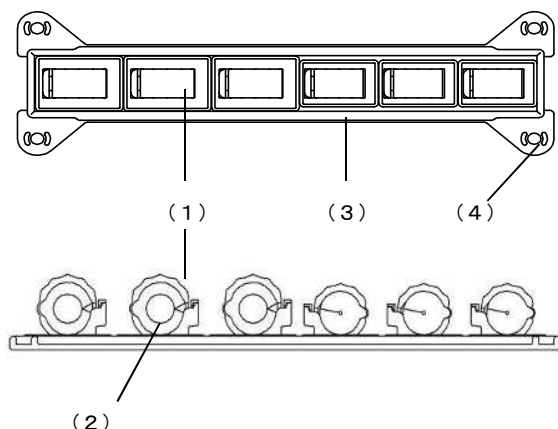

- * * 2. 種類

型式名	クランプ数（プレート上）
フィックス33	小3個：大3個
フィックス42	小4個：大2個

3. 各部の機能

照番	各部の名称	機能
(1)	クランプ	チューブ、コード等を束ねる
(2)	スポンジ	チューブ、コード等を保護する
(3)	プレート	個々のクランプを連結し手術台に固定する
(4)	プレート固定部	鉗子等で固定する場合の孔

* 【使用目的又は効果】

本品は手術台に付属するアクセサリである。手術中に使用される機器等のコードやチューブを束ねて固定することにより、手術が円滑に進行できる。本品は滅菌済みであり開封後直ちに使用できる。

* * 【使用方法等】

- プレート上のクランプを開き、束ねて固定したいコードやチューブをスポンジに載せクランプを閉じる。
- プレートを固定する場合は、プレート固定部の孔にタオル鉗子等を掛けてドレープやL字フックに固定する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 患者の体位変更などにより本品の固定が外れないように注意すること。

- 手術中に使用されるコード、チューブ以外の物には使用しないこと。
- チューブに使用する場合は、本品を使用することによりチューブが閉塞しないようにすること。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

水濡れ、ほこり、高温、多湿、直射日光にあたる場所は避けること。

有効期間

包装箱に記載 [自己認証（当社データ）による]

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)

国名：フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011