

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000
ドレーンコネクター Y

再使用禁止

【警告】


1. 取り付け時及び使用中は外れやリークに注意し、適宜増し締め、締め直しなどの適切な処置を行うこと。[接合部は使用中に緩むことがある]
2. 本品に破損又はリークなどの異常を発見した時は交換等の適切な処置を行うこと。[リークに気付かず継続使用すると吸引不良により健康被害を起こす可能性がある]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

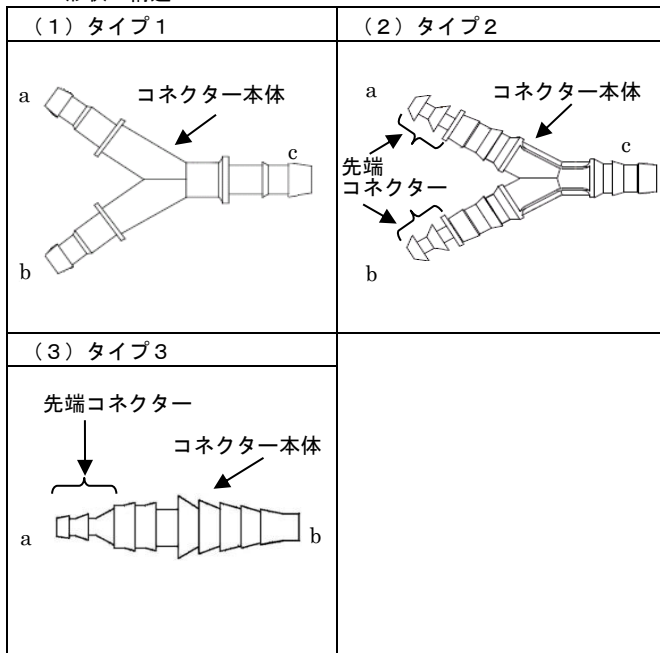

タイプ2及び3は、コネクタ本体と先端コネクタを接着剤により接合している。

モデル	タイプ	外径		
		a	b	c
モデルD	タイプ1	5.5~7.5mm	5.5~7.5mm	10~13mm
モデルE	タイプ2	5mm	5mm	10~13mm
モデルG	タイプ1	5.5~7.5mm	5.5~7.5mm	7~9mm
モデルH	タイプ2	5mm	5mm	7~10mm
モデルI	タイプ3	5mm	6.5~12mm	—

【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルを容器等の別の対象物に接続するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 本品を滅菌袋から取り出し、本品の外観に破損、汚れ、ひびなどの異常がないかを確認する。
2. 適合するサイズのドレーンチューブ又はカテーテルを接続する。
3. 患者の体位変更などにより本品の接続が外れないように、必要に応じてバンディングやテーピング等で固定する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装開封後はすぐに使用すること。
2. 本品に落下などの強い衝撃を与えた場合は使用しないこと。
3. 接続の際は、接続部を不潔にしないこと。また、外れることのないようしっかり接続すること。
4. 各種の器具類やチューブ類との接続以外の目的には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

包装の密封が維持できるように、衝撃や外からの圧力が加わらないように保管すること。

有効期間

包装に記載の使用期限を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

レダックス エスピーエー社

(REDAX S.p.A.)

国名：イタリア

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011