

機械器具 29 電気手術器
管理医療機器 処置用対極板
NE ジェルパッド

11500002

(スプリット)

(コード付き ラージタイプ)

再使用禁止

【警告】

- 本品電極面と患者皮膚面を完全に密着させること。[患者の密着状況の監視を怠ると熱傷の恐れがあります。]


【禁忌・禁止】

- ディスポーザブル製品であり、再使用禁止。
- 使用前に必ず包装及び製品の外観、電極面、コード等の点検を行い汚損、破損、変形、濡れ等の異常があった場合は使用禁止。
- 高周波加熱治療用（ラジオ波凝固器等）の対極板として使用禁止。
- 保護フィルムが対極板に残ったまま患者に装着しないこと。（保護フィルムが残ったまま患者に装着すると、適正な電流回収が出来ず、熱傷する可能性があるため、必ず取り除くこと。）
- 本品への折り曲げ・切断・加工改造等は一切禁止。
- 手術終了後対極板を皮膚から剥がす時、性急な剥がし方は患者の皮膚を傷つける可能性があるため、この様な剥がし方は禁止。
- 導電型対極板接触状態監視機能が搭載された電気手術器用対極板であり、この機能が搭載された電気手術器以外の使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

外観図、構造図 及び外形寸法・重量
袋ごとの重量：約 60 g

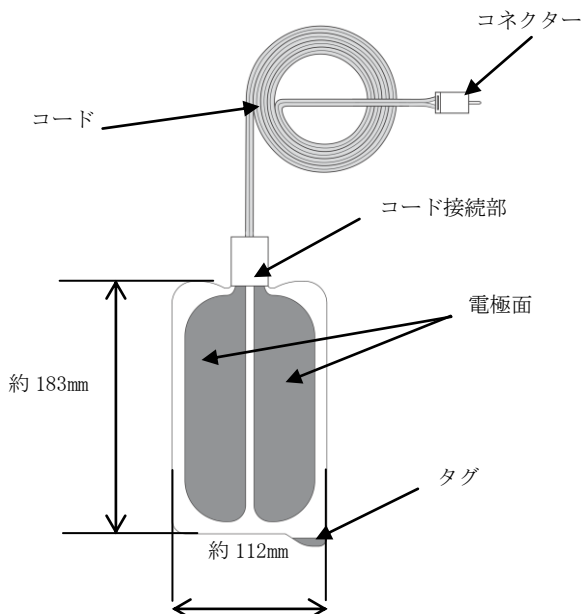

2. 原理

アクティブ電極から患者に流れた高周波電流を広い面積で受け止め、患者皮膚を発熱させない安全な電流密度に下げ、電流を回収する電極である。

【使用目的又は効果】

電気手術器（電気メス）により、切開及び凝固を目的として生体に流された高周波電流を回収するために使用される対極板である。

【使用方法等】

- 1) 対極板は広い面積でパッドの電極面全体が、患者の皮膚に適切に貼られていることが重要なため、次のような部位に正しく装着すること。[■十分に対極板を貼る面積があること ■正常で平面的な皮膚に均一に密着させること ■血行の良い筋肉質な部位 ■清潔な部位 ■毛のない部位 ■術野に出来るだけ近い部位（例として大腿部、臀部、背部など）] 貼付方向は長辺が手術部位に対して垂直になるように貼付けすること。
- 2) 包装は使用の直前に開けること。
- 3) コードの輪をほぐしてから、まっすぐに伸ばすこと。
- 4) 保護フィルムを剥がし、時間を置かず患者に貼ること。
- 5) 皮膚との接触を良好にするため、体毛のない貼付部位が得られない場合は、必ず貼付部位の除毛を行うこと。[除毛を行わないと対極板と皮膚の接触が悪くなり熱傷を起こす可能性があります。]
- 6) 対極板のコードと反対側にあるタグから保護フィルムを剥がし、ジェル接着面の端から順次皮膚にしわが出来ないように密着させ、空気、ゴミ、不織布等が入らないように接着面全体を均一にしっかりと貼ること。
- 7) 対極板周辺や装着面内部に消毒液等の付着や侵入を防止すること。
- 8) 装着確認は、2人以上で行うこと。
- 9) 発汗作用や皮膚の性状による剥がれに対しては、接着力を補うために対極板四方をサージカルテープ等で固定すること。
- 10) 本品を電気手術器に接続するとき、専用のアダプターを必要とする場合は、このアダプターは当社製か当社が指定したものをを使用すること。
- 11) 本品を患者に正しく貼付し、コネクタを接続する前に電気手術器の電源を入れる。対極板に関する警報が作動することを確認してからコネクタを接続し、警報が消えることを確認すること。
- 12) 本品の接着力は患者皮膚の個体差によって接着力が異なるため、装着部位を守り、術中容易に監視が出来る部分に貼って剥がれが無いかを常に監視すること。
- 13) 対極板を剥がすときは、コードの反対側にあるタグ部分を持ち、皮膚を下に押さえ、剥がす方向に向かって斜め上方（135度）に引き上げながら患者の皮膚を傷つけないようゆっくり行うこと。特に外周部及び外周耳部（コード側にある半円状の剥がれ防止部）は粘着性が良いので、やさしくゆっくり剥がすこと。
- 14) コードを持って無理に引っ張ったり性急に剥がしたりすると皮膚損傷が起きる可能性があるため、皮膚と対極板の粘着部にアルコール綿を押し込み主に対極板の外周部、外周耳部にアルコールを浸透させてから剥がす方向に向かって斜め上方（135度）に引き上げながら急がずに剥がすと無理なく剥がすことが出来ます。
- 15) アルコール過敏症の患者には、ぬるま湯を含ませたガーゼ等で濡らしながら上記と同様な方法で、ゆっくりと無理せず剥がすこと。

【使用上の注意】

- 1) 一度貼った対極板の貼り直しはしないこと。
- 2) 本品に導電性ジェル等を塗布して使用しないこと。
- 3) 下記のような部位には対極板は貼らないこと。
[■骨の突出部 ■傷跡、瘢痕部 ■金属製インプラント材料等の付近 ■血行の悪い部位 ■汗、脂、化粧品、薬液、液体等が附着している皮膚面 ■手術中に液体で濡れる可能性がある部位 ■眼、頭部、顔面、首、心臓の近く、上肢、膝より下 ■対極板全面が貼れない部位 ■心電図の電極や他のモニタ電極の近傍 ■ポピドン・ヨード系消毒液を塗布した皮膚面 ■左右の臀部間の様に隙間(非接着面)ができるような部位 ■貼った後曲面になるような部位や膝・肘などの稼動部位 ■患者の下敷きになる部位や圧迫を受ける部位]
- 4) コードは患者の体の下敷きにしなないこと。また患者の四肢、鉗子類、手術台、消毒盤台、電気手術器等に巻き付けたり、コイル状にしなないこと。
- 5) コードを他のME機器電極及びコードに近接させないこと
- 6) コードに十分な「たわみ」を持たせ、患者に正しく装着したあと対極板やコードに異常な圧迫や引っ張り力を与えてはならない。術中の体位変換や、コードの引っ掛け等で、通常使用時と異なる力が働いた場合、対極板の亀裂や、コードの断線等により、電極・電線の露出が原因で熱傷する可能性があるためダメージがあった場合は使用禁止。
- 7) 本品は滅菌処理をしていません。オートクレーブ滅菌やガス滅菌を行うと、対極板としての本来の性能が発揮できなくなるため滅菌しないこと。
- 8) 本品の保護フィルムはコード側から剥がすと破れる可能性があるためタグから剥がすこと。タグ側からでも勢いよく剥がすと破れる可能性があるため、やさしく剥がすこと。
- 9) 患者皮膚状況や、貼付時の密着状況不良により当初より、電気手術器の対極板接触警報が鳴る場合がある。
(特に高齢者又は乾燥皮膚面の患者の場合、貼付部位を温水や濡れたタオルで清拭したあと、剥がれを防止するため余分な水分を拭き取り対極板を貼ること。接触抵抗性が改善され対極板接触モニタの誤動作を低減できる)
- 10) 通常の出力で使用中、出力変動や低下等が発生した場合、むやみに電気手術器の出力を上げず、対極板の装着状況や損傷、コード断線や接続状況を検査して異常がないことを確認後、手術を再開すること。
- 11) 使用に関しては、接触状態監視機能の搭載された電気手術器の取扱説明書及び添付文書を熟読の上、使用すること。
- 12) 本品は容量型対極接触状態監視機能搭載の電気手術器には使用できません。(SAS等)
- 13) 電気手術器の出力設定は必要最低限で使用し、高出力で長時間の連続使用を行った場合は、十分な休止時間を取ること。
- 14) ソフト凝固モード等の高電流出力モードを搭載した電気手術器で使用する場合は取扱説明書及び添付文書を熟読の上、出力設定、出力時間等を確認して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管条件 温度 10℃～32℃ 湿度 30%～90%
- 2) 箱から出した本品を折り曲げや積み重ねしないこと。
- 3) 本品に過渡の急激な圧迫や引っ張り力を加えないこと。
- 4) 本品の上に他の製品を載せないこと。
- 5) 有効期間の記載は、一枚毎の包装袋に秒時計のマークに続いて記載しています。
- 6) 有効期間を過ぎたものを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 セムコ

〒123-0851 東京都足立区梅田 4-16-8

製造元：積水化成工業株式会社

販売元：泉工医科工業 株式会社

お問い合わせ先：商品企画 TEL 03-3812-3254