

\*2017年12月（第6版）  
2016年3月（第5版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 6 呼吸補助器  
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

## 酸素供給システム (ニップルナット、チューブコネクタ)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### <使用方法>

- ・本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元] 泉工医科貿易株式会社

\* [製造元] ソルターラブズ社  
Salter Labs  
アメリカ合衆国

#### 【形状・構造及び原理等】


本製品は下記の種類がある。

1. ニップルナット

2. チューブコネクタ

タイプ： チューブコネクタ  
チューブコネクタ・シーベル  
チューブコネクタ・クリップ付

[お問合せ先] 泉工医科工業株式会社 商品企画  
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011

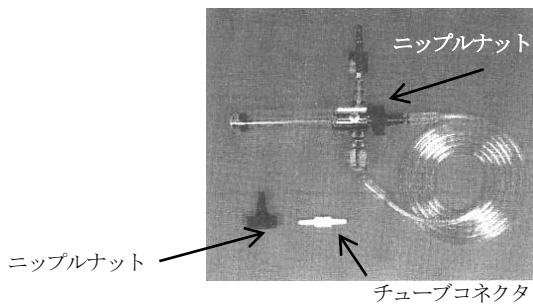

ニップルナット	アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体 (ABS 樹脂)
チューブコネクタ	ポリ塩化ビニル
チューブコネクタ・シーベル	ポリエチレン
チューブコネクタ・シーベルクリップ付	ポリエチレン

本品は、ポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を使用している。

#### \* 【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。

(本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具である。)

#### \* 【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

- ・ニップルナット  
延長チューブと酸素流量計を接続するコネクタとして使用する。
- ・チューブコネクタ  
酸素チューブ同志を接続するコネクタとして使用する。

#### \* 【使用上の注意】

##### <その他の注意>

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。