

**2017年12月（第7版）

*2017年3月（第6版）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000

酸素供給システム (T-アダプター、マウスピース、E-Zラップ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ＜使用方法＞
- ・本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

本製品は下記の種類がある。

*1. T-アダプター

タイプ：Anti-Drool



T-アダプター	スチレン-ブタジエン樹脂
---------	--------------


*2. マウスピース

タイプ：マウスピース



マウスピース	ポリエチレン
--------	--------

3. E-Z ラップ

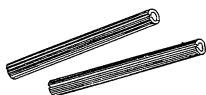

E-Z ラップ	ポリエチレン
---------	--------

**【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

・T-アダプター

患者にエアロゾル療法を行う際に、ミニネブライザー、マウスピースと接続する。

・マウスピース

患者にエアロゾル療法を行う際に、ミニネブライザー、T-アダプターと接続する。

・E-Z ラップ

鼻腔カニューラ等の、患者の耳にかける部分に取り付ける。

【使用上の注意】

＜その他の注意＞

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】 泉工医科貿易株式会社

**【製造元】

Salter Labs
ソルターラブズ社
アメリカ合衆国

【お問合せ先】 泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011

**【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。

（本品は酸素療法を行う際に、空気、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具である。）