

 Anesthesia

メラトラキホルダ F

MERA Trache Holder




メラトラキホルダ F

特長

- 患者様の首の太さに合わせて切って長さ調節するフリーサイズです(分離型)。面ファスナー部分が頸部の背側に回り込みません。
- 気管切開チューブを押さえる両端の細い面ファスナーは、先端を面取り裁断しています(イラストA)ので、ネックプレートの穴の挿入を容易にしています。
- 気管切開チューブのテープ通し穴にナイロン部まで通す(イラストB)ことで、面ファスナーが患者の皮膚に触れません。
- 目立ちにくい肌色です。

長さ調整方法

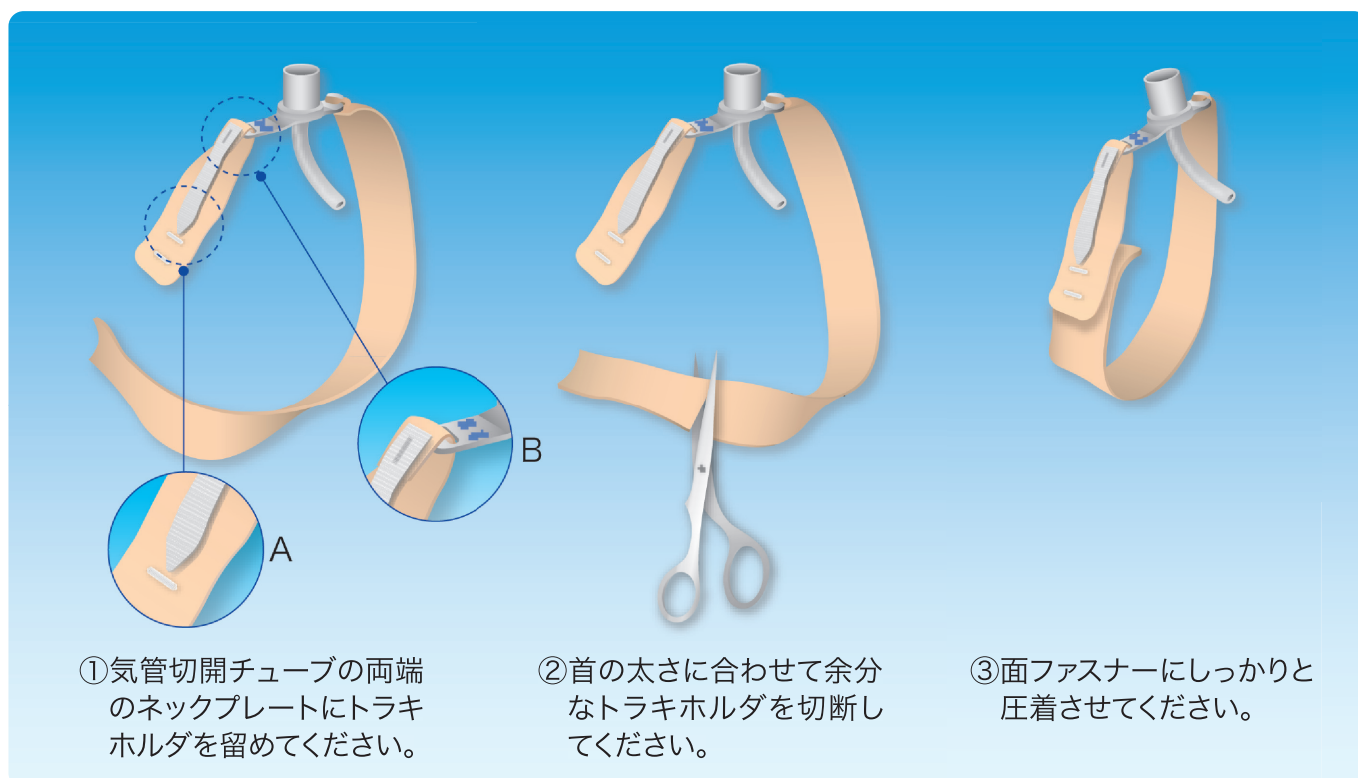

製品仕様

商品コード	商品名	包装	JANコード(14)
0043103701	メラトラキホルダ F	10個/箱(1個/袋)	14806019609400

※本製品は未滅菌です。

注意

- 長さを合わせて切断する際は長い方の断端を切断してください。
- 面ファスナー(表裏共)が直接皮膚に接触しないようにしてください
- 強い力で引っ張ると面ファスナーとナイロンの貼り合わせは外れることがあります。

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画): TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613)

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

製造業者

MERASENKO CORPORATION

国名:フィリピン

注意

ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2017/3月/1000 ● クラス分類: 医療用雑品 ● 不許複製 ● A-74 ● GR-1 ● BA-0242-02

www.mera.co.jp/