

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 JMDNコード：35517000

VADI バイトブロック

再使用禁止

【警告】


- 性能、目的に合った使用をすること。性能、使用目的以外での使用は破損、欠損の原因になります。
- 包装に、破れ、水濡れがある時は使用しないこと。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 性能、使用目的以外の使用禁止。
- 破れ、水濡れがあるときは使用禁止。使用前に破れ、水濡れの有無を確認すること。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管すること。

【形状・構造及び原理等】

1・形状

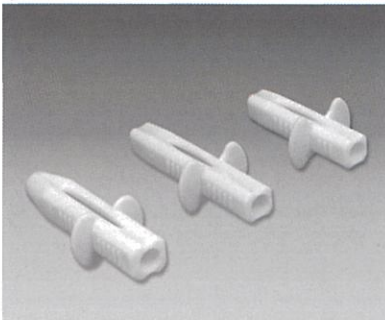

2・原材料 ポリエチレン

3・原理
筒の形状をしたブロック体で硬度に富んでおり、上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する。
挿管チューブの咬み防止を行う。

【使用目的又は効果】

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。遠位端は丸く、挿入して開孔するときに開口部を拡張又は伸張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。

【使用上の注意】

- 1・禁忌・禁止
 - ①包装が、開封、破損、水濡れしている場合は、使用しないこと。
 - ②包装開封後はすぐに使用すること。
 - ③本品は、単回使用である。
 - ④開封前の製品であっても、再滅菌禁止。
- 2・使用注意
 - ①必ず本品の滅菌袋に記載されている有効期限を確認し、有効期限の過ぎたものは使用しないこと。
- 3・重要な基本的注意
院内のプロトコール（使用手順・基準）及び専門の医師に従い挿管チューブを挿入し、バイトブロックを固定する。

【保管方法及び有効期間等】

- ①本器具は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管して下さい。
- ②有効期限：包装箱に記載（自己認証（当社データ）による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

センシンメディカル株式会社

製造業者

VADI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 台湾