

メラ冷温水槽用洗浄剤

HTP-1 (アルカリ系) / HTP-2 (次亜塩素酸系)



メラ冷温水槽用洗浄剤

■特長

- HTP-1は、殺菌効果を有する主な成分として、低水準消毒液に属する塩化ベンザルコニウムが含まれています。
塩化ベンザルコニウムは大腸菌、黄色ブドウ球菌等の病原菌や一般細菌に対して有効です。
- HTP-1は冷温水槽配管部への、腐食性の低い成分であり、高頻度の洗浄が可能となりました。
これにより常に清浄を保ちやすく、また、カルシウムの堆積・固着の防止に繋がります。
- HTP-2については、上記殺菌効果の他、結核菌、真菌、B型肝炎ウイルス等に対しても有効です。

■製品情報

製 品 名	メラ冷温水槽用洗浄剤(アルカリ系) HTP-1	メラ冷温水槽用洗浄剤(次亜塩素酸系) HTP-2
主な成分	エタノール 界面活性剤 塩化ベンザルコニウム	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤 水酸化カリウム
使用期限	製造後2年	製造後1年
容 量	1 L 50倍希釈で使用	1 L 50倍希釈で使用
洗浄頻度	1回/月	1回/半年
構 成 品	本洗浄剤、計量カップ 取扱説明書	本洗浄剤、計量カップ 取扱説明書
対象製品	メラ冷温水槽 HHC-300 メラ冷温水槽 HHC-211D/211 メラ冷温水槽 HHC-60 メラ小型冷温水槽 HHC-51 メラ二槽式冷温水槽 HHC-121 体外循環用システムTRUSYS メラ心筋保護液供給システムHCP-5000 メラ遠心血液ポンプシステム HCS	メラ冷温水槽 HHC-300 メラ冷温水槽 HHC-211D/211 メラ冷温水槽 HHC-60 メラ小型冷温水槽 HHC-51 メラ二槽式冷温水槽 HHC-121 体外循環用システムTRUSYS メラ心筋保護液供給システムHCP-5000

■洗浄方法

詳細については取扱説明書を参考すること。

- ①水道水で本洗浄剤を50倍(2%)に希釈した洗浄液を準備する。
- ②洗浄液を水槽に入れ、最大流量で1時間程度循環する。なお、通常温調、急速加温の切り替えも行う。
- ③循環を終了し、洗浄液を排出する。
- ④すすぎ水道水を水槽に入れ、10分以上循環を行う。なお、通常温調、急速加温の切り替えも行う。
- ⑤循環を終了し、排出し、再度④を繰り返す。

販売業者



■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島



実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2020/4月/2000 ● 不許複製 ● S-1 ● D-149 ● BH-0433-01

www.mera.co.jp