

serres



微量用ボトル & 病理標本採取用カップ

 MERA


## ●微量用ボトル

微量用ボトルには細かな目盛が表記されており、0～50mlは5ml毎に、50ml～280mlには10ml毎に計測が出来ます。最大目盛は280ml、最大容量は400mlです。

微量用ボトルの引掛け部を、吸引バッグ上蓋にある「微量用ボトル取付口」に挿し込み、チューブを接続して準備完了です。

微量用ボトルは廃液量の計量に使用されますが、計量後はそのままの状態でも吸引を継続出来ます。又、一旦外して微量用ボトルを傾け、第一層のキャニスタ（吸引バッグ）へ流し込むことも可能です。感染予防の観点から、微量用ボトルはディスポーザブル仕様となっています。

### 【セレス吸引バッグ 上蓋】

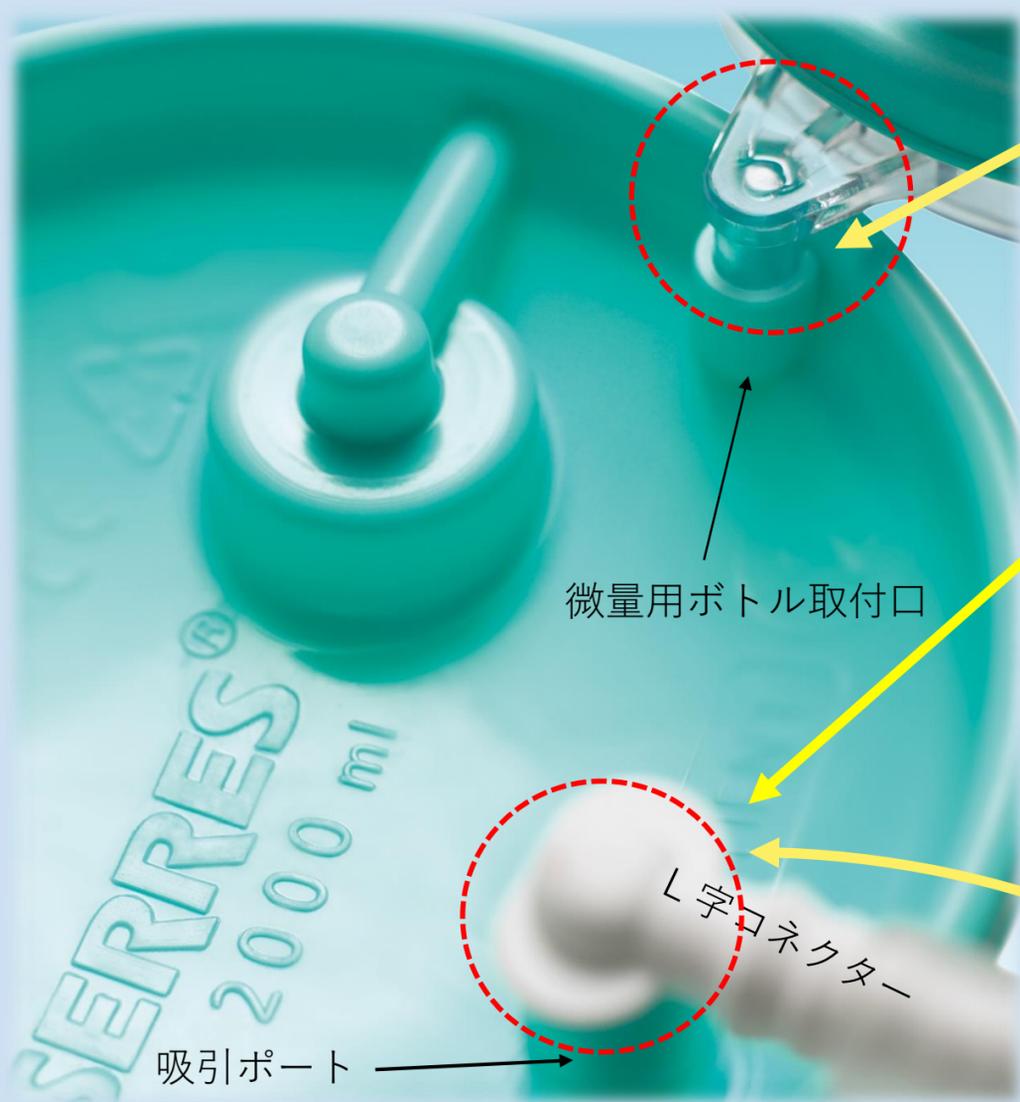


微量用ボトル取付口

L字コネクター

吸引ポート

・複数キャニスタ連結用オプション  
【連結チューブ・吸引バッグ  
連結チューブ 青コネ付】

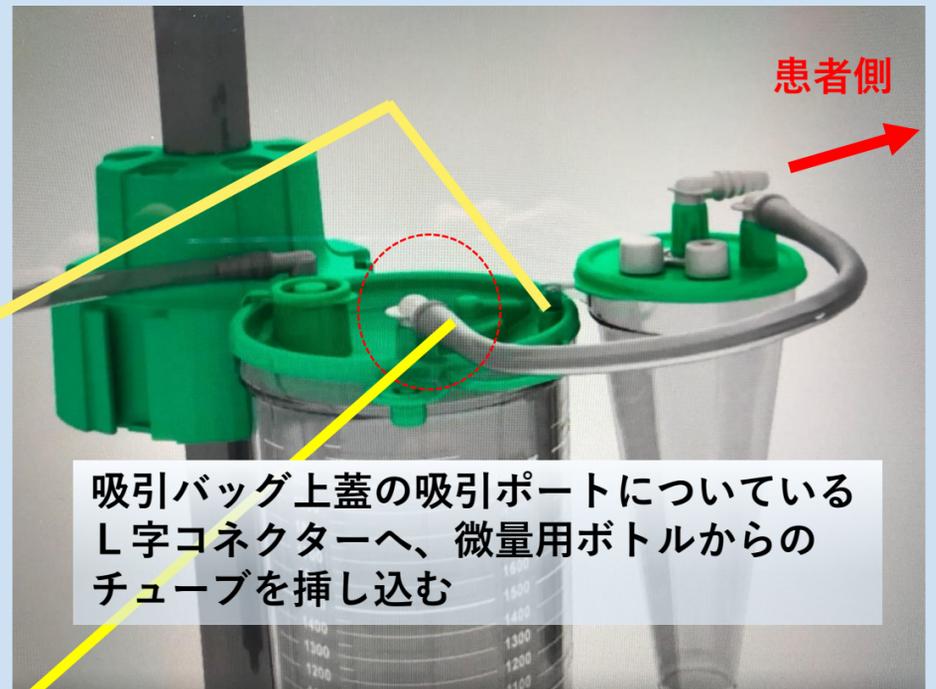

患者側

吸引バッグ上蓋の吸引ポートについているL字コネクターへ、微量用ボトルからのチューブを挿し込む

【微量用ボトル】

※ 詳しい手順の説明動画もご用意しております。



患者側

ポート

吸引ポート  
へ挿し込む

付属キャップ  
(2個)

ポート

【病理標本採取用カップ】

## ●病理標本採取用カップ

吸引バッグには「吸引ポート」へ予めL字コネクターが装填されていますので、これを外して下さい。解放された「吸引ポート」に病理標本採取用カップを取り付けることで、病理標本をカップ内に集積させることが出来ます。最大容量は300mlです。

採取した標本を取り出す際は、吸引バッグから慎重に病理標本採取用カップを外し、解放された2つのポートに付属キャップを取り付け破棄してください。（この際、廃液が零れないよう注意して下さい。）感染予防の観点から、病理標本採取用カップはディスポーザブル仕様となっています。

商品コード	規格・型式	入り数
0151003201	微量用ボトル・400mL	12個/箱
0151003101	病理標本採取用カップ・300mL	18個/箱
0151002101	連結チューブ・吸引バッグ連結チューブ 青コネ付	25個/袋

ご不明な点につきましては、貴院担当営業、最寄りの支店・営業所または商品企画(03-3812-3254)までご連絡ください。