

メラ唾液持続吸引チューブ

- 自力で唾液を飲み込めない患者様の口腔内に、持続的に留置する唾液吸引用チューブです。
- 唾液の落ち込みによる肺合併症を予防し、（気管切開患者の場合）気管切開孔からの唾液の漏れを減少させます。また口腔外に流出する唾液の流涎管理等、看護者の負担を減少させます。
- 患者様や唾液の状態によって選択可能な4タイプを用意しました。
- 先端吸引部のスネイル（うず巻き）加工は口腔内での留置に優れ、通常の吸引チューブと比較して舌による口腔外への押し出しを減らし、効果的に吸引します。
- 芯線有タイプには屈曲自在なステンレス製芯線（ワイヤー）が内蔵されています。口元で適切な形状に型取りテープで固定することにより安定した持続吸引を可能にします。
- 芯線無タイプは多量の唾液吸引に適しています。



メラ唾液持続吸引チューブ


■製品仕様

- SPタイプ(標準):小児や口腔が小さな方
- MPタイプ(太):大人や唾液の分泌量が多い方
- 芯線有タイプ:芯線によりチューブ形状を保持できるので口腔内に留置しやすくなります。
- 芯線無タイプ:吸引効率が高く、唾液の分泌量が多い患者様に適しています。

※患者様に嘔み癖がある場合、チューブが破断し飛び出した芯線が口腔内を傷付ける恐れがありますので芯線無タイプをご使用ください。

コード番号	JANコード	型式	チューブ寸法			接続口内径 (mm)	芯線の有無	テープ色	包装単位
			内径(mm)	外径(mm)	全長(mm)				
0158005101	4806019603722	SP-1(標準・芯線有)	φ1.9	φ3.0	1180	φ7	有	白	10本/箱
0158005201	4806019603739	SP-2(標準・芯線無)	φ1.9	φ3.0	1180	φ7	無	黄	10本/箱
0158005301	4806019603746	MP-1(太・芯線有)	φ2.5	φ3.9	1180	φ7	有	青	10本/箱
0158005401	4806019603753	MP-2(太・芯線無)	φ2.5	φ3.9	1180	φ7	無	緑	10本/箱



吸引流量グラフ

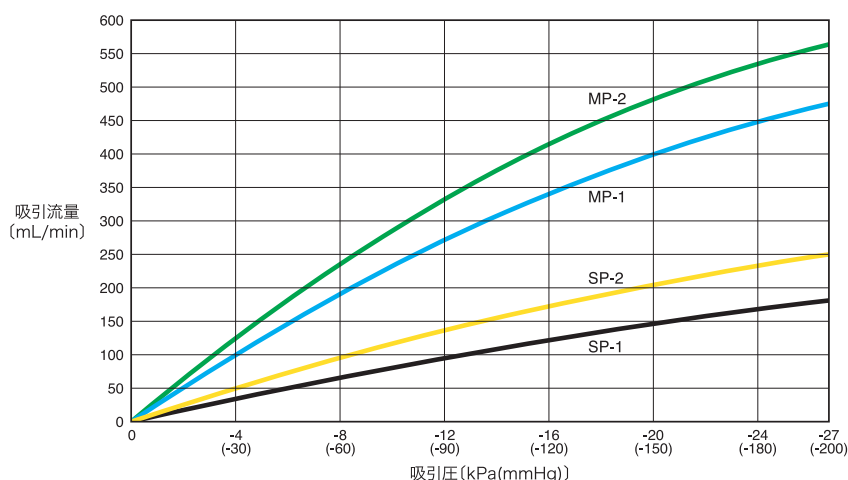

※社内実験データ:記載データは一定の条件の下で得られたものであり、保証値ではありません。目安としてご参照下さい。

■使用方法

- ①先端の接続管(内径:7mm)に吸引器を接続する。
- ②先端のうず巻きを舌上等に留置する。
- ③チューブと頬等をテープ等で固定する。
- ④吸引器の設定圧を-27kPa以下に設定して唾液吸引を開始する。

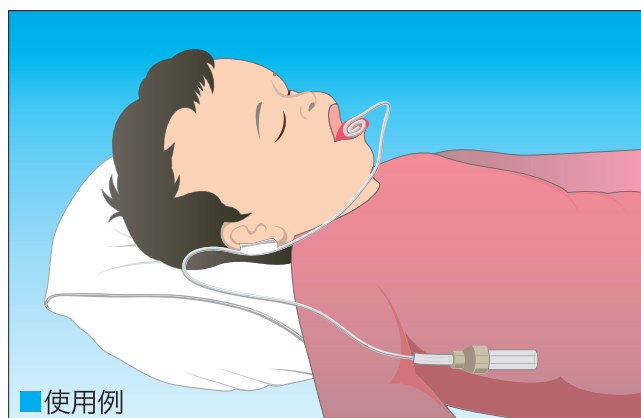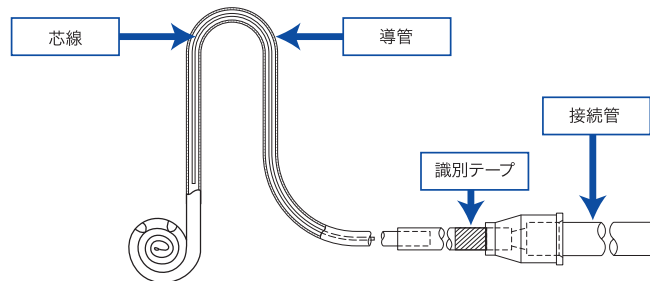

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

製造業者

MERASENKO CORPORATION メラセンコー コーポレーション(国名:フィリピン)



実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読み
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●承認番号:15900BZZ01123000 ●クラス分類:Ⅱ ●2021/12月/1000 ●不許複製 ●B-125 ●F-1 ●BO-0075-04
www.mera.co.jp/