



[鋼製小物]

● Surgical Instruments



## はじめに

手術器械器具（鋼製小物）は、ほとんどがステンレス鋼を材料として製造されています。ステンレス鋼（Stainless steel）は、鉄（Fe）を主成分（50%以上）とし、クロム（Cr）を10.5%以上含む、「錆びにくい（錆びに強い）合金」です。含有するクロムが空気中の酸素と結合し表面に不動態被膜（金属表面に腐食作用に抵抗する酸化被膜が生じた状態）を形成するため、錆びにくいといわれております。

しかしながら耐食性の強いステンレス鋼でも取り扱いを間違えると、ステンレス鋼といえど腐食（錆び）は発生し、製品の寿命を縮めてしまいます。

当社では鋼製小物製品を末長くご利用を頂くために、お客様各位に必要な鋼製小物の取扱いについての注意事項を記載しておりますので、ご参照いただければ幸いです。

## メラ鋼製小物の取り扱いについて

鋼製小物は、それぞれ特定な用途に適したデザインと機能をもってつくられています。用途に合わない不適切な使用は、その目的を達成しないばかりか、器材の機能低下や破損につながる為器材を正しく使用することは、その機能を長持ちさせることにもなります。

### 【使用上の注意】

#### 1) 鉗子

止血鉗子は、血管を把持するためのものです。頻繁に使用されるため、最も乱用・誤用されやすい器材です。

スポンジ鉗子、チューブ鉗子、持針器及び鑷子の代用として使用することは避けてください。不適切な用途に使用することにより、ボックスロック部にヒビ、クラックが入る恐れがあります。

#### 2) 剪刀

剪刀は特別な注意が必要です。適さない用途で使用すると刃がかける恐れがあります。

#### 3) 持針器

持針器は、かなりの圧力に耐えることができますが、誤った使用をすると把持力を弱める原因となります。常に針のサイズに合った持針器を選んでください。サイズに合わない太い針を微細な血管用持針器で把持すると、ひずみが生じ、ボックスロック部分にヒビ、クラックが入る恐れがあります。

#### 4) マイクロ機器は、緻密な機能が要求されるため、正しく機能することは非常に重要なことです。

不適切な使用や乱用、乱暴な取り扱いによって傷つけやすいため、器械が互いに接触しないように常に注意し、専用ケース等を使用して器械を保護する必要があります。

### 〈新品器材の取り扱いの注意事項〉

#### 1. 防錆油の除去

新品器材にはサビを防ぐために、多くの場合、表面の電解研磨後に防錆油が塗布されています。新品器材は、防食効果の元となる不動態皮膜の形成が不十分なために、器材の表面を保護する必要があるためです。新品器材を実際に使用するにあたり、この付着した油を十分に洗浄除去してから滅菌処理をしてください。防錆油が付着した状態でオートクレーブ滅菌処理を行うと、使用されている防錆油にもよりますが、固着されて黒色あるいは茶色に変色したり、斑模様の原因となるだけでなく、完全な滅菌効果の妨げる恐れがあるため、新品の器材を購入した際には完全な防錆油の除去必要となります。

## 2. 新品器材の処理方法

通常の超音波洗浄やウォッシャー・ディスインフェクターによる洗浄の前に、必ず防錆油除去の為の浸漬洗浄を行ってください。以下に奨励方法を記載します。

- ①アルカリ性浸漬洗浄剤を 60～80℃のお湯で 10 倍程度に希釈します。
- ②30 分～1 時間浸漬する。
- ③超音波洗浄機で洗浄・濯ぎを行う。
- ④濯ぎ後は、エアガンや不織布を使用して十分に水切りします。
- ⑤滅菌バッグに封入し、オートクレーブ処理します。
- ⑥乾燥機で 30 分間以上乾燥する。

乾燥は、出来るだけ長時間施したほうが、不動態皮膜形成がされ、耐腐食性が高まります。初回乾燥時は、サビが出ないように、エアガンや不織布などを使用して、効率的な乾燥を心掛ける必要があります。熱処理を繰り返すうちに、不動態皮膜が強固に形成され、サビにくくなります。

### 〈使用する際の注意事項〉

#### 1. 血液・化学薬品・溶液に対する注意

ステンレススチール製手術器械を、絶対に生理食塩水に浸さないでください。  
長時間血液や生理食塩水にさらすと腐食が生じる原因となります。  
術中に付着した血液・体液は、直ちに純水にて拭き取るか洗い流してください。

次の溶液は腐食や孔食を起こしやすいので注意してください。

- ・塩化バリウム・塩化カルシウム・塩化第二水銀・生理食塩水・過マンガン酸カリウム
- ・チオシアン酸カリウム・次亜塩素酸ナトリウム・血液等

### 〈保管方法に関する注意事項〉

- ①ラチェットのある器械はラチェットをかけずに開いた状態にしてください。  
保管時にラチェットを深くかければかけるほど器械にかかる負担も増し、ラチェット部の寿命を早め破損などの原因となります。
- ②剪刀類は刃先を保護し、刃先が他の器械と触れないよう注意してください。
- ③ステンレススチールとアルミニウムのような異種金属の手術器械は、別にセットしてください。  
異種金属同士の電解沈着を防止するためです。
- ④高温・多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

### 〈保守・点検に関する注意事項〉

#### 1. 動作機能のチェックの実施

日常点検及び使用前点検により正常に作動することを確認してください。

#### 2. 潤滑剤の塗布

可動部の動きをスムーズにするため、水溶性潤滑剤を塗布することをお勧め致します。

## 〈洗浄に関する注意事項〉

### 1. 使用後は直ちに予備洗浄をしてください。

術中使用しなかった器械でも血液や生理食塩水などが付着した恐れがあるものは必ず洗浄してください。

### 2. 浸漬洗浄をしてください。

血液や汚れが乾いて器械の表面にこびりついてしまった器械は、酵素系洗剤などを希釈した血液溶解洗浄液に浸漬し細部に付着した蛋白質系の汚れを除去してから、一般の機械洗浄を行ってください。磨き粉や金属タワシで器械の表面を磨かないでください。表面に擦過傷を生じ、腐食の原因となります。

### 3. ボックスロック部を開いてください。

手術後は直ちにボックスロックやネジ止めの器械は開き、分解できるものは分解して洗浄してください。閉じたままの洗浄は、血液や汚れがボックスロックや溝に付着したままで、洗浄不良を起こす可能性が高く、また腐食の原因となります。

### 4. マイクロ器械は手で洗浄してください。

マイクロ器械や眼科用などの微細で鋭利な手術器械は、特に注意を払い、洗浄は手で行ってください。超音波洗浄機を使用すると微細な刃などを痛める可能性があるため、避けてください。また、ウォッシャーディスインフェクタにて洗浄する際には、専用の固定器具などを使用し、器材が接触・移動しないようにしてください。

### 5. 材質の異なる器材は分けてください。

材質の異なる異種金属の器械同士は電解沈着を防止するため別々に洗浄してください。

### 6. 中性洗剤を使用してください。

強アルカリ・強酸性の洗剤、消毒剤は使用しないでください。

洗浄剤は pH6～8 の中性洗剤を使用してください。

### 7. 汚れ、洗剤、消毒剤は水洗いで完全に洗い落としてください。

### 8. 洗浄に使用する水は蒸留水・脱イオン水を使用してください。

一般の水道水に含まれる残留塩素や有機物質（硬質成分）が器械表面のしみやサビ発生の原因となります。

### 9. 洗浄後は直ちに乾燥させてください。

洗浄後の器材は直ちに乾燥し、湿った状態で長時間放置しないでください。

器械表面のシミの沈着、サビ、腐食発生の原因となります。

### 10. 乾燥後は可動部の動きをスムーズにするため、水溶性潤滑剤を塗布することをお勧め致します。

### 11. 滅菌を行う場合は乾燥状態を確認の上、行ってください。乾燥していないと滅菌不良が発生する可能性があります。

滅菌はオートクレーブ滅菌を行ってください。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、ラチェット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるように配慮してください。

# index

商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0451825800	メラ 剪刀 MSC - CC18 心臓血管外科用剪刀	スーパーカット 曲 18cm	11B1X00016000261	I	1
0451825900	メラ 剪刀 MSC - CC20 心臓血管外科用剪刀	スーパーカット 曲 20cm	11B1X00016000261	I	1
0451826000	メラ 剪刀 MSC - CC23 心臓血管外科用剪刀	スーパーカット 曲 23cm	11B1X00016000261	I	1
0458006100	TPG - 01 プロテクションカバー 白	—	非該当品	—	1
0458006200	TPG - 02 プロテクションカバー 青	—	非該当品	—	1
0458006300	TPG - 03 プロテクションカバー 緑	—	非該当品	—	1
0458006400	TPG - 04 プロテクションカバー 赤	—	非該当品	—	1
0458006500	TPG - 05 プロテクションカバー 黄	—	非該当品	—	1
0458006600	TPG - 06 プロテクションカバー オレンジ	—	非該当品	—	1
0458006700	TPG - 07 プロテクションカバー 緑	—	非該当品	—	1
0451806300	メラ 剪刀 MSC - SC14 外科用剪刀	曲 14cm	11B1X00016000261	I	2
0451806400	メラ 剪刀 MSC - PC12 形成外科用剪刀	曲 12cm	11B1X00016000261	I	2
0451806500	メラ 剪刀 MSC - PC13 形成外科用剪刀	曲 13cm	11B1X00016000261	I	2
0451806600	メラ 剪刀 MSC - CC115 眼科用剪刀	曲 11.5cm	11B1X00016000261	I	2
0451821400	メラ 剪刀 MSC - MC18 メッツェンバーム剪刀	曲 18cm	11B1X00016000261	I	2
0451821500	メラ 剪刀 MSC - MC20 メッツェンバーム剪刀	曲 18cm	11B1X00016000261	I	2
0451821600	メラ 剪刀 MSC - MC23 メッツェンバーム剪刀	曲 18cm	11B1X00016000261	I	2
0451805100	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 145mm	11B1X00016000035	I	3
0451804900	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 160mm	11B1X00016000035	I	3
0451804700	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 185mm	11B1X00016000035	I	3
0451805000	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 145mm	11B1X00016000035	I	3
0451804800	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 160mm	11B1X00016000035	I	3
0451804600	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 185mm	11B1X00016000035	I	3
0451804400	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 200mm	11B1X00016000035	I	3
0451804200	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 220mm	11B1X00016000035	I	3
0451804000	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 230mm	11B1X00016000035	I	3
0451810100	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 140mm	11B1X00016000034	I	3
0451810300	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 160mm	11B1X00016000034	I	3
0451810500	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 185mm	11B1X00016000034	I	3
0451810700	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 200mm	11B1X00016000034	I	3
0451810000	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 140mm	11B1X00016000034	I	3
0451810200	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 160mm	11B1X00016000034	I	3
0451810400	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 185mm	11B1X00016000034	I	3
0451810600	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 200mm	11B1X00016000034	I	3
0451820000	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	直 145mm	11B1X00016000036	I	4
0451820100	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 145mm	11B1X00016000036	I	4
0451820300	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 160mm	11B1X00016000036	I	4
0451820500	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 185mm	11B1X00016000036	I	4
0451820700	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 195mm	11B1X00016000036	I	4
0451820900	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 210mm	11B1X00016000036	I	4
0451821100	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 230mm	11B1X00016000036	I	4
0451825000	メラ 血管剪刀 ネジ止	直 115mm	11B1X00016000031	I	5
0451825200	メラ 血管剪刀 ネジ止	直 160mm	11B1X00016000031	I	5
0451825100	メラ 血管剪刀 ネジ止	反 115mm	11B1X00016000031	I	5
0451825300	メラ 血管剪刀 ネジ止	反 160mm	11B1X00016000031	I	5
0451840000	メラ 抜糸剪刀	直 135mm	11B1X00016000040	I	5

# index

商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0451840100	メラ 抜糸剪刀	反 135mm	11B1X00016000040	I	5
0450042800	メラ 鉗子 MSO - SN12 モスキート鉗子	直 無鉤 12cm	11B1X00016000259	I	6
0450043100	メラ 鉗子 MSO - CN12 モスキート鉗子	反 無鉤 12cm	11B1X00016000259	I	6
0450043000	メラ 鉗子 MSO - CH12 モスキート鉗子	反 有鉤 12cm	11B1X00016000259	I	6
0450043200	メラ 鉗子 MSO - SN125A モスキート鉗子	直 無鉤 アヤ筋 12.5cm	11B1X00016000259	I	6
0450043300	メラ 鉗子 MSO - CN125A モスキート鉗子	反 無鉤 アヤ筋 12.5cm	11B1X00016000259	I	6
0450043600	メラ 鉗子 MMS - CN125 モスキート鉗子 微血管用	反 無鉤 12.5cm	11B1X00016000259	I	6
0450043700	メラ 鉗子 MNS - SN145 モスキート鉗子	直 無鉤 14.5cm	11B1X00016000259	I	7
0450043800	メラ 鉗子 MNS - CN145 モスキート鉗子	反 無鉤 14.5cm	11B1X00016000259	I	7
0450042900	メラ 鉗子 MSO - SN17 モスキート鉗子	直 無鉤 17cm	11B1X00016000259	I	7
0450043400	メラ 鉗子 MSO - SN117 モスキート鉗子	弱弯 無鉤 17cm	11B1X00016000259	I	7
0450043500	メラ 鉗子 MSO - SN217 モスキート鉗子	強弯 無鉤 17cm	11B1X00016000259	I	7
0450040000	メラ モスキート鉗子 BOX	直 無鉤 110mm	11B1X00016000155	I	8
0450040100	メラ モスキート鉗子 BOX	直 無鉤 125mm	11B1X00016000155	I	8
0450040300	メラ モスキート鉗子 BOX	反 無鉤 110mm	11B1X00016000155	I	8
0450040400	メラ モスキート鉗子 BOX	反 無鉤 125mm	11B1X00016000155	I	8
0450050000	メラ モスキート鉗子 BOX	直 有鉤 110mm	11B1X00016000155	I	8
0450050100	メラ モスキート鉗子 BOX	直 有鉤 125mm	11B1X00016000155	I	8
0450050300	メラ モスキート鉗子 BOX	反 有鉤 110mm	11B1X00016000155	I	8
0450050400	メラ モスキート鉗子 BOX	反 有鉤 125cm	11B1X00016000155	I	8
0450000100	メラ ペアン止血鉗子 BOX	直 無鉤 145cm	11B1X00016000151	I	9
0450000200	メラ ペアン止血鉗子 BOX	直 無鉤 160cm	11B1X00016000151	I	9
0450000300	メラ ペアン止血鉗子 BOX	直 無鉤 185cm	11B1X00016000151	I	9
0450000400	メラ ペアン止血鉗子 BOX	反 無鉤 145cm	11B1X00016000151	I	9
0450000500	メラ ペアン止血鉗子 BOX	反 無鉤 160cm	11B1X00016000151	I	9
0450000600	メラ ペアン止血鉗子 BOX	反 無鉤 185cm	11B1X00016000151	I	9
0450200200	メラ ケリー鉗子 BOX	中弯 195mm	11B1X00016000124	I	10
0450200300	メラ ケリー鉗子 BOX	弱弯 200mm	11B1X00016000124	I	10
0450200500	メラ ケリー鉗子 BOX	中弯 215mm	11B1X00016000124	I	10
0450200600	メラ ケリー鉗子 BOX	弱弯 220mm	11B1X00016000124	I	10
0450200800	メラ ケリー鉗子 BOX	中弯 235mm	11B1X00016000124	I	10
0450200900	メラ ケリー鉗子 BOX	弱弯 240mm	11B1X00016000124	I	10
0450201100	メラ ケリー鉗子 BOX	中弯 245mm	11B1X00016000124	I	10
0450201200	メラ ケリー鉗子 BOX	弱弯 250mm	11B1X00016000124	I	10
0450210000	メラ ツッベル鉗子 No 1 榊原式	250mm ヨコスジ	11B1X00016000150	I	11
0450210100	メラ ツッベル鉗子 No 2	230mm タテスジ	11B1X00016000150	I	11
0450210200	メラ ツッベル鉗子 No 3 榊原式	230mm ヨコスジ	11B1X00016000150	I	11
0450210300	メラ ツッベル鉗子 No 4 金沢式	230mm	11B1X00016000150	I	11
0450210400	メラ ツッベル鉗子 No 6 抗研式	200mm ヨコスジ 幅 13mm	11B1X00016000150	I	11
0450210500	メラ ツッベル鉗子 No 7 榊原式	200mm ヨコスジ 幅 15mm	11B1X00016000150	I	11
0450210600	メラ ツッベル鉗子 No 8	200mm ヨコスジ 幅 20mm 強弯	11B1X00016000150	I	11
0450210700	メラ ツッベル鉗子 No 9	180mm ヨコスジ	11B1X00016000150	I	11
0450210800	メラ ツッベル鉗子 No 10	170mm ヨコスジ	11B1X00016000150	I	11
0450210900	メラ ツッベル鉗子 No 11	165mm タテスジ	11B1X00016000150	I	11
0450212000	メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子	強弯 225mm	11B1X00016000149	I	12
0450212200	メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子	中弯 225mm	11B1X00016000149	I	12

# index

商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0450212100	メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子	弱弯 225mm	11B1X00016000149	I	12
0450213100	メラ 抗研式肺門剥離鉗子	200mm	11B1X00016000121	I	12
0450400200	メラ 抗研式アリス鉗子	大 200mm	11B1X00016000118	I	13
0450400100	メラ 抗研式アリス鉗子	小 200mm	11B1X00016000118	I	13
0450401100	メラ 榊原改良アリス鉗子	A 大 200mm	11B1X00016000094	I	13
0450401000	メラ 榊原改良アリス鉗子	B 小 150mm	11B1X00016000094	I	13
0450404000	メラ 榊原改良ドパール鉗子	211mm	11B1X00016000139	I	13
0450403000	メラ 鈴木改良オーバーホルト肺把持鉗子	210mm	11B1X00016000117	I	13
0450600100	メラ ホブキンス血管鉗子 ポブキンス	No.1 47mm	11B1X00016000100	I	14
0450600200	メラ ホブキンス血管鉗子 ポブキンス	No.2 46mm	11B1X00016000100	I	14
0450602100	メラ ブルドック血管鉗子	直 大 70mm	11B1X00016000146	I	14
0450602000	メラ ブルドック血管鉗子	直 小 55mm	11B1X00016000146	I	14
0450602300	メラ ブルドック血管鉗子	反 大 65mm	11B1X00016000146	I	14
0450602200	メラ ブルドック血管鉗子	反 小 50mm	11B1X00016000146	I	14
0450607200	メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX 型	A 220mm	11B1X00016000098	I	15
0450607100	メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX 型	B 200mm	11B1X00016000098	I	15
0450607000	メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX 型	C 175mm	11B1X00016000098	I	15
0450607500	メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子	A 215mm	11B1X00016000097	I	15
0450607400	メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子	B 185mm	11B1X00016000097	I	15
0450607300	メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子	C 180mm	11B1X00016000097	I	15
0450612500	メラ 強彎曲鉗子 (大血管剥離)	185mm	11B1X00016000093	I	16
0450214000	メラ 新田式強彎曲剥離鉗子	大 225mm 先端 55mm	11B1X00016000122	I	16
0450214100	メラ 新田式強彎曲剥離鉗子	小 225mm 先端 40mm	11B1X00016000122	I	16
045-800100	メラ ドアイアン腸鉗子	直 240mm	11B1X00016000148	I	17
0450800200	メラ ドアイアン腸鉗子	反 235mm	11B1X00016000148	I	17
0450802100	メラ ミクリッチ腹膜鉗子	BOX 大 212mm	11B1X00016000129	I	18
0450802000	メラ ミクリッチ腹膜鉗子	BOX 小 158mm	11B1X00016000129	I	18
0450802200	メラ ミクリッチ腹膜鉗子	ハズシ 200mm	11B1X00016000129	I	18
0450804500	メラ 中山式ガッチリ鉗子	183mm	11B1X00016000112	I	18
0451005600	メラ 二連関節丸のみ鉗子	大 幅 10mm 230mm	11B1X00016000133	I	19
0451005500	メラ 二連関節丸のみ鉗子	中 幅 8mm 230mm	11B1X00016000133	I	19
0451005400	メラ 二連関節丸のみ鉗子	小 幅 6mm 230mm	11B1X00016000133	I	19
0452604000	メラ 骨やすり 平形	住田式 205mm	11B1X00016000189	I	19
0452602100	メラ ホルクマン氏両頭鋭匙	No.00 ~ 0 160mm	11B1X00016000059	I	19
0452602200	メラ ホルクマン氏両頭鋭匙	No.1 ~ 2 162mm	11B1X00016000059	I	19
0452602400	メラ ホルクマン氏両頭鋭匙	No.3 ~ 4 164mm	11B1X00016000059	I	19
0451204000	メラ チューブ鉗子	MT - 15 チューブ鉗子 15cm	11B1X00016000260	I	20
0451204100	メラ チューブ鉗子	MT - 18 チューブ鉗子 18cm	11B1X00016000260	I	20
0451204200	メラ チューブ鉗子	MT - 20 チューブ鉗子 20cm	11B1X00016000260	I	20
0451205100	メラ タオル鉗子 BOX	大 130mm	11B1X00016000088	I	21
0451205000	メラ タオル鉗子 BOX	小 100mm	11B1X00016000088	I	21
0451205500	メラ タオル鉗子 BOX	東北大式 大 130mm	11B1X00016000088	I	21
0451205500	メラ タオル鉗子 BOX	東北大式 小 100mm	11B1X00016000088	I	21
0451205600	メラ 鉗子	MT0 - W135 ウィック式タオル鉗子 K62 - 大 13.5cm	11B1X00016000259	I	21
0451208700	メラ 麦粒鉗子	反 360mm	11B1X00016000156	I	22
0451208500	メラ 麦粒鉗子	反 300mm	11B1X00016000156	I	22



# index

商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0451208300	メラ 麦粒鉗子	反 270mm	11B1X00016000156	I	22
0451208100	メラ 麦粒鉗子	反 240mm	11B1X00016000156	I	22
0451212000	メラ ワイヤー鉗子	130mm	11B1X00016000137	I	22
0451211000	メラ チューブ用ローラー鉗子	180mm	11B1X00016000105	I	22
0451401000	メラ マッチユウ持針器	A型 160mm	11B1X00016000019	I	23
0451401100	メラ マッチユウ持針器	A型 180mm	11B1X00016000019	I	23
0451401200	メラ マッチユウ持針器	A型 190mm	11B1X00016000019	I	23
0451401300	メラ マッチユウ持針器	A型 210mm	11B1X00016000019	I	23
0451406000	メラ リヒテル持針器	200mm	11B1X00016000017	I	23
0451400300	メラ 中山式持針器	大 205mm	11B1X00016000018	I	23
0451400200	メラ 中山式持針器	中 188mm	11B1X00016000018	I	23
0451400100	メラ 中山式持針器	小 158mm	11B1X00016000018	I	23
0451600100	メラ 外科鑷子	無鉤 130mm	11B1X00016000052	I	24
0451600300	メラ 外科鑷子	無鉤 150mm	11B1X00016000052	I	24
0451600500	メラ 外科鑷子	無鉤 180mm	11B1X00016000052	I	24
0451600700	メラ 外科鑷子	無鉤 230mm	11B1X00016000052	I	24
0451600200	メラ 外科鑷子	有鉤 130mm	11B1X00016000052	I	24
0451600400	メラ 外科鑷子	有鉤 150mm	11B1X00016000052	I	24
0451600600	メラ 外科鑷子	有鉤 180mm	11B1X00016000052	I	24
0451600800	メラ 外科鑷子	有鉤 230mm	11B1X00016000052	I	24
0451602000	メラ 先細鑷子	無鉤 110mm	11B1X00016000053	I	25
0451602200	メラ 先細鑷子	無鉤 130mm	11B1X00016000053	I	25
0451602400	メラ 先細鑷子	無鉤 150mm	11B1X00016000053	I	25
0451602600	メラ 先細鑷子	無鉤 160mm	11B1X00016000053	I	25
0451602800	メラ 先細鑷子	無鉤 180mm	11B1X00016000053	I	25
0451603000	メラ 先細鑷子	無鉤 200mm	11B1X00016000053	I	25
0451603200	メラ 先細鑷子	無鉤 230mm	11B1X00016000053	I	25
0451602100	メラ 先細鑷子	有鉤 110mm	11B1X00016000053	I	25
0451602300	メラ 先細鑷子	有鉤 130mm	11B1X00016000053	I	25
0451602500	メラ 先細鑷子	有鉤 150mm	11B1X00016000053	I	25
0451602700	メラ 先細鑷子	有鉤 160mm	11B1X00016000053	I	25
0451602900	メラ 先細鑷子	有鉤 180mm	11B1X00016000053	I	25
0451603100	メラ 先細鑷子	有鉤 200mm	11B1X00016000053	I	25
0451603300	メラ 先細鑷子	有鉤 230mm	11B1X00016000053	I	25
0451605100	メラ アドソン鑷子	無鉤 125mm	11B1X00016000054	I	26
0451605000	メラ アドソン鑷子	有鉤 125mm	11B1X00016000054	I	26
0451834000	メラ 抗研式肋骨剪刀	325mm	11B1X00016000027	I	27
0451834100	メラ 抗研式深部肋骨剪刀	285mm	11B1X00016000028	I	27
0451835000	メラ 抗研式コリロス第一肋骨剪刀	325mm	11B1X00016000029	I	27
0452000100	メラ 中山式開創器	外寸 250mm × 235mm	11B1X00016000201	I	28
0452000300	メラ 中山式開創器	肥満型 外寸 250mm × 235mm	11B1X00016000201	I	28
0452002000	メラ ゴッセ開創器	大 外寸 107mm × 125mm	11B1X00016000200	I	29
0452002100	メラ ゴッセ開創器	小 外寸 250mm × 185mm	11B1X00016000200	I	29
0452003000	メラ 東医大開創器	外寸 185mm × 240mm	11B1X00016000202	I	29
0452006300	メラ オーバーホルト開胸器	大 外寸 250mm × 175mm	11B1X00016000205	I	30
0452006200	メラ オーバーホルト開胸器	中 外寸 205mm × 140mm	11B1X00016000205	I	30

# index

商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0452006100	メラ オーバーホールト開胸器	小 外寸 155mm × 102mm	11B1X00016000205	I	30
0452006000	メラ オーバーホールト開胸器	極小 外寸 133mm × 77mm	11B1X00016000205	I	30
0452007300	メラ ト部式開胸器	大 外寸 250mm × 175mm	11B1X00016000209	I	30
0452007200	メラ ト部式開胸器	中 外寸 205mm × 140mm	11B1X00016000209	I	30
0452007100	メラ ト部式開胸器	小 外寸 155mm × 102mm	11B1X00016000209	I	30
0452007000	メラ ト部式開胸器	極小 外寸 133mm × 77mm	11B1X00016000209	I	30
0452008300	メラ 榊原式開胸器	大 外寸 250mm × 190mm	11B1X00016000206	I	31
0452008200	メラ 榊原式開胸器	中 外寸 235mm × 140mm	11B1X00016000206	I	31
0452008100	メラ 榊原式開胸器	小 外寸 155mm × 105mm	11B1X00016000206	I	31
0452008000	メラ 榊原式開胸器	極小 外寸 143mm × 85mm	11B1X00016000206	I	31
0452008500	メラ 改良モース開胸器	外寸 250mm × 220mm	11B1X00016000207	I	31
0452009500	メラ 改良モース開胸器 (鈴木式フリーアングル)	外寸 253mm × 273mm	11B1X00016000207	I	32
0452045200	メラ 開胸器	胸骨挙上器用開胸器	11B1X00016000009	I	32
0452045300	メラ 開胸器	胸骨挙上器 (大)	11B1X00016000009	I	32
0452045500	メラ 開胸器	胸骨挙上器 (小)	11B1X00016000009	I	32
0452012800	メラ MICS 用左房鉤	鏡視下用 30mm	11B1X00016000234	I	33
0452013000	メラ MICS 用左房鉤	直視下用 30mm	11B1X00016000234	I	33
0452013400	メラ MICS 用左房鉤	鏡視下深部用 30mm	11B1X00016000234	I	33
0452013500	メラ MICS 用左房鉤	直視下深部用 30mm	11B1X00016000234	I	33
0452013600	メラ MICS 用左房鉤	極小型左房鉤 20mm	11B1X00016000234	I	33
0452013700	メラ MICS 用左房鉤	極小切開用 / 扁平胸郭用 30mm	11B1X00016000234	I	33
0452004200	メラ 光野式改良開創器	A 型 185mm	11B1X00016000211	I	34
0452004100	メラ 光野式改良開創器	B 型 190mm	11B1X00016000211	I	34
0452004000	メラ 光野式改良開創器	C 型 175mm	11B1X00016000211	I	34
0452005000	メラ アドソン型開創器	330mm	11B1X00016000210	I	35
0452004500	メラ 光野式ヤンゼン開創器	100mm	11B1X00016000212	I	35
0452012100	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鉤	本体 65mm	11B1X00016000068	I	36
0452012200	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鉤	鉤 140mm	11B1X00016000068	I	36
0452012300	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鉤	ワイヤー	11B1X00016000068	I	36
0452012400	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鉤	S 金具	11B1X00016000068	I	36
0452012500	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鉤	棒 1000mm	11B1X00016000068	I	36
0452015000	メラ 扁平鉤	0	11B1X00016000069	I	37
0452015100	メラ 扁平鉤	1A	11B1X00016000069	I	37
0452015200	メラ 扁平鉤	2A	11B1X00016000069	I	37
0452015300	メラ 扁平鉤	2B	11B1X00016000069	I	37
0452015400	メラ 扁平鉤	3A	11B1X00016000069	I	37
0452015500	メラ 扁平鉤	3B	11B1X00016000069	I	37
0452015600	メラ 扁平鉤	3C	11B1X00016000069	I	37
0452015700	メラ 扁平鉤	4A	11B1X00016000069	I	37
0452015800	メラ 扁平鉤	4B	11B1X00016000069	I	37
0452029300	メラ 直角鉤	大	11B1X00016000070	I	37
0452029200	メラ 直角鉤	中	11B1X00016000070	I	37
0452029100	メラ 直角鉤	小	11B1X00016000070	I	37
0452023100	メラ 小直角鉤	A 175mm	11B1X00016000060	I	37
0452023000	メラ 小直角鉤	B 170mm	11B1X00016000060	I	37
0452017000	メラ 単爪鉤	鋭 210mm	11B1X00016000082	I	38

# index

商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0452017100	メラ 単爪鉤	鈍 210mm	11B1X00016000082	I	38
0452017200	メラ 二爪鉤	鋭 220mm	11B1X00016000083	I	38
0452017300	メラ 二爪鉤	鈍 220mm	11B1X00016000083	I	38
0452021000	メラ 単爪鉤	鋭 155mm	11B1X00016000082	I	38
0452022000	メラ 単爪鉤	鈍 155mm	11B1X00016000082	I	38
0452023000	メラ 二爪鉤	鋭 170mm	11B1X00016000083	I	38
0452024000	メラ 二爪鉤	鈍 170mm	11B1X00016000083	I	38
0452022000	メラ 小筋鉤兼中筋鉤	195mm	11B1X00016000074	I	39
0452024100	メラ 小心臓鉤 (ディスマール鉤)	4mm × 180mm	11B1X00016000061	I	39
0452024200	メラ 小心臓鉤 (ディスマール鉤)	6mm × 180mm	11B1X00016000061	I	39
0452024300	メラ 小心臓鉤 (ディスマール鉤)	8mm × 180mm	11B1X00016000061	I	39
0452024400	メラ 小心臓鉤 (ディスマール鉤)	10mm × 180mm	11B1X00016000061	I	39
0452024500	メラ 小心臓鉤 (ディスマール鉤)	12mm × 180mm	11B1X00016000061	I	39
0452024600	メラ 小心臓鉤 (ディスマール鉤)	15mm × 180mm	11B1X00016000061	I	39
0452027200	メラ フリッチ安状鉤	大 255mm	11B1X00016000071	I	40
0452027100	メラ フリッチ安状鉤	小 255mm	11B1X00016000071	I	40
0452028300	メラ レバーハーケン	大 210mm	11B1X00016000079	I	40
0452028200	メラ レバーハーケン	中 210mm	11B1X00016000079	I	40
0452028100	メラ レバーハーケン	小 210mm	11B1X00016000079	I	40
0452032100	メラ クーリー型心臓鉤	極小 No.0	11B1X00016000063	I	41
0452032200	メラ クーリー型心臓鉤	小 No.1	11B1X00016000063	I	41
0452032300	メラ クーリー型心臓鉤	中 No.2	11B1X00016000063	I	41
0452032400	メラ クーリー型心臓鉤	大 No.3	11B1X00016000063	I	41
0452033300	メラ 抗研式肺圧排鉤	大 295mm	11B1X00016000064	I	41
0452033200	メラ 抗研式肺圧排鉤	中 280mm	11B1X00016000064	I	41
0452033100	メラ 抗研式肺圧排鉤	小 235mm	11B1X00016000064	I	41
0452033800	メラ 抗研式肩胛骨鉤	大 95 × 27mm	11B1X00016000081	I	42
0452033700	メラ 抗研式肩胛骨鉤	小 93 × 23mm	11B1X00016000081	I	42
0452035500	メラ 脳ペラ	A 特大 180mm	11B1X00016000077	I	42
0452035400	メラ 脳ペラ	B 大 170mm	11B1X00016000077	I	42
0452035300	メラ 脳ペラ	C 中 160mm	11B1X00016000077	I	42
0452035200	メラ 脳ペラ	D 小 150mm	11B1X00016000077	I	42
0452035100	メラ 脳ペラ	E 極小 150mm	11B1X00016000077	I	42
0452036100	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 1 330mm	11B1X00016000076	I	42
0452036200	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 2 330mm	11B1X00016000076	I	42
0452036300	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 3 330mm	11B1X00016000076	I	42
0452036400	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 4 330mm	11B1X00016000076	I	42
0452036500	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 5 330mm	11B1X00016000076	I	42
0452036600	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 6 365mm	11B1X00016000076	I	42
0452036700	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 7 365mm	11B1X00016000076	I	42
0452036800	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 8 365mm	11B1X00016000076	I	42
0452036900	メラ 柔軟ペラ (腸ペラ)	No. 9 365mm	11B1X00016000076	I	42
0452034600	リングリトラクター	大 195mm	11B1X00016000078	I	43
0452034500	リングリトラクター	小 195mm	11B1X00016000078	I	43
0452034700	リングリトラクター	スパイク付 大	11B1X00016000078	I	43
0452034800	リングリトラクター	スパイク付 小	11B1X00016000078	I	43

# index


商品コード	商品名	規格	届出番号	クラス分類	ページ
0452034100	メラ リトラクター	殿筋レトラクター A 八の字 254mm	11B1X00016000102	I	43
0452034200	メラ リトラクター	殿筋レトラクター B 逆八の字 254mm	11B1X00016000102	I	43
0452040000	メラ リトラクター	ティビアルリトラクター S 全長 200mm	11B1X00016000102	I	43
0452028000	メラ リトラクター	PCL	11B1X00016000102	I	43
0452034300	メラ リトラクター	パテラ	11B1X00016000102	I	43
0452200100	メラ 抗研式ラスパトリウム	No. 1 175mm	11B1X00016000179	I	44
0452200200	メラ 抗研式ラスパトリウム	No. 2 222mm	11B1X00016000179	I	44
0452200300	メラ 抗研式ラスパトリウム	No. 3 235mm	11B1X00016000179	I	44
0452200400	メラ 抗研式ラスパトリウム	No. 4 235mm	11B1X00016000179	I	44
0452202000	メラ 岩原式両頭ラスパトリウム	205mm	11B1X00016000185	I	45
0452202100	メラ 飯野式両頭ラスパトリウム	200mm	11B1X00016000186	I	45
0452205000	メラ ラスバ兼エレバ	192mm	11B1X00016000182	I	45
0452204200	メラ 鈴木式両頭エレバ兼ラスバ	大 210mm	11B1X00016000181	I	46
0452204100	メラ 鈴木式両頭エレバ兼ラスバ	小 210mm	11B1X00016000181	I	46
0452204300	メラ 鈴木式両頭エレバ強弱	192mm	11B1X00016000184	I	46
0452206000	メラ 単爪兼エレバ	185mm	11B1X00016000075	I	46
0452201000	メラ 骨膜起子	A 型 200mm	11B1X00016000191	I	47
0452201100	メラ 骨膜起子	B 型 200mm	11B1X00016000191	I	47
0452201200	メラ 骨膜起子	C 型 200mm	11B1X00016000191	I	47
0452208100	メラ スパーテル (ラミネク用)	直 233mm	11B1X00016000172	I	47
0452208200	メラ スパーテル (ラミネク用)	曲 195mm	11B1X00016000172	I	47
0453444300	東北大式骨髄穿刺針	柄短 針長 31mm	11B1X00016000199	I	48
0453444600	東北大式骨髄穿刺針	柄短 針長 61mm	11B1X00016000199	I	48
0453444200	東北大式骨髄穿刺針	柄短 針長 91mm	11B1X00016000199	I	48
0453444500	東北大式骨髄穿刺針	柄長 針長 31mm	11B1X00016000199	I	48
0453444700	東北大式骨髄穿刺針	柄長 針長 61mm	11B1X00016000199	I	48
0453444400	東北大式骨髄穿刺針	柄長 針長 91mm	11B1X00016000199	I	48
0452403100	心腔内吸引管 C 型	ペンコ型 No.3	11B1X00016000168	I	49
0452403200	心腔内吸引管 C 型	ペンコ型 No.4	11B1X00016000168	I	49
0452403300	心腔内吸引管 C 型	ペンコ型 No.5	11B1X00016000168	I	49
0452403400	心腔内吸引管 C 型	ペンコ型 No.6	11B1X00016000168	I	49
0452403500	心腔内吸引管 C 型	ペンコ型 No.7	11B1X00016000168	I	49
0452401100	心腔内吸引管 A 型	330mm	11B1X00016000128	I	49
0452406400	メラ 吸引アダプター ドボン	径 3mm 16mm	11B1X00016000170	I	49
0452406500	メラ 吸引アダプター ドボン	径 4mm 24mm	11B1X00016000170	I	49
0452406600	メラ 吸引アダプター ドボン	径 5mm 28mm	11B1X00016000170	I	49
0452406300	メラ 吸引アダプター ドボン	径 6mm 30mm	11B1X00016000170	I	49
0452406200	メラ 吸引アダプター ドボン	径 7mm 37mm	11B1X00016000170	I	49
0452406100	メラ 吸引アダプター ドボン	径 8mm 43mm	11B1X00016000170	I	49
0458000100	メラ 胸骨用骨錐	250mm	11B1X00016000173	I	50
0458001100	メラ 心縫合糸保持器 ルメル氏	内針 長 全長 220mm	11B1X00016000183	I	50
0458001200	メラ 心縫合糸保持器 ルメル氏	内針 短 全長 190mm	11B1X00016000183	I	50
0458005000	メラ 鋼線スケール	全長 150mm	医療機器非該当	—	50
0458003500	メラ ナイロンハンマー	大 径 35mm × 235mm	11B1X00016000188	I	50
0458003600	メラ ナイロンハンマー	小 径 30mm × 230mm	11B1X00016000188	I	50

# 剪刀 (Scissors)

## メラ 剪刀

### ■ 心臓血管外科用剪刀 (Super Cut: スーパーカット)

鋭利なブレード形状により、スムーズな切開と剥離を可能にしています。  
滑りやすい組織に対しても安定した切開性能を提供いたします。

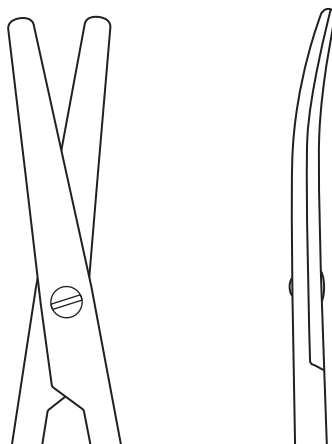

商品コード	販売名	規格/型式
0451825800	メラ 剪刀	MSC-CC18 心臓血管外科用剪刀 スーパーカット 曲 18cm
0451825900	メラ 剪刀	MSC-CC20 心臓血管外科用剪刀 スーパーカット 曲 20cm
0451826000	メラ 剪刀	MSC-CC23 心臓血管外科用剪刀 スーパーカット 曲 23cm

医療機器届出番号: 11B1X00016000261

# プロテクションカバー (Protection Cover)

薬事非該当品

## 穴あきタイプ

- 手術器具の先端を保護します。
- キャップをしたままオートクレーブ滅菌 (132°C) EOG滅菌可能です。



緑 オレンジ 黄 赤 緑 青 白

商品コード	型式	形状
0458006100	TPG-01	白 1.6mm×19mm
0458006200	TPG-02	青 2.0mm×19mm
0458006300	TPG-03	緑 2.8mm×19mm
0458996400	TPG-04	赤 3.2mm×25.4mm
0458006500	TPG-05	黄 4.8mm×25.4mm
0458006600	TPG-06	オレンジ 9.5mm×25.4mm
0458006700	TPG-07	緑 15.9mm×25.4mm

# 剪刀 (Scissors)

## メラ 剪刀



MSC-SC14



MSC-PC12  
MSC-PC13



MSC-OC115



商品コード	販売名	規格/型式
0451806300	メラ 剪刀	MSC-SC14 外科用剪刀 曲 14cm
0451806400	メラ 剪刀	MSC-PC12 形成外科用剪刀 曲 12cm
0451806500	メラ 剪刀	MSC-PC13 形成外科用剪刀 曲 13cm
0451806600	メラ 剪刀	MSC-OC115 眼科用剪刀 曲 11.5cm

医療機器届出番号: 11B1X00016000261

## メラ 剪刀 メッツエンバーム

繊細な組織の剥離や組織の切断

- シャープな切れ味
- 高い操作性

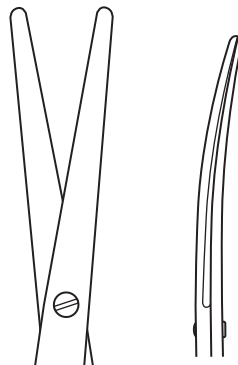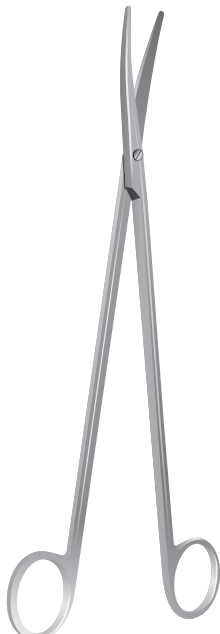

### ■ 切れ味テスト

医療用ガーゼ5枚重ね 10,000回テスト



綿100%

商品コード	販売名	規格/型式
0451821400	メラ 剪刀	MSC-MC18 メッツエンバーム剪刀 曲 18cm
0451821500	メラ 剪刀	MSC-MC20 メッツエンバーム剪刀 曲 20cm
0451821600	メラ 剪刀	MSC-MC23 メッツエンバーム剪刀 曲 23cm

医療機器届出番号: 11B1X00016000261

メラ 外科剪刀 ネジ止



商品コード	販売名	規格/型式
0451805100	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 145mm
0451804900	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 160mm
0451804700	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 185mm
0451805000	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 145mm
0451804800	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 160mm
0451804600	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 185mm
0451804400	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 200mm
0451804200	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 220mm
0451804000	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 230mm

医療機器届出番号:11B1X0001600035

メラ メーヨ剪刀 ネジ止 反/直




商品コード	販売名	規格/型式
0451810100	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 140mm
0451810300	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 160mm
0451810500	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 185mm
0451810700	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 200mm

商品コード	販売名	規格/型式
0451810000	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 140mm
0451810200	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 160mm
0451810400	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 185mm
0451810600	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 200mm

医療機器届出番号:11B1X0001600034

# 剪刀 (Scissors)


メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止 直

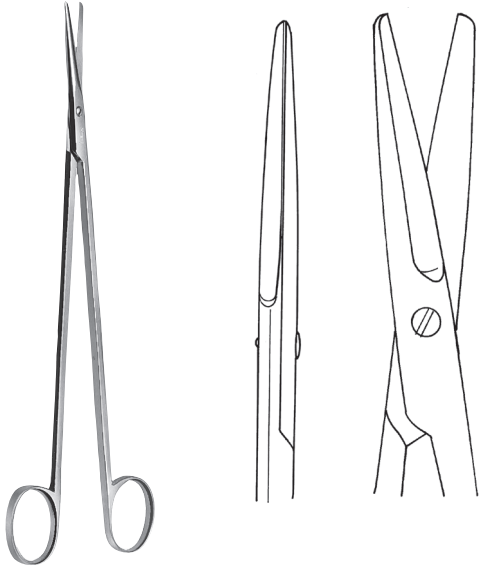

商品コード	販売名	規格/型式
0451820000	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	直 145mm

医療機器届出番号:11B1X00016000036

メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止 反

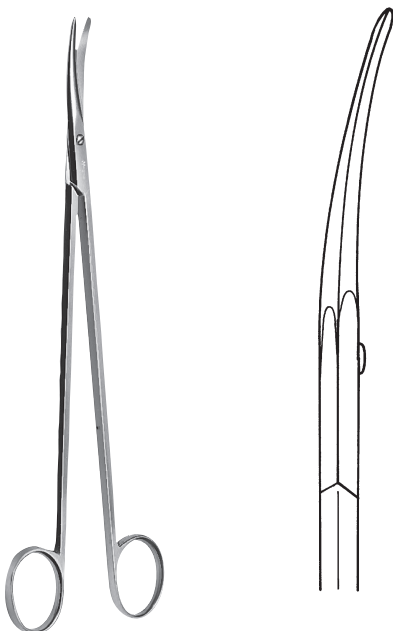


商品コード	販売名	規格/型式
0451820100	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 145mm
0451820300	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 160mm
0451820500	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 185mm
0451820700	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 195mm
0451820900	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 210mm
0451821100	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 230mm

医療機器届出番号:11B1X00016000036



メラ 血管剪刀 ネジ止 直/反

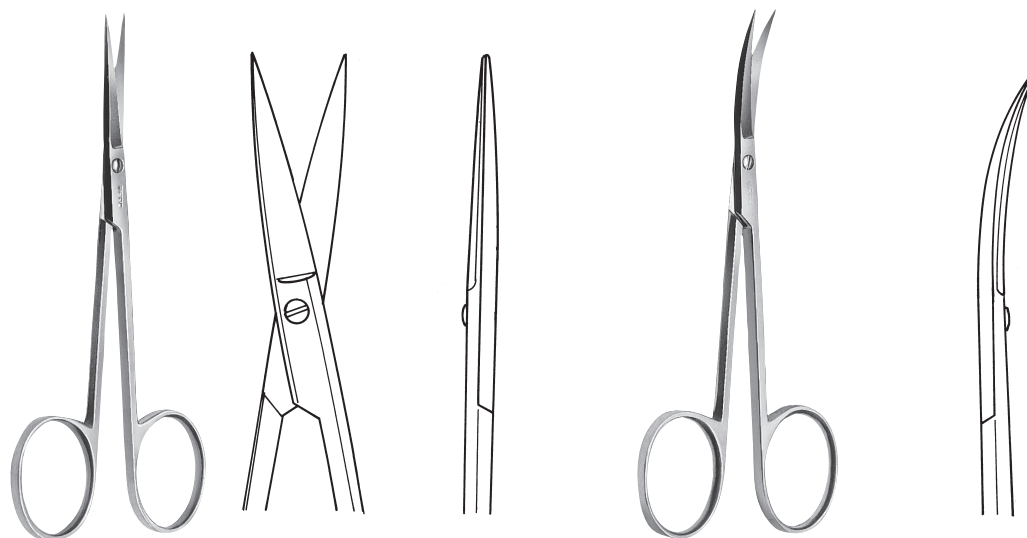

商品コード	販売名	規格/型式
0451825000	メラ 血管剪刀 ネジ止	直 115mm
0451825200	メラ 血管剪刀 ネジ止	直 160mm

商品コード	販売名	規格/型式
0451825100	メラ 血管剪刀 ネジ止	反 115mm
0451825300	メラ 血管剪刀 ネジ止	反 160mm

医療機器届出番号:11B1X0001600031

メラ 抜糸剪刀




商品コード	販売名	規格/型式
0451840000	メラ 抜糸剪刀	直 135mm
0451840100	メラ 抜糸剪刀	反 135mm

医療機器届出番号:11B1X00016000040

# モスキート鉗子(Mosquito Clamp)


## メラ 鉗子

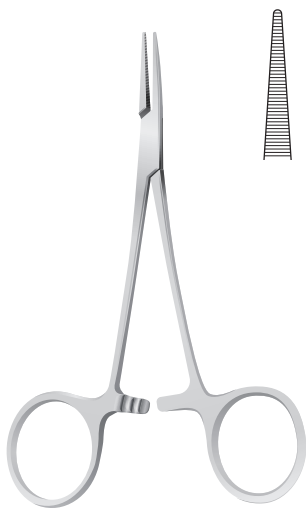

MSO-SN12



MSO-CN12

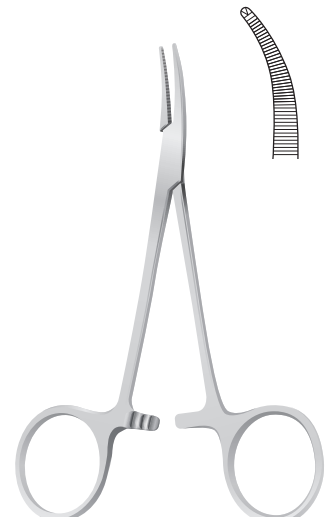

MSO-CH12

商品コード	販売名	規格/型式
0450042800	メラ 鉗子	MSO-SN12 モスキート鉗子 直 無鉤 12cm
0450043100	メラ 鉗子	MSO-CN12 モスキート鉗子 反 無鉤 12cm
0450043000	メラ 鉗子	MSO-CH12 モスキート鉗子 反 有鉤 12cm

医療機器届出番号:11B1X00016000259

## メラ 鉗子



MSO-SN125A



MSO-CN125A



MMS-CN125

微小血管用


商品コード	販売名	規格/型式
0450043200	メラ 鉗子	MSO-SN125A モスキート鉗子 直 無鉤 アヤ筋 12.5cm
0450043300	メラ 鉗子	MSO-CN125A モスキート鉗子 弯曲 無鉤 アヤ筋 12.5cm
0450043600	メラ 鉗子	MMS-CN125 モスキート鉗子 反 無鉤 12.5cm

医療機器届出番号:11B1X00016000259

## メラ 鉗子




MNS-SN145

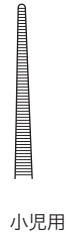

小児用



MNS-CN145

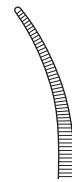

小児用

商品コード	販売名	規格/型式
0450043700	メラ 鉗子	MNS-SN145 モスキート鉗子 直 無鉤 14.5cm
0450043800	メラ 鉗子	MNS-CN145 モスキート鉗子 反 無鉤 14.5cm

医療機器届出番号:11B1X00016000259

## メラ 鉗子




MSO-SN17



MSO-SN117



弱弯

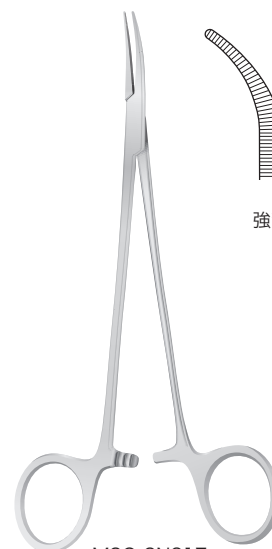

MSO-SN217




強弯

商品コード	販売名	規格/型式
0450042900	メラ 鉗子	MSO-SN17 モスキート鉗子 直 無鉤 17cm
0450043400	メラ 鉗子	MSO-SN117 モスキート鉗子 弱弯 無鉤 17cm
0450043500	メラ 鉗子	MSO-SN217 モスキート鉗子 強弯 無鉤 17cm

医療機器届出番号:11B1X00016000259

# 止血鉗子(Hemostatic Forceps)

## メラ モスキート鉗子 BOX

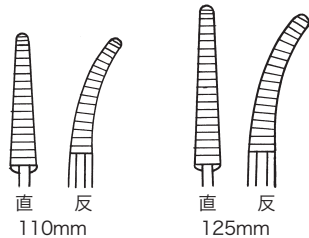


商品コード	販売名	規格/型式
0450040000	メラ モスキート鉗子 BOX	無鉤 直 110mm
0450040100	メラ モスキート鉗子 BOX	無鉤 直 125mm
0450040300	メラ モスキート鉗子 BOX	無鉤 反 110mm
0450040400	メラ モスキート鉗子 BOX	無鉤 反 125mm

医療機器届出番号:11B1X00016000155



## メラ モスキート鉗子 BOX

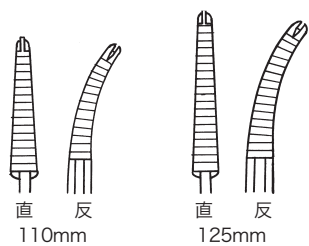


商品コード	販売名	規格/型式
0450050000	メラ モスキート鉗子 BOX	有鉤 直 110mm
0450050100	メラ モスキート鉗子 BOX	有鉤 直 125mm
0450050300	メラ モスキート鉗子 BOX	有鉤 反 110mm
0450050400	メラ モスキート鉗子 BOX	有鉤 反 125mm

医療機器届出番号:11B1X00016000155



## メラ ペアン止血鉗子 BOX

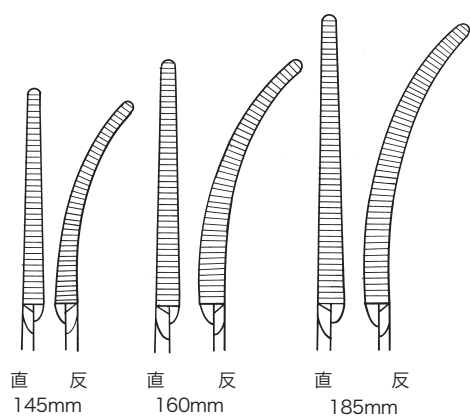


商品コード	販売名	規格/型式
0450000100	メラ ペアン止血鉗子 BOX	無鉤 直 145mm
0450000200	メラ ペアン止血鉗子 BOX	無鉤 直 160mm
0450000300	メラ ペアン止血鉗子 BOX	無鉤 直 185mm
0450000400	メラ ペアン止血鉗子 BOX	無鉤 反 145mm
0450000500	メラ ペアン止血鉗子 BOX	無鉤 反 160mm
0450000600	メラ ペアン止血鉗子 BOX	無鉤 反 185mm

医療機器届出番号:11B1X00016000151




# 剥離鉗子(Dissecting Forceps)

メラ ケリー鉗子 BOX

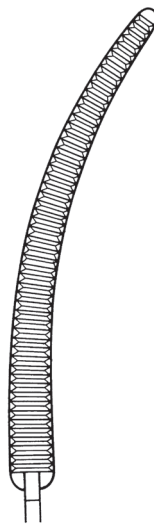

弱湾

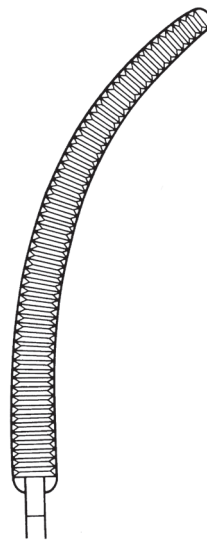


中湾

商品コード	販売名	規格/型式
0450200200	メラ ケリー鉗子 BOX	中湾 195mm
0450200300	メラ ケリー鉗子 BOX	弱湾 200mm
0450200500	メラ ケリー鉗子 BOX	中湾 215mm
0450200600	メラ ケリー鉗子 BOX	弱湾 220mm
0450200800	メラ ケリー鉗子 BOX	中湾 235mm
0450200900	メラ ケリー鉗子 BOX	弱湾 240mm
0450201100	メラ ケリー鉗子 BOX	中湾 245mm
0450201200	メラ ケリー鉗子 BOX	弱湾 250mm

医療機器届出番号:11B1X00016000124

## メラ ツッペル鉗子

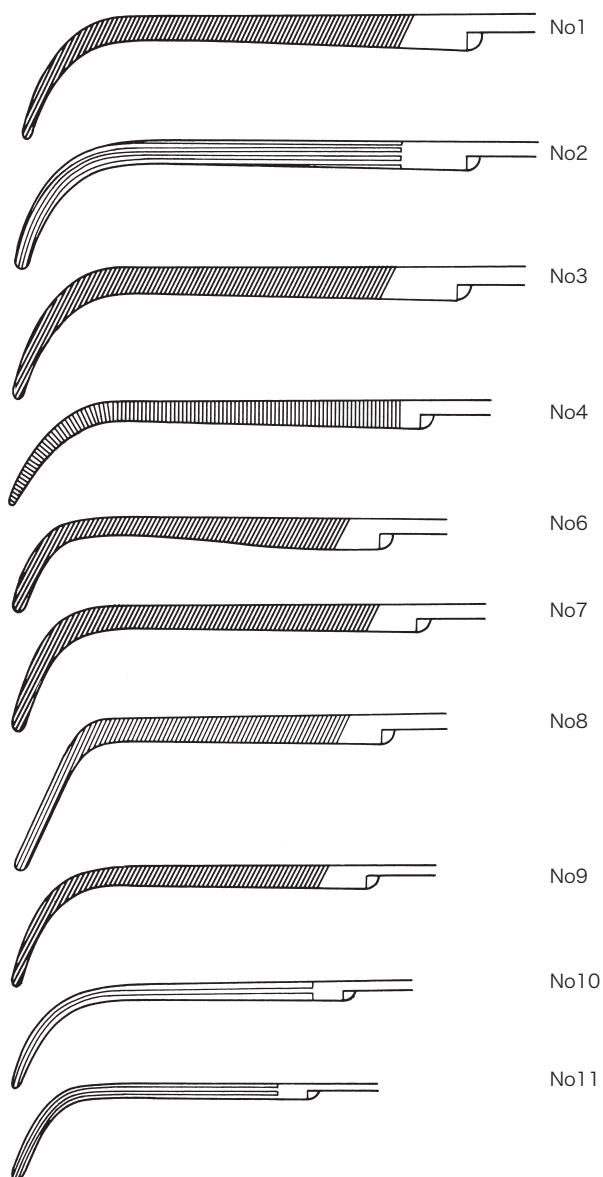


商品コード	販売名	規格/型式
0450210000	メラ ツッペル鉗子	No.1 榊原式 250mm ヨコスジ
0450210100	メラ ツッペル鉗子	No.2 230mm タテスジ
0450210200	メラ ツッペル鉗子	No.3 榊原式 230mm ヨコスジ
0450210300	メラ ツッペル鉗子	No.4 金沢大式 230mm
0450210400	メラ ツッペル鉗子	No.6 抗研式 200mm ヨコスジ 幅 13mm
0450210500	メラ ツッペル鉗子	No.7 榊原式 200mm ヨコスジ 幅 15mm
0450210600	メラ ツッペル鉗子	No.8 200mm ヨコスジ 幅 20mm 強弯
0450210700	メラ ツッペル鉗子	No.9 180mm ヨコスジ
0450210800	メラ ツッペル鉗子	No.10 170mm タテスジ
0450210900	メラ ツッペル鉗子	No.11 165mm タテスジ

医療機器届出番号:11B1X00016000150

# 剥離鉗子(Dissecting Forceps)


## メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子

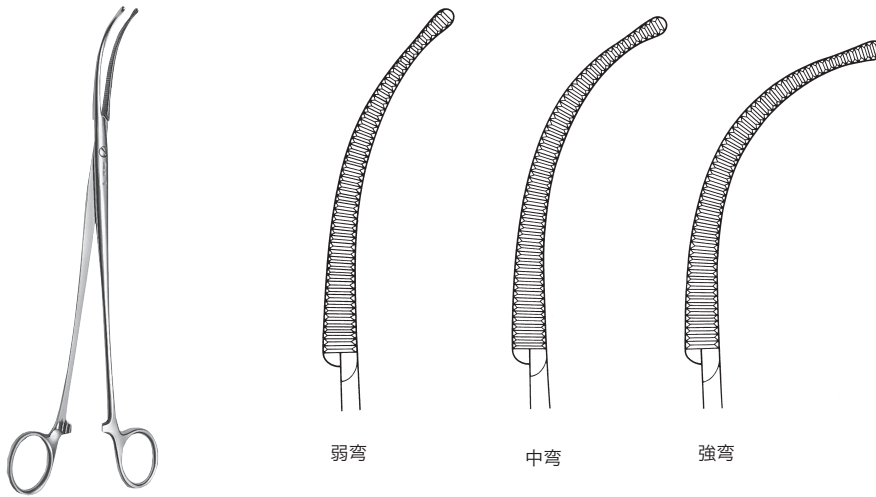

商品コード	販売名	規格/型式
0450212000	メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子	強弯 225mm
0450212200	メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子	中弯 225mm
0450212100	メラ 熊谷式肺尖血管剥離鉗子	弱弯 225mm

医療機器届出番号:11B1X00016000149

## メラ 抗研式肺門剥離鉗子

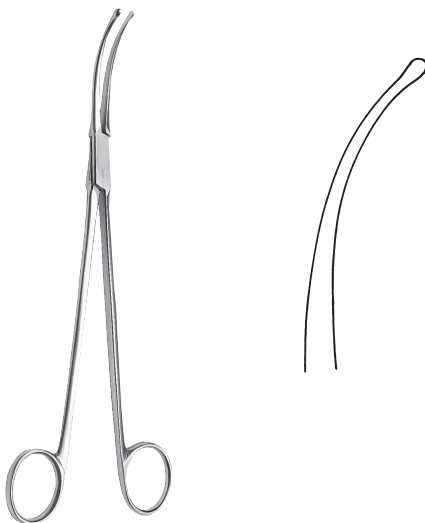


商品コード	販売名	規格/型式
0450213100	メラ 抗研式肺門剥離鉗子	200mm

医療機器届出番号:11B1X00016000121



# 把持鉗子 (Grasping Forceps)

## メラ 抗研式アリス鉗子

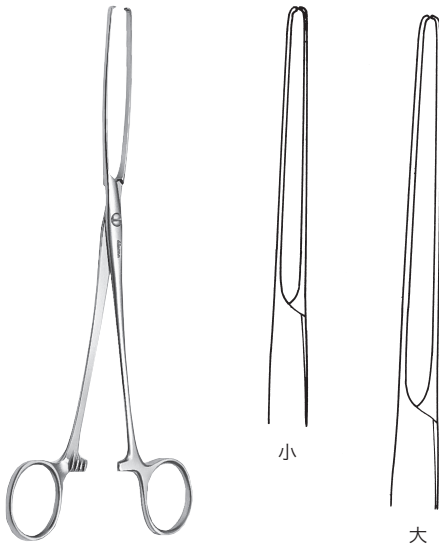

商品コード	販売名	規格/型式
0450400200	メラ 抗研式アリス鉗子	大 200mm
0450400100	メラ 抗研式アリス鉗子	小 150mm

医療機器届出番号:11B1X00016000118


## メラ 榊原改良アリス鉗子



商品コード	販売名	規格/型式
0450401100	メラ 榊原改良アリス鉗子	A 大 200mm
0450401000	メラ 榊原改良アリス鉗子	B 小 150mm

医療機器届出番号:11B1X00016000094


## メラ 榊原改良ドバール鉗子

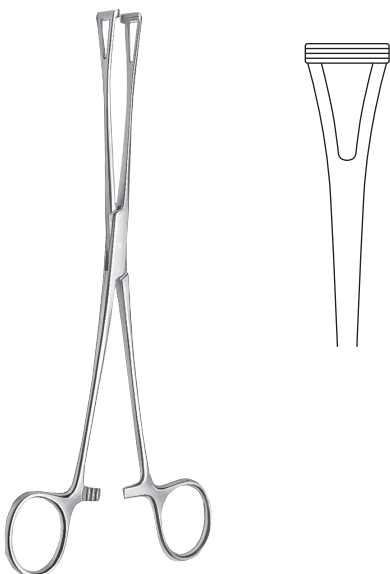

商品コード	販売名	規格/型式
0450404000	メラ 榊原改良ドバール鉗子	211mm

医療機器届出番号:11B1X00016000139

## メラ 鈴木改良オーバーホルト肺把持鉗子


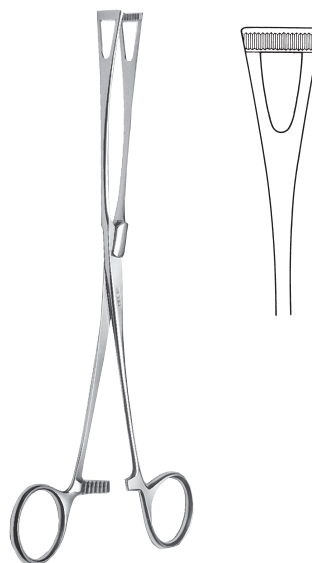


商品コード	販売名	規格/型式
0450403000	メラ 鈴木改良オーバーホルト肺把持鉗子	210mm

医療機器届出番号:11B1X00016000117

# 血管鉗子(Vascular Forceps)

## メラ ポプキンス血管鉗子

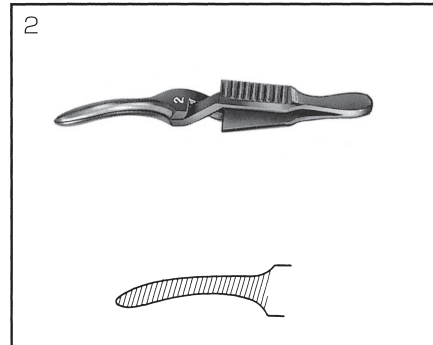
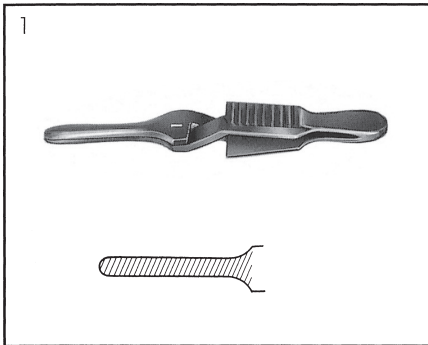


商品コード	販売名	規格/型式
0450600100	メラ ポプキンス血管鉗子	No.1 47mm

商品コード	販売名	規格/型式
0450600200	メラ ポプキンス血管鉗子	No.2 46mm

医療機器届出番号:11B1X00016000100

## メラ ブルドック血管鉗子

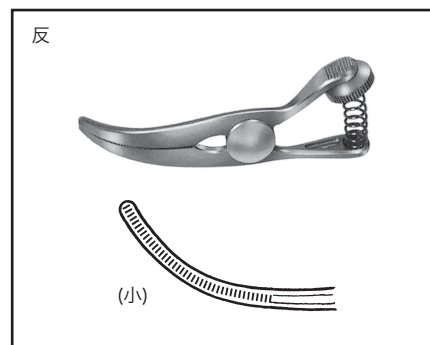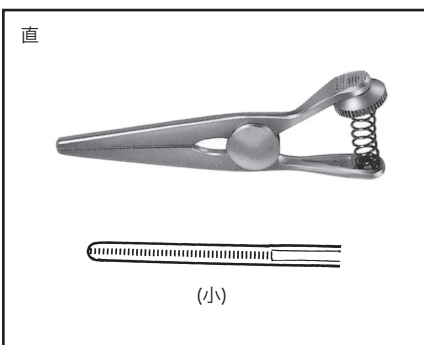


商品コード	販売名	規格/型式
0450602100	メラ ブルドック血管鉗子	直 大 70mm
0450602000	メラ ブルドック血管鉗子	直 小 55mm

商品コード	販売名	規格/型式
0450602300	メラ ブルドック血管鉗子	反 大 65mm
0450602200	メラ ブルドック血管鉗子	反 小 50mm

医療機器届出番号:11B1X00016000146


メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX型

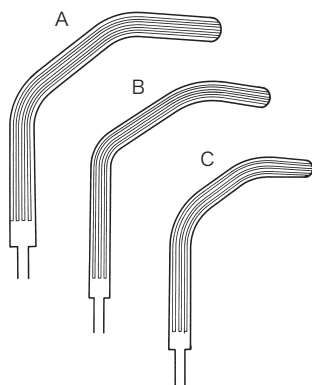

商品コード*	販売名	規格/型式
0450607200	メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX型	A 220mm
0450607100	メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX型	B 200mm
0450607000	メラ サチンスキー氏血管鉗子 BOX型	C 175mm

医療機器届出番号:11B1X00016000098

メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子

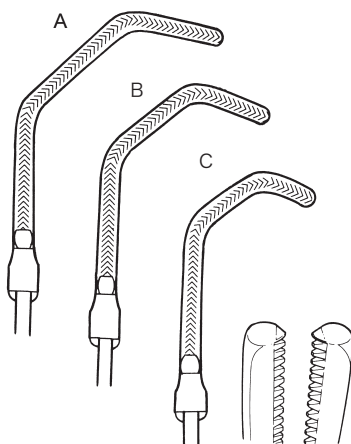


商品コード*	販売名	規格/型式
0450607500	メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子	A 215mm
0450607400	メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子	B 185mm
0450607300	メラ 榊原サチンスキー型血管鉗子	C 180mm

医療機器届出番号:11B1X00016000097

# 血管鉗子(Vascular Forceps)


## メラ 強弯曲鉗子(大血管剥離)

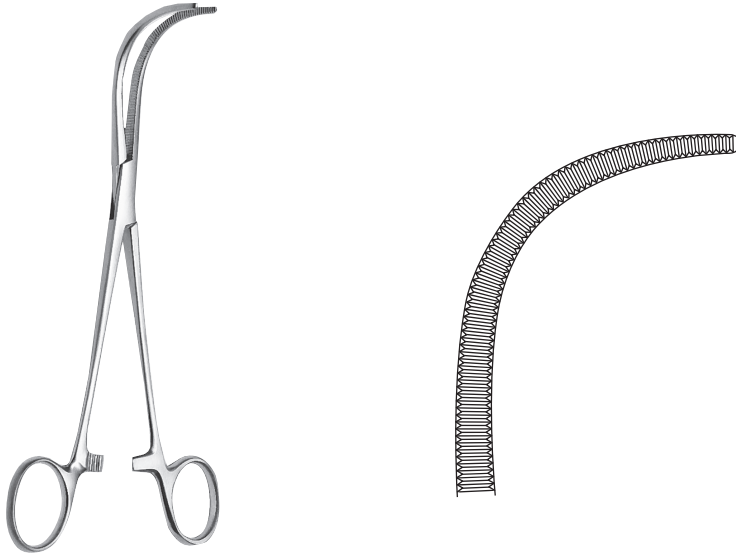

商品コード	販売名	規格/型式
0450612500	メラ 強弯曲鉗子(大血管剥離)	185mm

医療機器届出番号:11B1X0001600093

## メラ 新田式強弯曲剥離鉗子

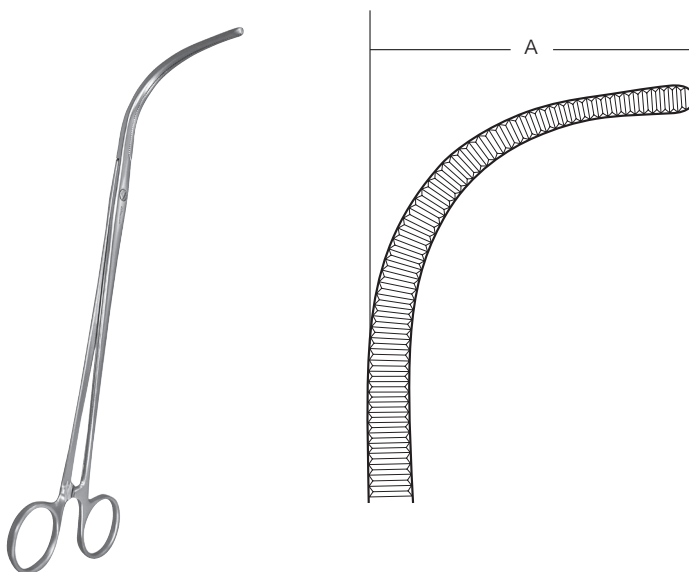

商品コード	販売名	規格/型式	A 先端
0450214000	メラ 新田式強弯曲剥離鉗子	大 225mm	55mm
0450214100	メラ 新田式強弯曲剥離鉗子	小 225mm	40mm


医療機器届出番号:11B1X00016000122

# 食道・消化器鉗子 (Esophageal/digestive Forceps)

## メラ ドアイアン腸鉗子



直

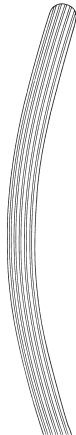



反

商品コード	販売名	規格/型式
0450800100	メラ ドアイアン腸鉗子	直 240mm
0450800200	メラ ドアイアン腸鉗子	反 235mm

医療機器届出番号:11B1X00016000148

# 食道・消化器鉗子 (Esophageal/digestive Forceps)

## メラ ミクリッチ腹膜鉗子 BOX/ハズシ

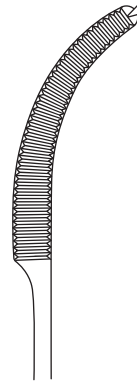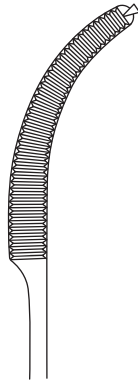

商品コード	販売名	規格/型式
0450802100	メラ ミクリッチ腹膜鉗子	BOX 大 212mm
0450802000	メラ ミクリッチ腹膜鉗子	BOX 小 158mm

商品コード	販売名	規格/型式
0450802200	メラ ミクリッチ腹膜鉗子	ハズシ 200mm

医療機器届出番号:11B1X00016000129

## メラ 中山式ガッチリ鉗子




商品コード	販売名	規格/型式
0450804500	メラ 中山式ガッチリ鉗子	183mm

医療機器届出番号:11B1X00016000112

# 骨鉗子 (Bone Forceps)

## メラ 二連関節丸のみ鉗子

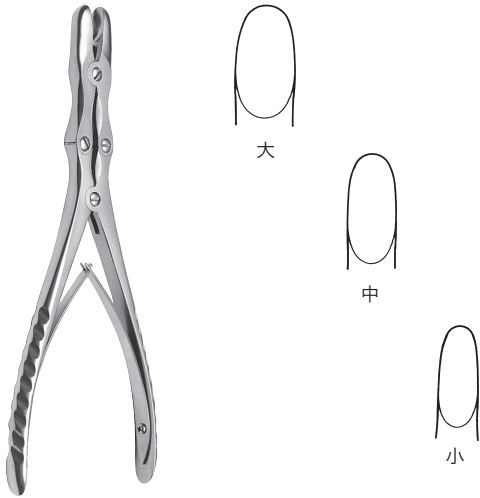

商品コード	販売名	規格/型式
0451005600	メラ 二連関節丸のみ鉗子	大 幅 10mm 230mm
0451005500	メラ 二連関節丸のみ鉗子	中 幅 8mm 230mm
0451005400	メラ 二連関節丸のみ鉗子	小 幅 6mm 230mm

医療機器届出番号:11B1X00016000133


## メラ 骨やすり 平形



商品コード	販売名	規格/型式
0452604000	メラ 骨やすり 平形	住田氏 205mm

医療機器届出番号:11B1X00016000189

## メラ ホルクマン氏両頭鋭匙

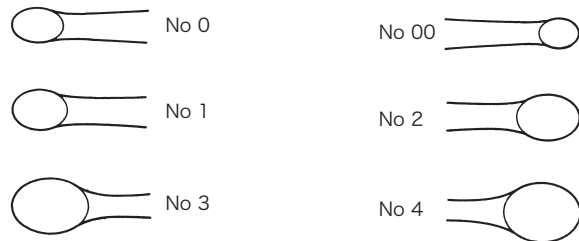


商品コード	販売名	規格/型式
0452602100	メラ ホルクマン氏両頭鋭匙	No.00~0 160mm
0452602200	メラ ホルクマン氏両頭鋭匙	No.1~2 162mm
0452602400	メラ ホルクマン氏両頭鋭匙	No.3~4 164mm


医療機器届出番号:11B1X00016000059

# チューブ鉗子(Tube Clamp)


メラ チューブ鉗子

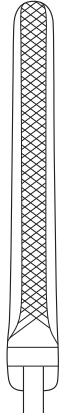

MT-20

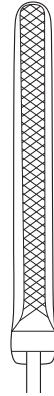

MT-18

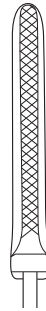

MT-15


商品コード	販売名	規格/型式
0451204000	メラ チューブ鉗子	MT-15 チューブ鉗子 15cm
0451204100	メラ チューブ鉗子	MT-18 チューブ鉗子 18cm
0451204200	メラ チューブ鉗子	MT-20 チューブ鉗子 20cm

医療機器届出番号:11B1X00016000260



# タオル鉗子 (Towel Clamp)


メラ タオル鉗子 BOX

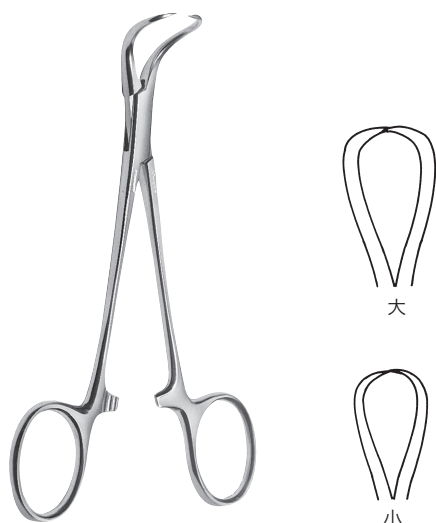

商品コード	販売名	規格/型式
0451205100	メラ タオル鉗子 BOX	大 130mm
0451205000	メラ タオル鉗子 BOX	小 100mm

医療機器届出番号:11B1X00016000088

メラ タオル鉗子 BOX 東北大式

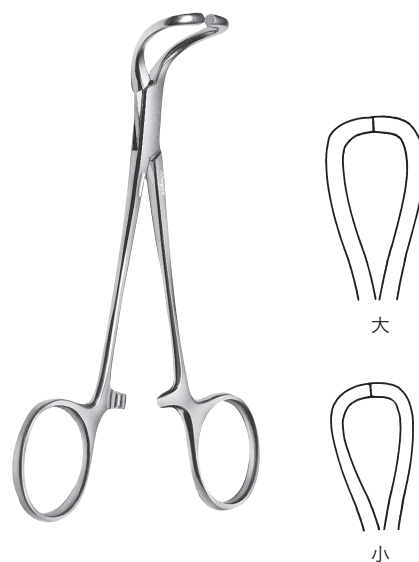

商品コード	販売名	規格/型式
0451205500	メラ タオル鉗子 BOX	東北大式 大 130mm
0451205400	メラ タオル鉗子 BOX	東北大式 小 100mm

医療機器届出番号:11B1X00016000088




商品コード	販売名	規格/型式
0451205600	メラ 鉗子	ウィック式タオル鉗子 K62-大 135mm MTO-W135

医療機器届出番号:11B1X00016000259

# その他鉗子 (Swab Forceps)

## メラ 麦粒鉗子 反

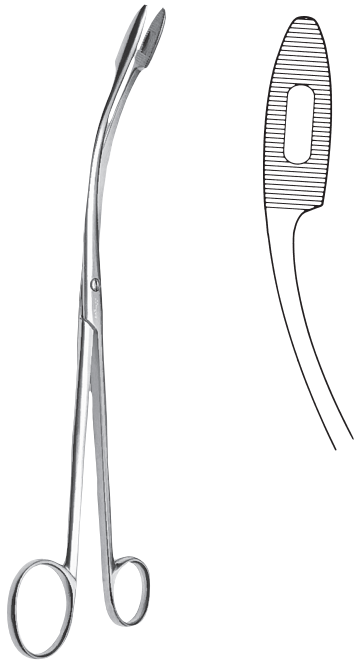

商品コード	販売名	規格/型式
0451208700	メラ 麦粒鉗子	反 360mm
0451208500	メラ 麦粒鉗子	反 300mm
0451208300	メラ 麦粒鉗子	反 270mm
0451208100	メラ 麦粒鉗子	反 240mm

医療機器届出番号:11B1X00016000156


## メラ ワイヤー鉗子



商品コード	販売名	規格/型式
0451212000	メラワイヤー鉗子	130mm

医療機器届出番号:11B1X00016000137

## メラ チューブ用ローラー鉗子

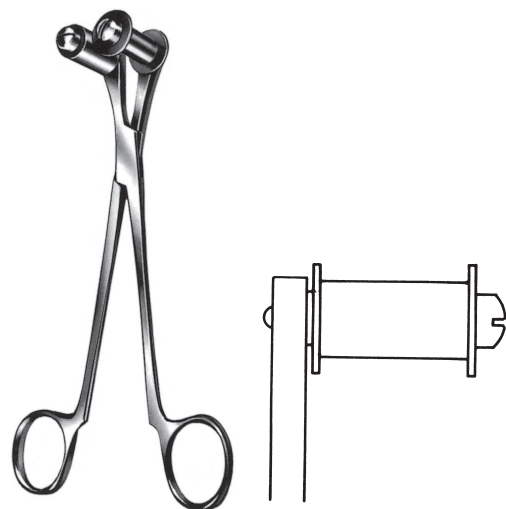


商品コード	販売名	規格/型式
0451211000	メラ チューブ用ローラー鉗子	180mm

医療機器届出番号:11B1X00016000105

# 持針器 (Needle Holders)


## メラ マッチュウ式持針器

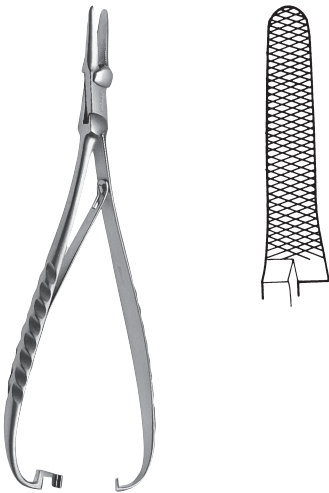

商品コード	販売名	規格/型式
0451401000	メラ マッチュウ式持針器	A型 160mm
0451401100	メラ マッチュウ式持針器	A型 180mm
0451401200	メラ マッチュウ式持針器	A型 190mm
0451401300	メラ マッチュウ式持針器	A型 210mm

医療機器届出番号:11B1X00016000019


## メラ リヒテル式持針器

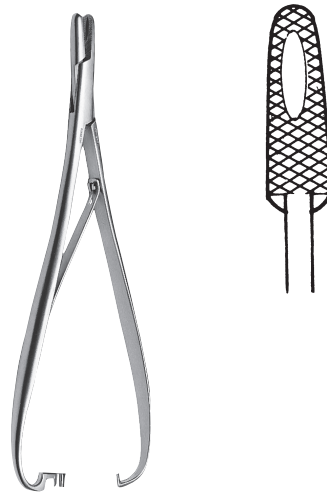

商品コード	販売名	規格/型式
0451406000	メラ リヒテル式持針器	200mm

医療機器届出番号:11B1X00016000017

## メラ 中山式持針器

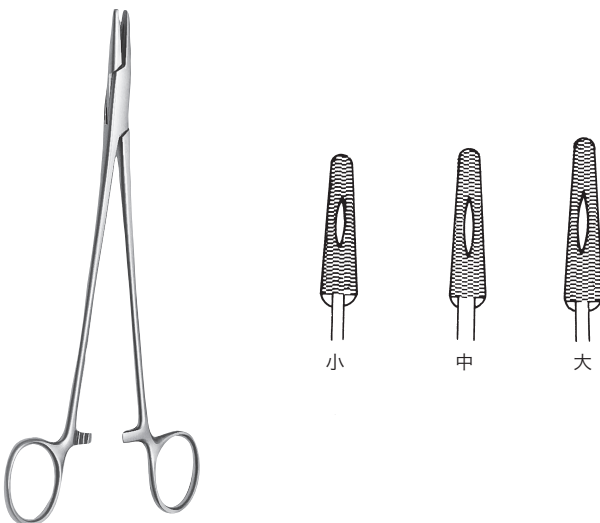


商品コード	販売名	規格/型式
0451400300	メラ 中山式持針器	大 205mm
0451400200	メラ 中山式持針器	中 188mm
0451400100	メラ 中山式持針器	小 158mm

医療機器届出番号:11B1X00016000018

# 鑷子 (Forceps)


## メラ 外科鑷子 無鈎

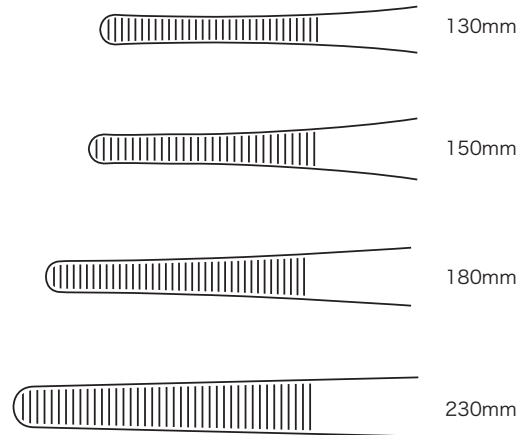

商品コード	販売名	規格/型式
0451600100	メラ 外科鑷子	無鈎 130mm
0451600300	メラ 外科鑷子	無鈎 150mm
0451600500	メラ 外科鑷子	無鈎 180mm
0451600700	メラ 外科鑷子	無鈎 230mm

医療機器届出番号:11B1X0001600052


## メラ 外科鑷子 有鈎

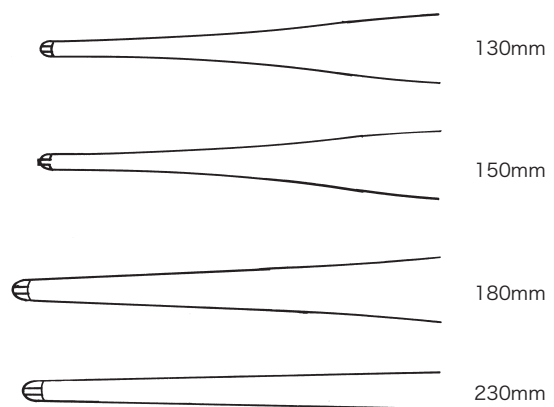

商品コード	販売名	規格/型式
0451600200	メラ 外科鑷子	有鈎 130mm
0451600400	メラ 外科鑷子	有鈎 150mm
0451600600	メラ 外科鑷子	有鈎 180mm
0451600800	メラ 外科鑷子	有鈎 230mm

医療機器届出番号:11B1X0001600052


## メラ 先細鑷子 無鈎

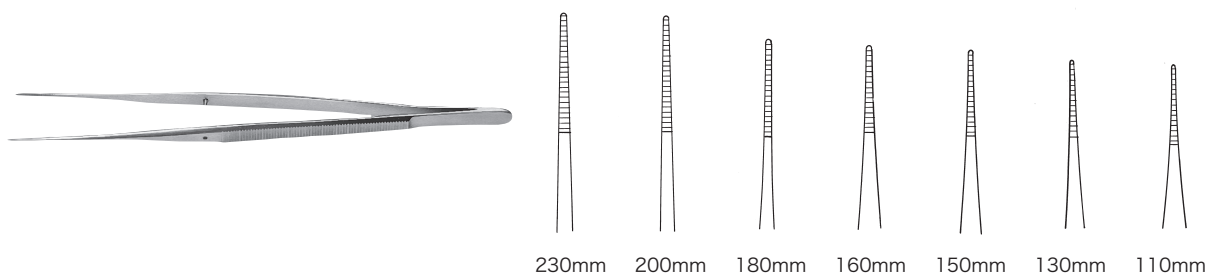

商品コード	販売名	規格/型式
0451602000	メラ 先細鑷子	無鈎 110mm
0451602200	メラ 先細鑷子	無鈎 130mm
0451602400	メラ 先細鑷子	無鈎 150mm
0451602600	メラ 先細鑷子	無鈎 160mm
0451602800	メラ 先細鑷子	無鈎 180mm
0451603000	メラ 先細鑷子	無鈎 200mm
0451603200	メラ 先細鑷子	無鈎 230mm

医療機器届出番号:11B1X0001600053

## メラ 先細鑷子 有鈎

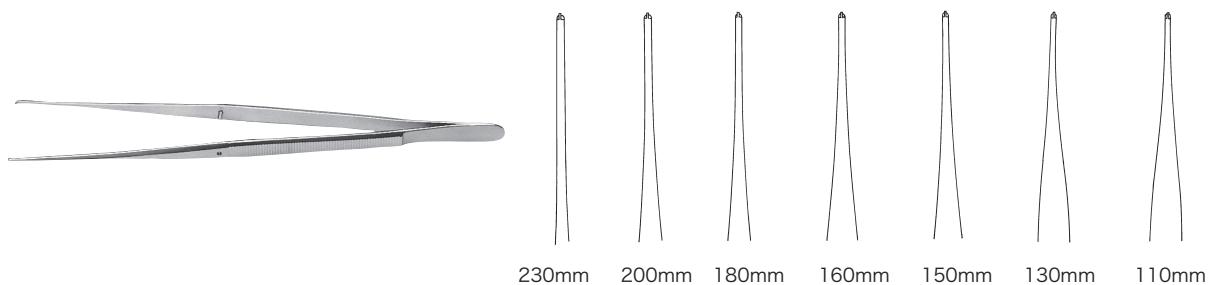


商品コード	販売名	規格/型式
0451602100	メラ 先細鑷子	有鈎 110mm
0451602300	メラ 先細鑷子	有鈎 130mm
0451602500	メラ 先細鑷子	有鈎 150mm
0451602700	メラ 先細鑷子	有鈎 160mm
0451602900	メラ 先細鑷子	有鈎 180mm
0451603100	メラ 先細鑷子	有鈎 200mm
0451603300	メラ 先細鑷子	有鈎 230mm

医療機器届出番号:11B1X0001600053

# 鑷子 (Forceps)

## メラ アドソン鑷子

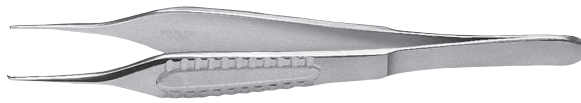

商品コード	販売名	規格/型式
0451605100	メラ アドソン鑷子	無鉤 125mm
0451605000	メラ アドソン鑷子	有鉤 125mm

医療機器届出番号:11B1X00016000054

# 剪刀 (Scissors)

## メラ 抗研式肋骨剪刀



商品コード	販売名	規格/型式
0451834000	メラ 抗研式肋骨剪刀	325mm

医療機器届出番号:11B1X00016000027


## メラ 抗研式深部肋骨剪刀



商品コード	販売名	規格/型式
0451834100	メラ 抗研式深部肋骨剪刀	285mm

医療機器届出番号:11B1X00016000028

## メラ 抗研式コリロス第一肋骨剪刀



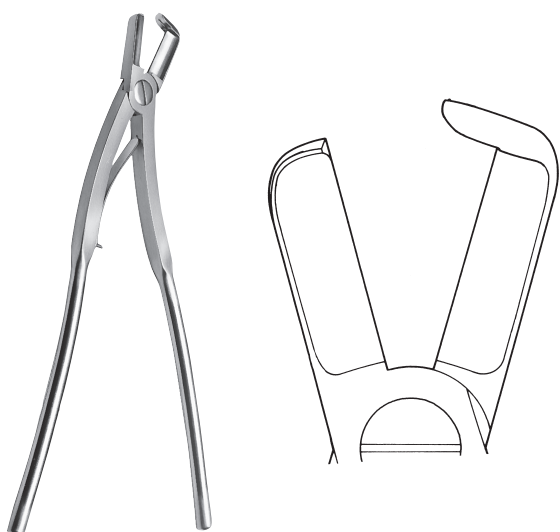


商品コード	販売名	規格/型式
0451835000	メラ 抗研式コリロス第一肋骨剪刀	325mm

医療機器届出番号:11B1X00016000029

# メラレトラクター (Retractor)



## メラ 中山式開創器

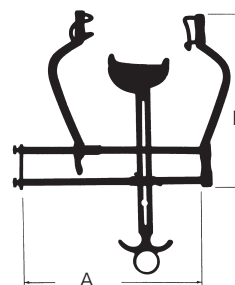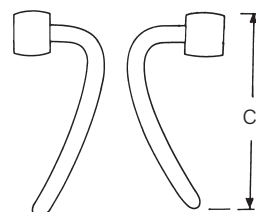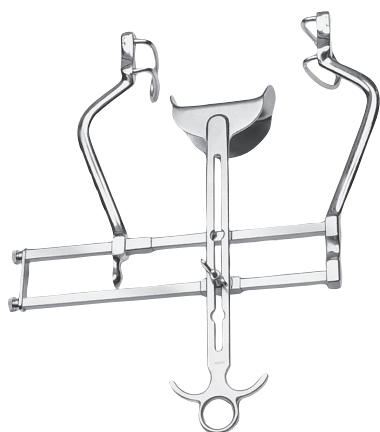

商品コード	販売名	A	B	C	中弁・幅/深さ
0452000100	メラ 中山式開創器	250mm	235mm	65mm	80mm/47mm

医療機器届出番号:11B1X00016000201

## メラ 中山式開創器

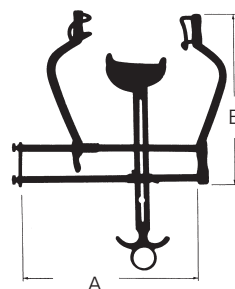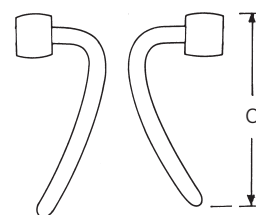


商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	中弁・幅/深さ
0452000300	メラ 中山式開創器	肥満型	250mm	235mm	85mm	80mm/58mm

医療機器届出番号:11B1X00016000201




## メラ ゴツセ開創器

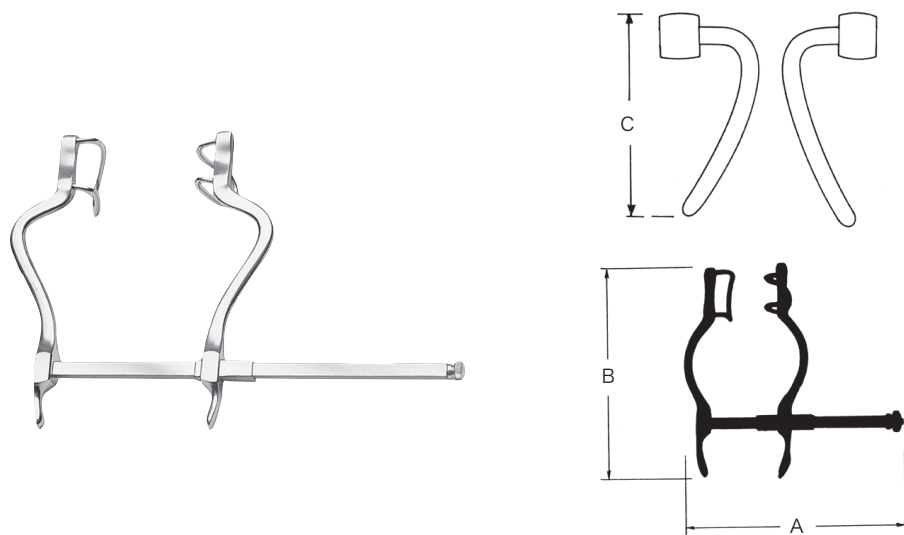

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C
0452002100	メラゴツセ開創器	大	250mm	185mm	55mm
0452002000	メラゴツセ開創器	小	107mm	125mm	30mm

医療機器届出番号:11B1X00016000200

## メラ 東医大開創器

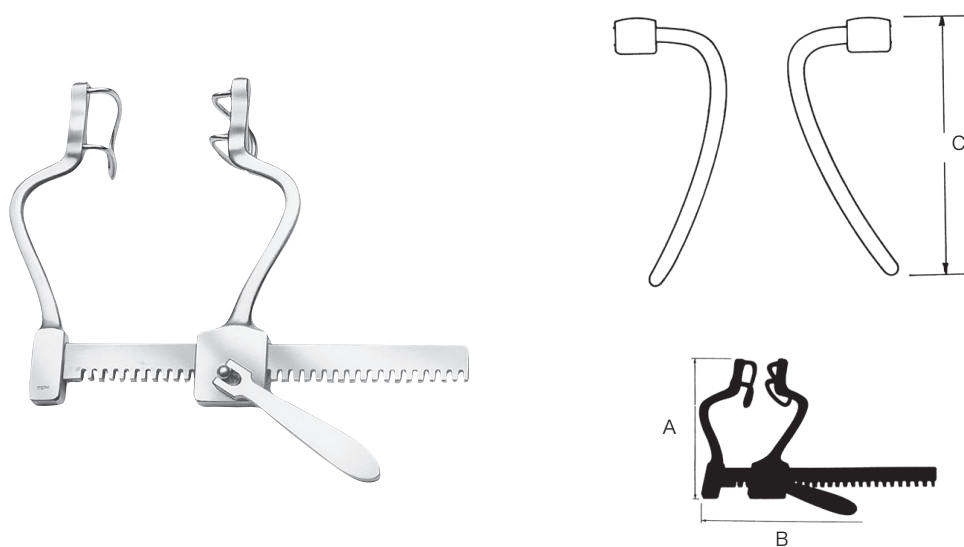


商品コード	販売名	A	B	C
0452003000	メラ 東医大開創器	185mm	240mm	55mm

医療機器届出番号:11B1X00016000202

# メラレトラクター (Retractor)


## メラ オーバーホルト開胸器

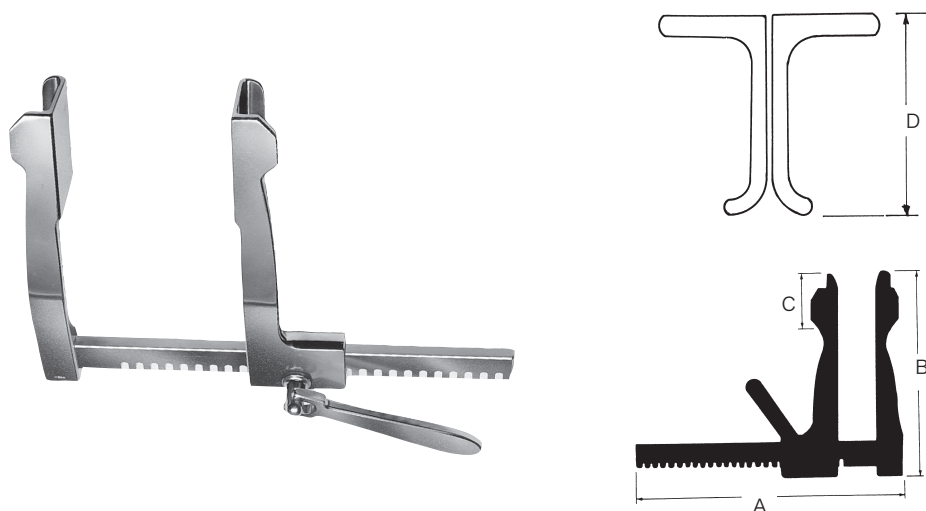

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D	重量
0452006300	メラ オーバーホルト開胸器	大	250mm	175mm	60mm	45mm	900g
0452006200	メラ オーバーホルト開胸器	中	205mm	140mm	40mm	32mm	550g
0452006100	メラ オーバーホルト開胸器	小	155mm	102mm	25mm	25mm	300g
0452006000	メラ オーバーホルト開胸器	極小	133mm	77mm	20mm	20mm	220g

医療機器届出番号: 11B1X00016000205



## メラ ト部式開胸器

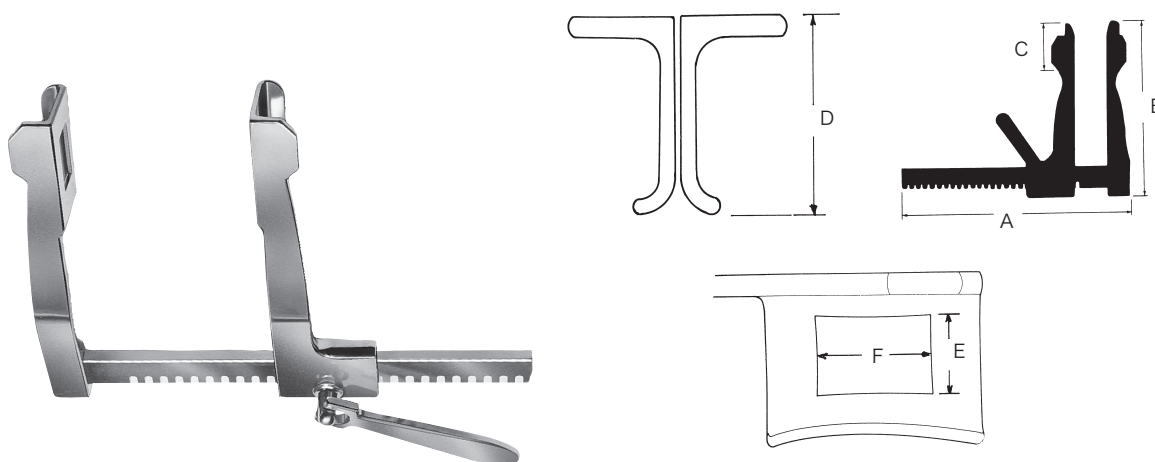

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D	E	F	重量
0452007300	メラ ト部式開胸器	大	250mm	175mm	60mm	45mm	20mm	30mm	850g
0452007200	メラ ト部式開胸器	中	205mm	140mm	40mm	32mm	13mm	15mm	500g
0452007100	メラ ト部式開胸器	小	155mm	102mm	25mm	25mm	10mm	10mm	270g
0452007000	メラ ト部式開胸器	極小	133mm	77mm	20mm	20mm	7mm	7mm	210g

医療機器届出番号: 11B1X00016000209


## メラ 榊原式開胸器

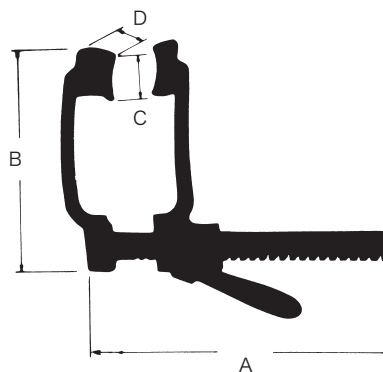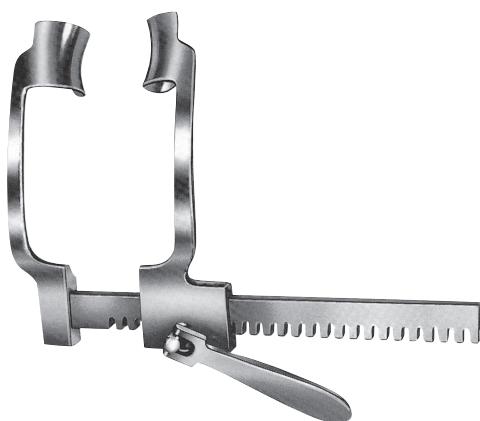

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D
0452008300	メラ 榊原式開胸器	大	250mm	190mm	38mm	35mm
0452008200	メラ 榊原式開胸器	中	235mm	140mm	29mm	25mm
0452008100	メラ 榊原式開胸器	小	155mm	105mm	20mm	20mm
0452008000	メラ 榊原式開胸器	極小	143mm	85mm	15mm	18mm

医療機器届出番号:11B1X00016000206

## メラ 改良モーリス開胸器

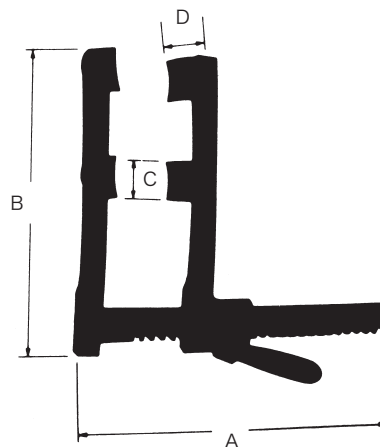


商品コード	販売名	A	B	C	D
0452008500	メラ 改良モーリス開胸器	250mm	220mm	30mm	35mm

医療機器届出番号:11B1X00016000207

# メラレトラクター (Retractor)

## メラ 改良モース開胸器

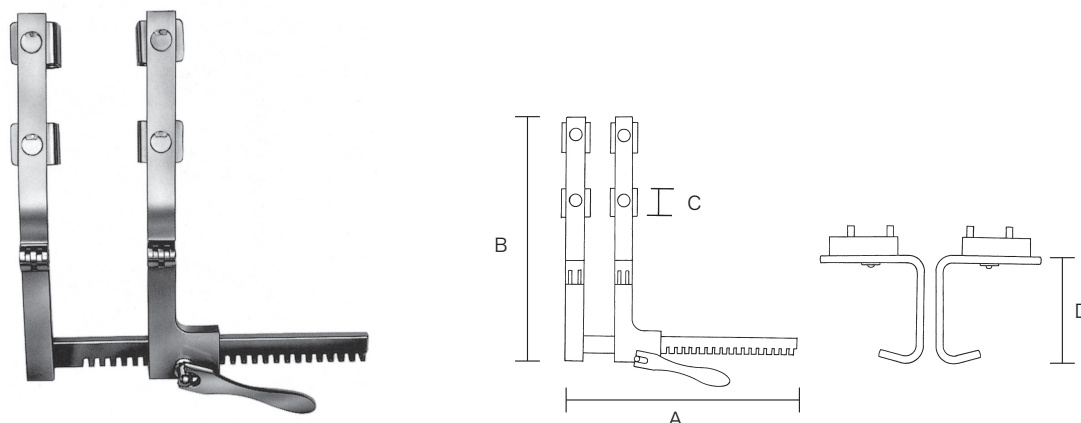

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D
0452009500	メラ 改良モース開胸器	鈴木式フリーアングル開胸器	253mm	273mm	31mm	35mm

医療機器届出番号:11B1X00016000207

## メラ 開胸器(胸骨挙上器用)



胸骨挙上器(小)


胸骨挙上器(大)

胸骨挙上器用開胸器

商品コード	販売名	規格/型式	備考	サイズ	販売単位
0452045200	メラ開胸器	胸骨挙上器用開胸器		183×320mm	1個/袋
0452045300	メラ開胸器	胸骨挙上器(大)	標準用	130×100mm	1個/袋
0452045500	メラ開胸器	胸骨挙上器(小)	小切開用	115× 85mm	1個/袋

医療機器届出番号:11B1X00016000009

## メラ MICS用左房鉤

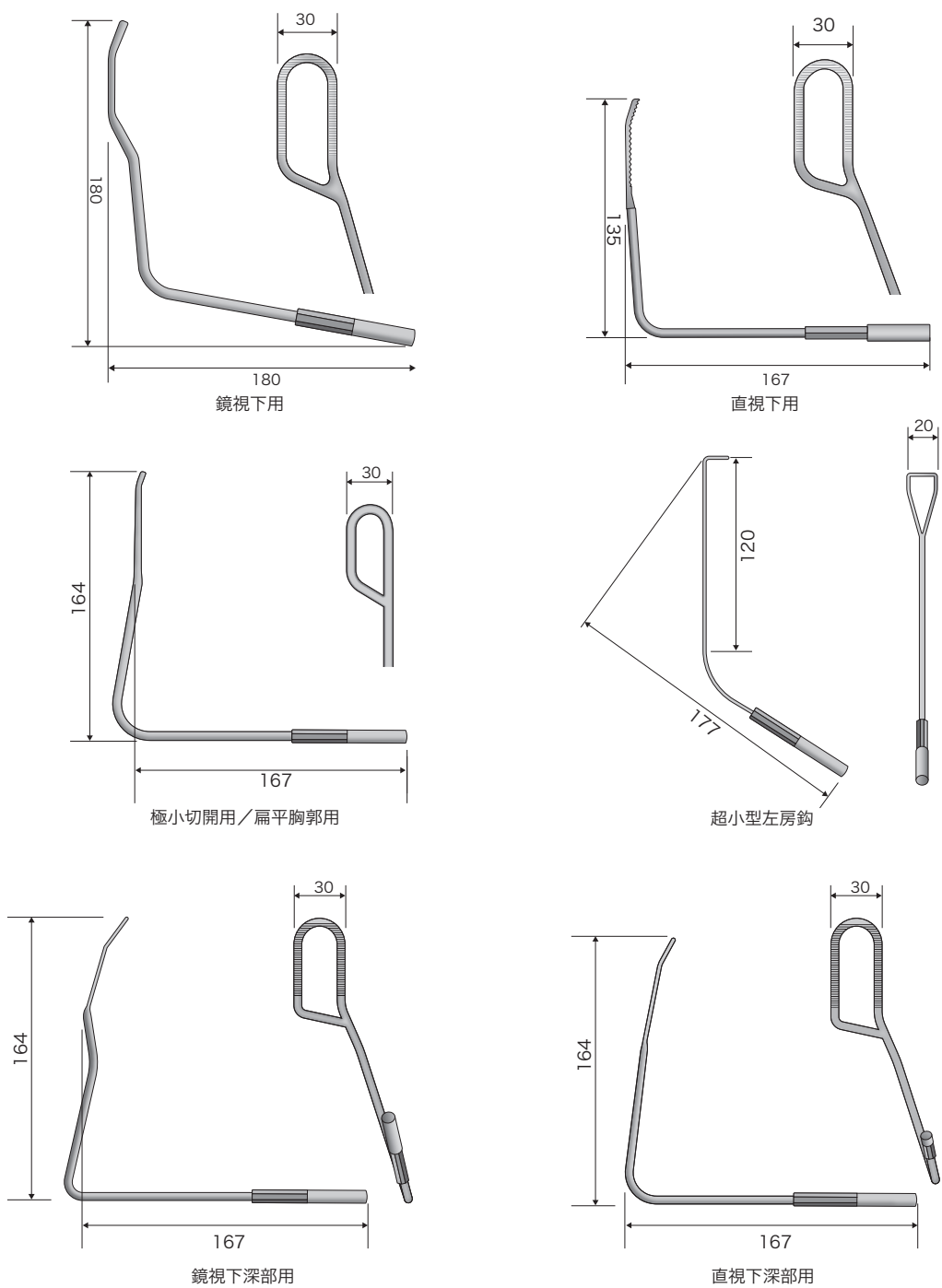


商品コード	販売名	規格/型式	包装(数量)
0452012800	メラ MICS用左房鉤	鏡視下用 30mm	1本/袋
0452013000	メラ MICS用左房鉤	直視下用 30mm	1本/袋
0452013400	メラ MICS用左房鉤	鏡視下深部用 30mm	1本/袋
0452013500	メラ MICS用左房鉤	直視下深部用 30mm	1本/袋
0452013600	メラ MICS用左房鉤	超小型左房鉤 20mm	1本/袋
0452013700	メラ MICS用左房鉤	極小切開用/扁平胸郭用 30mm	1本/袋

医療機器届出番号:11B1X00016000234

考案:日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 心臓血管外科 伊藤敏明先生/聖路加国際病院 心血管センター 阿部恒平先生

# メラレトラクター (Retractor)


## メラ 光野式改良開創器

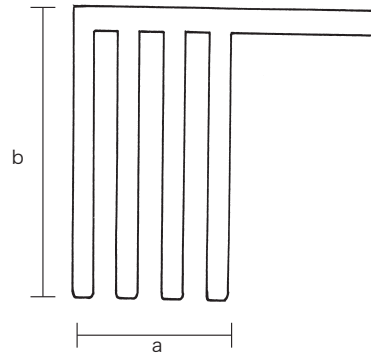

商品コード	販売名	規格/型式	a	b
0452004200	メラ 光野式改良開創器	A型 185mm	22mm	42mm

医療機器届出番号:11B1X00016000211


## メラ 光野式改良開創器

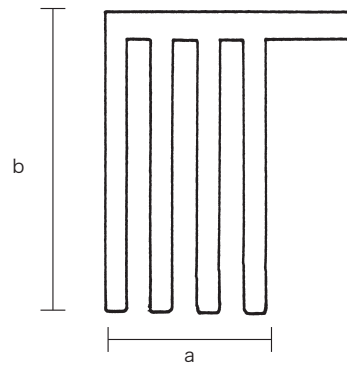

商品コード	販売名	規格/型式	a	b
0452004100	メラ 光野式改良開創器	B型 190mm	22mm	42mm

医療機器届出番号:11B1X00016000211


## メラ 光野式改良開創器

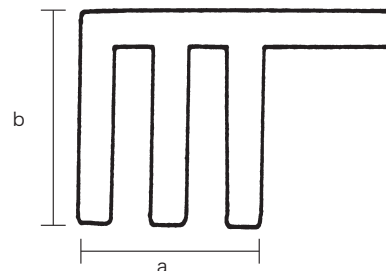

コード	販売名	規格/型式	a	b
0452004000	メラ 光野式改良開創器	C型 175mm	18mm	20mm

医療機器届出番号:11B1X00016000211

## メラ アドソン型開創器

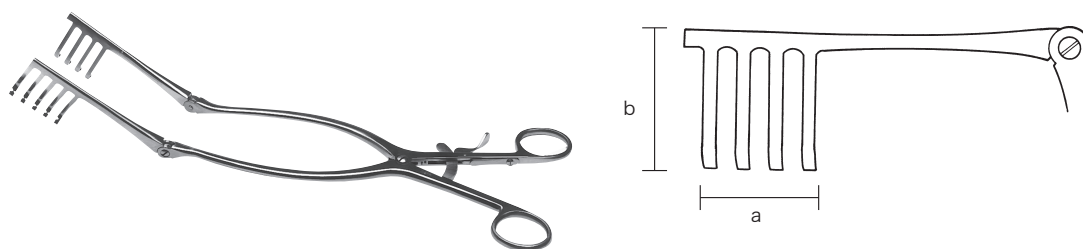

商品コード	販売名	規格/型式	a	b
0452005000	メラ アドソン型開創器	330mm	28mm	35mm

医療機器届出番号:11B1X00016000210

## メラ 光野式ヤンゼン開創器




商品コード	販売名	規格/型式	a	b
0452004500	メラ 光野式ヤンゼン開創器	100mm	15mm	20mm

医療機器届出番号:11B1X00016000212

# メラレトラクター (Retractor)

## メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鈎

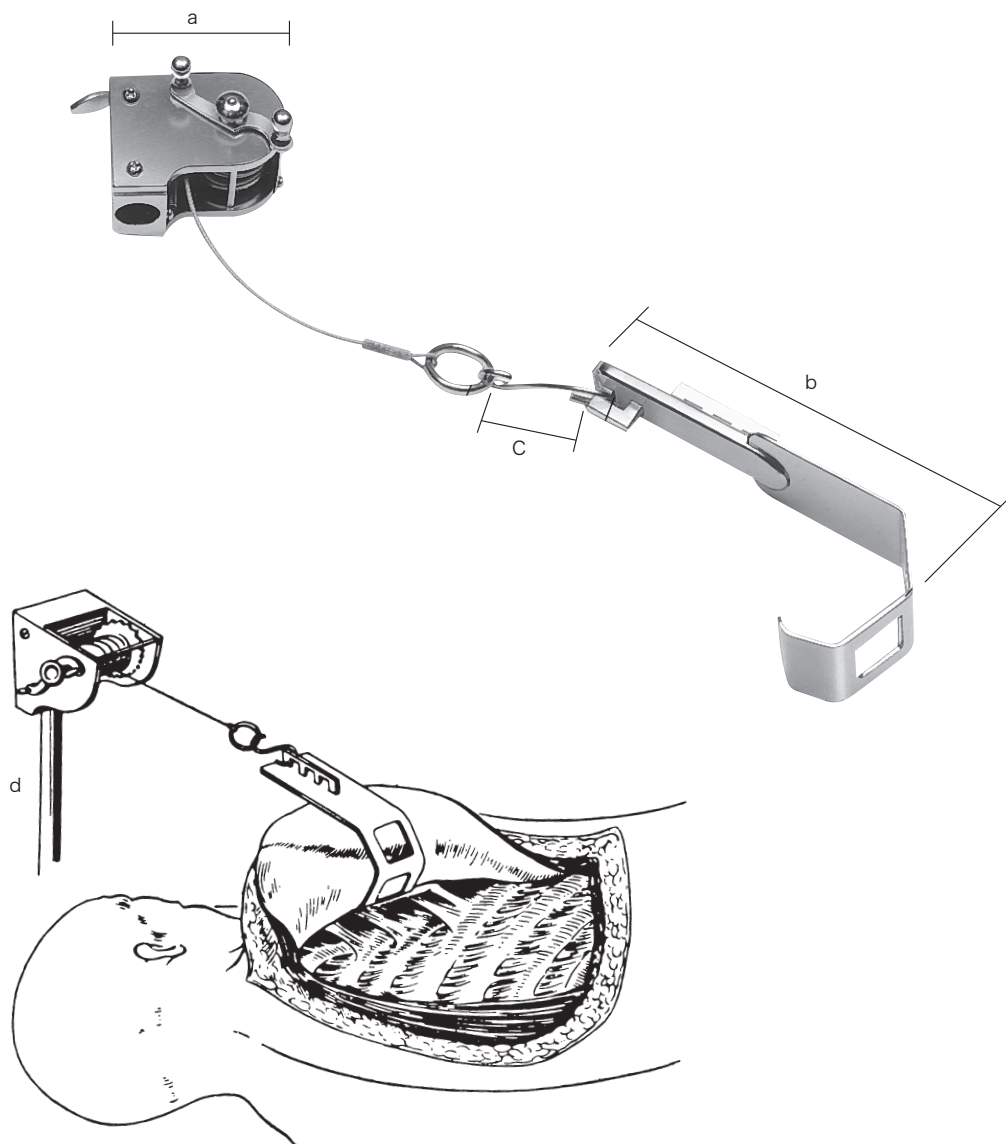


### 構成品

商品コード	販売名	規格/型式
0452012100	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鈎	本体 a 65mm
0452012200	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鈎	鈎 b 140mm
0452012300	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鈎	ワイヤー
0452012400	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鈎	S金具 c 50mm
0452012500	メラ 抗研式肩胛骨保持けん引鈎	棒 d 1000mm

医療機器届出番号:11B1X00016000068




## メラ 扁平鈎

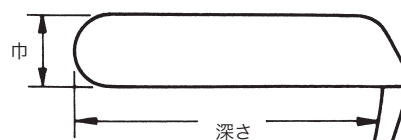

商品コード	販売名	規格/型式	深さ	巾	全長
0452015000	メラ 扁平鈎	0	20mm	8mm	210mm
0452015100	メラ 扁平鈎	1A	25mm	10mm	210mm
0452015200	メラ 扁平鈎	2A	40mm	13mm	210mm
0452015300	メラ 扁平鈎	2B	60mm	13mm	210mm
0452015400	メラ 扁平鈎	3A	40mm	18mm	210mm
0452015500	メラ 扁平鈎	3B	60mm	18mm	210mm
0452015600	メラ 扁平鈎	3C	85mm	18mm	210mm
0452015700	メラ 扁平鈎	4A	60mm	25mm	210mm
0452015800	メラ 扁平鈎	4B	85mm	25mm	210mm

医療機器届出番号:11B1X00016000069


## メラ 直角鈎

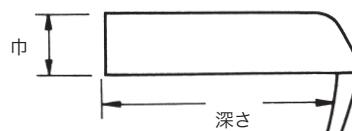

商品コード	販売名	規格/型式	深さ	巾	全長
0452029300	メラ 直角鈎	大	100mm	35mm	215mm
0452029200	メラ 直角鈎	中	90mm	30mm	215mm
0452029100	メラ 直角鈎	小	90mm	20mm	215mm

医療機器届出番号:11B1X00016000070

## メラ 小直角鈎

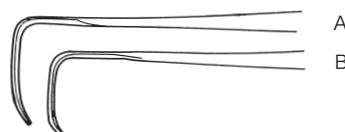


商品コード	販売名	規格/型式	深さ	巾
0452023100	メラ 小直角鈎	A	175mm	18mm
0452023000	メラ 小直角鈎	B	170mm	14mm


医療機器届出番号:11B1X00016000060

# メラレトラクター (Retractor)

## メラ 単爪鉤

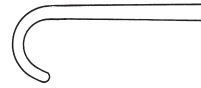

鈍

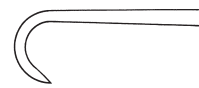

鋭


商品コード	販売名	規格/型式
0452017000	メラ 単爪鉤	鋭 210mm
0452017100	メラ 単爪鉤	鈍 210mm

医療機器届出番号:11B1X00016000082

## メラ 二爪鉤



鈍

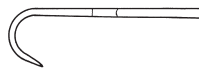

鋭

商品コード	販売名	規格/型式
0452017200	メラ 二爪鉤	鋭 220mm
0452017300	メラ 二爪鉤	鈍 220mm

医療機器届出番号:11B1X00016000083

## メラ 単爪鉤



鈍



鋭


商品コード	販売名	規格/型式
0452021000	メラ 単爪鉤	鋭 155mm
0452021100	メラ 単爪鉤	鈍 155mm

医療機器届出番号:11B1X00016000082

## メラ 二爪鉤



鈍

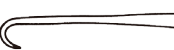

鋭

商品コード	販売名	規格/型式
0452021200	メラ 二爪鉤	鋭 170mm
0452021300	メラ 二爪鉤	鈍 170mm

医療機器届出番号:11B1X00016000083


## メラ 小筋鉤兼中筋鉤



商品コード	販売名	規格/型式	A 幅/深さ	B 幅/深さ
0452022000	メラ 小筋鉤兼中筋鉤	195mm	5mm/14mm	8mm/20mm

医療機器届出番号:11B1X00016000074

## メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)

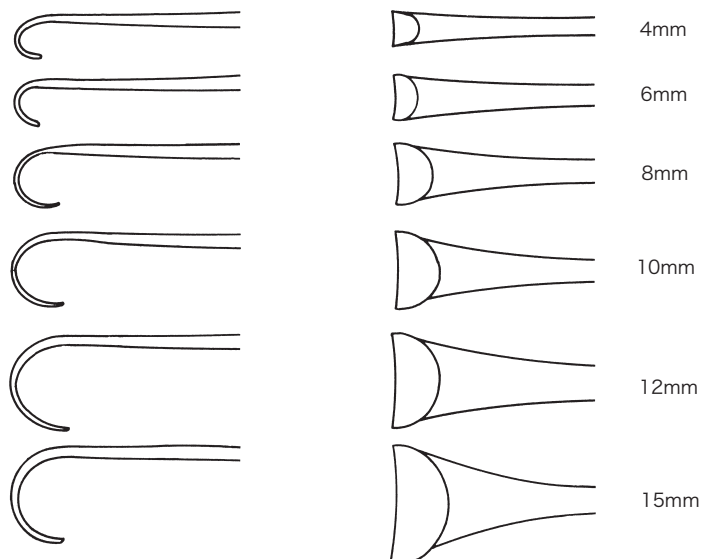


商品コード	販売名	規格/型式
0452024100	メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)	4mm×180mm
0452024200	メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)	6mm×180mm
0452024300	メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)	8mm×180mm
0452024400	メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)	10mm×180mm
0452024500	メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)	12mm×180mm
0452024600	メラ 小心臓鉤(ディスマール鉤)	15mm×180mm

医療機器届出番号:11B1X00016000061

# メラレトラクター (Retractor)


## メラ フリッチ安状鉤

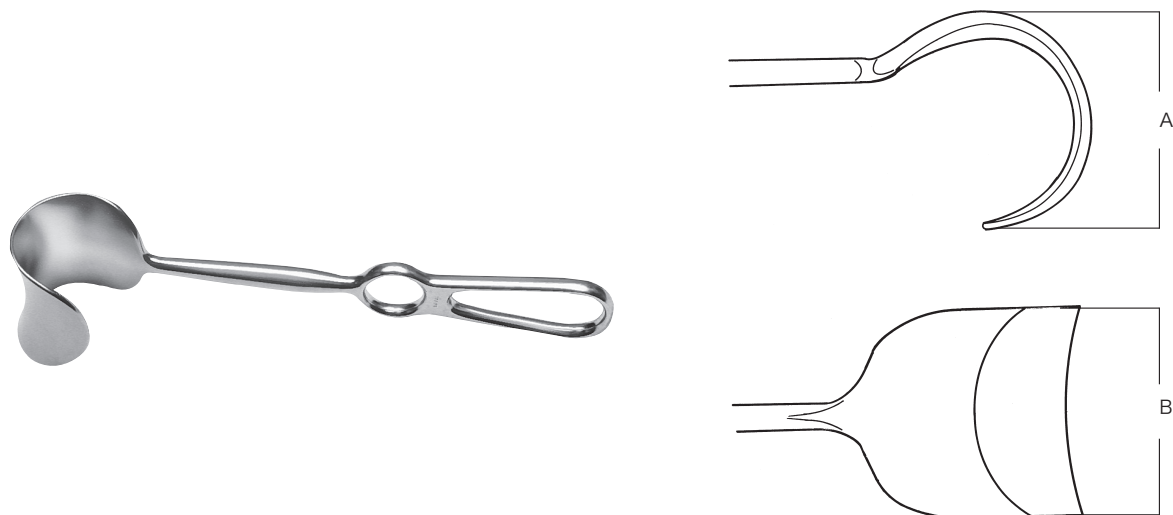

商品コード	販売名	規格/型式	A	B
0452027200	メラ フリッチ安状鉤	大 255mm	52mm	60mm
0452027100	メラ フリッチ安状鉤	小 255mm	38mm	38mm

医療機器届出番号:11B1X00016000071


## メラ レバーハーケン

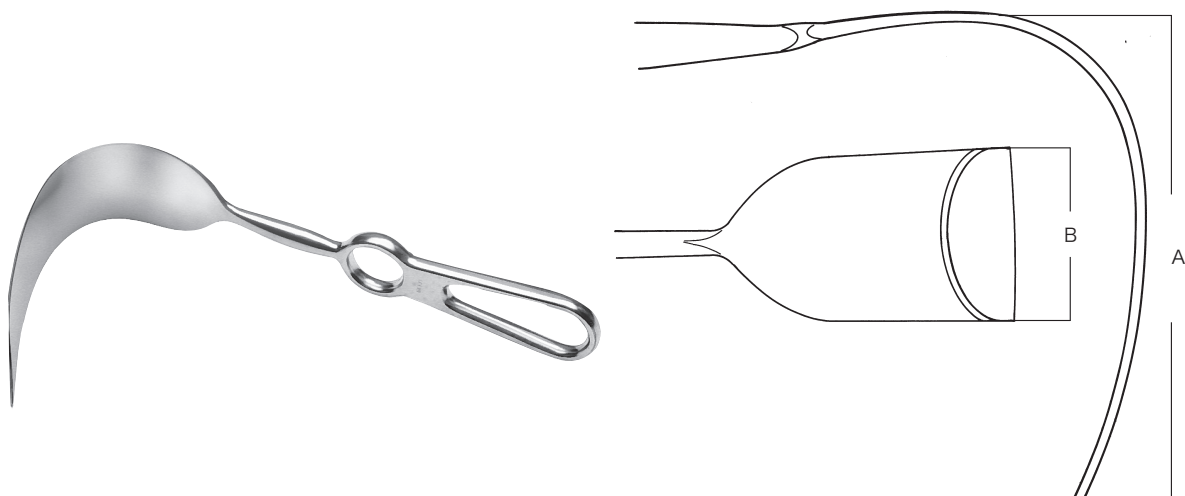

商品コード	販売名	規格/型式	A	B
0452028300	メラ レバーハーケン	大 210mm	110mm	45mm
0452028200	メラ レバーハーケン	中 210mm	110mm	35mm
0452028100	メラ レバーハーケン	小 210mm	85mm	35mm

医療機器届出番号:11B1X00016000079


## メラ クーリー型心臓鉤

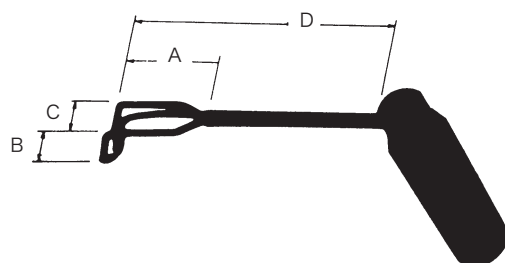

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D
0452032100	メラ クーリー型心臓鉤	極小 No.0	50mm	23mm	25mm	130mm
0452032200	メラ クーリー型心臓鉤	小 No.1	55mm	30mm	30mm	140mm
0452032300	メラ クーリー型心臓鉤	中 No.2	65mm	35mm	35mm	145mm
0452032400	メラ クーリー型心臓鉤	大 No.3	85mm	43mm	45mm	165mm

医療機器届出番号:11B1X0001600063

## メラ 抗研式肺圧排鉤

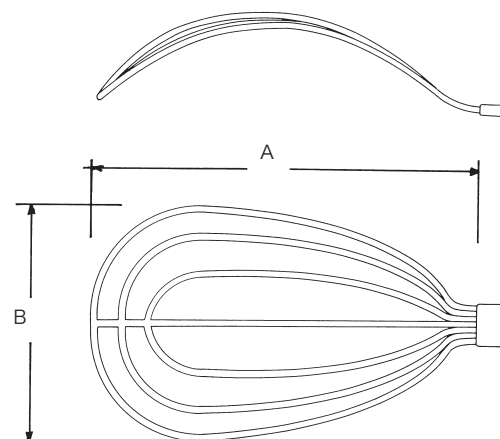


商品コード	販売名	規格/型式	A	B
0452033300	メラ 抗研式肺圧排鉤	大 295mm	155mm	90mm
0452033200	メラ 抗研式肺圧排鉤	中 280mm	145mm	75mm
0452033100	メラ 抗研式肺圧排鉤	小 235mm	95mm	60mm

医療機器届出番号:11B1X0001600064

# メラ リトラクター (Retractor)

## メラ メラ抗研式肩胛骨鈎

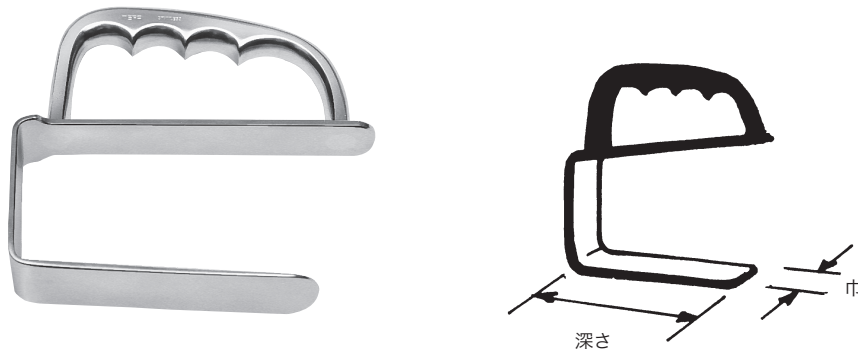

商品コード	販売名	規格/型式
0452033800	メラ 抗研式肩胛骨鈎	大 95×27mm
0452033700	メラ 抗研式肩胛骨鈎	小 93×23mm

医療機器届出番号:11B1X00016000081

## メラ 脳ペラ



商品コード	販売名	規格/型式	幅
0452035500	メラ 脳ペラ	A(特大) 180mm	20mm
0452035400	メラ 脳ペラ	B(大) 170mm	16mm
0452035300	メラ 脳ペラ	C(中) 160mm	15mm
0452035200	メラ 脳ペラ	D(小) 150mm	10mm
0452035100	メラ 脳ペラ	E(極小) 150mm	6mm

医療機器届出番号:11B1X00016000077

※本品の材質は銅です。表面にメッキ等の仕上げを施していませんので、洗浄、滅菌等の影響で表面が変色(酸化被膜等)する場合がありますが、製品の劣化や人体への影響はありませんので、予めご了承頂きますようお願いいたします。

## メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)




商品コード	販売名	規格/型式	幅
0452036100	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.1 330mm	15mm
0452036200	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.2 330mm	20mm
0452036300	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.3 330mm	25mm
0452036400	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.4 330mm	30mm
0452036500	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.5 330mm	35mm
0452036600	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.6 365mm	40mm
0452036700	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.7 365mm	45mm
0452036800	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.8 365mm	50mm
0452036900	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.9 365mm	60mm

医療機器届出番号:11B1X00016000076

※本品の材質は銅です。表面にメッキ等の仕上げを施していませんので、洗浄、滅菌等の影響で表面が変色(酸化被膜等)する場合がありますが、製品の劣化や人体への影響はありませんので、予めご了承頂きますようお願いいたします。

## リングリトラクター

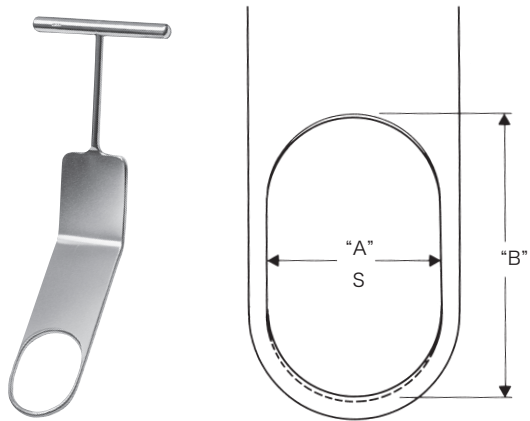

商品コード	販売名	規格/型式	A	B
0452034600	リングリトラクター	大 195mm	30mm	42mm
0452034500	リングリトラクター	小 195mm	26mm	38mm
0452034700	リングリトラクター	スパイク付 大	30mm	42mm
0452034800	リングリトラクター	スパイク付 小	20mm	38mm

医療機器届出番号:11B1X00016000078

## メラ リトラクター



商品コード	販売名	規格/型式
0452034100	メラ リトラクター	殿筋レトラクター A ハの字 254mm
0452034200	メラ リトラクター	殿筋レトラクター B 逆ハの字 254mm

医療機器届出番号:11B1X00016000102

## メラ リトラクター



ティビアル



PCL



パテラ

商品コード	販売名	規格/型式
0452040000	メラ リトラクター	ティビアルリトラクターS 全長200mm
0452028000	メラ リトラクター	PCL

医療機器届出番号:11B1X00016000102

商品コード	販売名	規格/型式
0452034300	メラ リトラクター	パテラ

医療機器届出番号:11B1X00016000102

# 剥離子 (Raspatory/Elevators)

## メラ 抗研式ラスパトリウム



No 1



No 2



No 3



No 4




商品コード	販売名	規格/型式
0452200100	メラ 抗研式ラスパトリウム	No.1 175mm
0452200200	メラ 抗研式ラスパトリウム	No.2 222mm
0452200300	メラ 抗研式ラスパトリウム	No.3 235mm
0452200400	メラ 抗研式ラスパトリウム	No.4 235mm

医療機器届出番号:11B1X00016000179




メラ 岩原式両頭ラスパトリウム

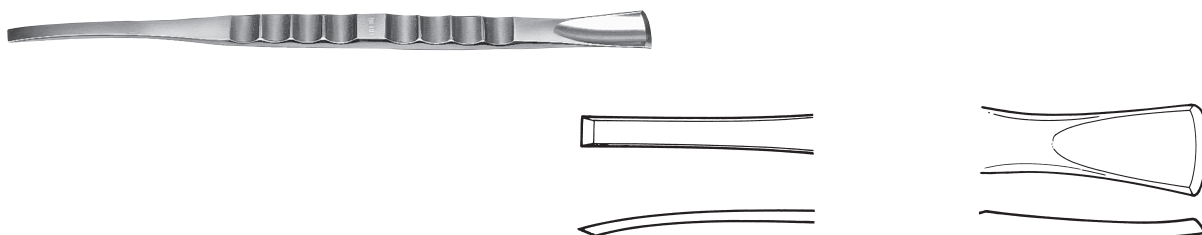

商品コード	販売名	規格/型式
0452202000	メラ 岩原式両頭ラスパトリウム	205mm

医療機器届出番号:11B1X00016000185


メラ 飯野式両頭ラスパトリウム

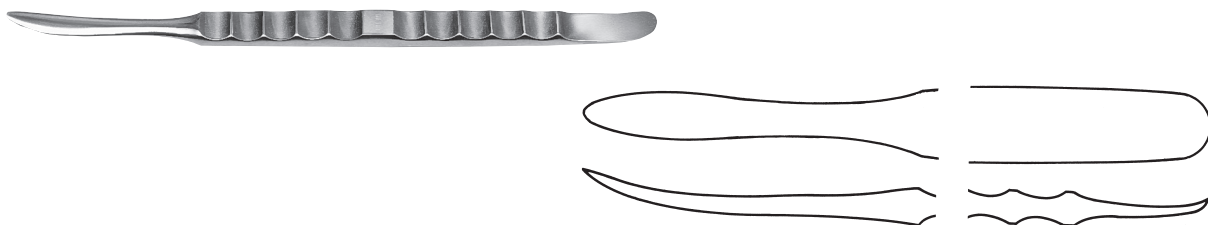

商品コード	販売名	規格/型式
0452202100	メラ 飯野式両頭ラスパトリウム	200mm

医療機器届出番号:11B1X00016000186

メラ ラスパ兼エレバ

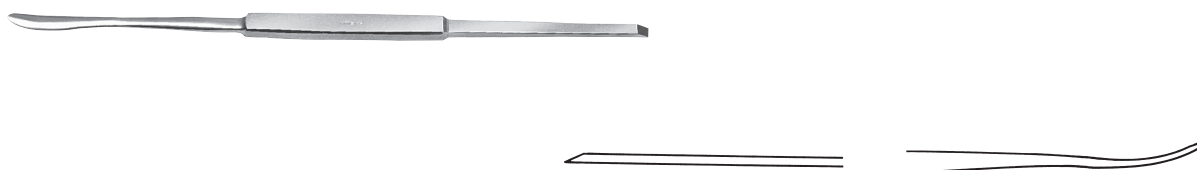


商品コード	販売名	規格/型式
0452205000	メラ ラスパ兼エレバ	192mm

医療機器届出番号:11B1X00016000182

# 剥離子 (Raspatory/Elevators)


## メラ 鈴木式両頭エレバ兼ラスパ

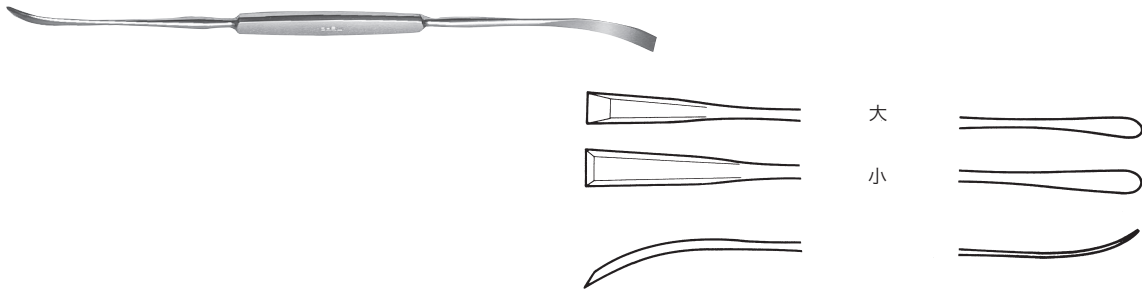

商品コード	販売名	規格/型式
0452204200	メラ 鈴木式両頭エレバ兼ラスパ	大 210mm
0452204100	メラ 鈴木式両頭エレバ兼ラスパ	小 210mm

医療機器届出番号:11B1X00016000181


## メラ鈴木式両頭エレバ強弱

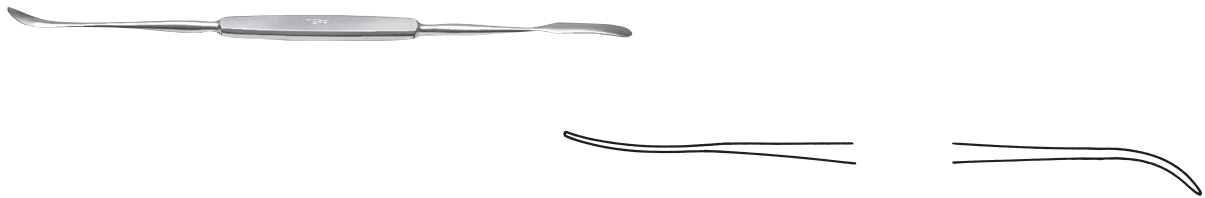

商品コード	販売名	規格/型式
0452204300	メラ鈴木式両頭エレバ強弱	192mm

医療機器届出番号:11B1X00016000184


## メラ 単鉤兼エレバ

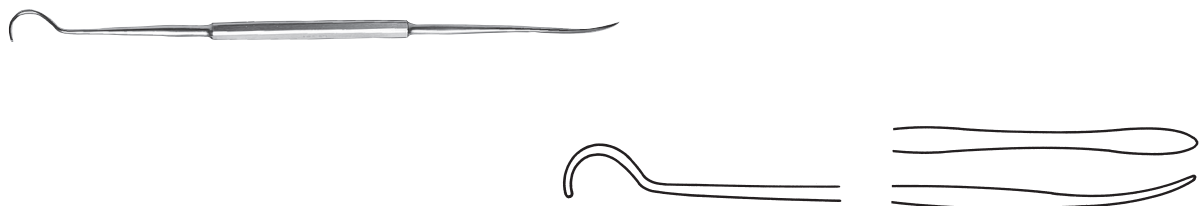

商品コード	販売名	規格/型式
0452206000	メラ 単鉤兼エレバ	185mm

医療機器届出番号:11B1X00016000075

## メラ 骨膜起子

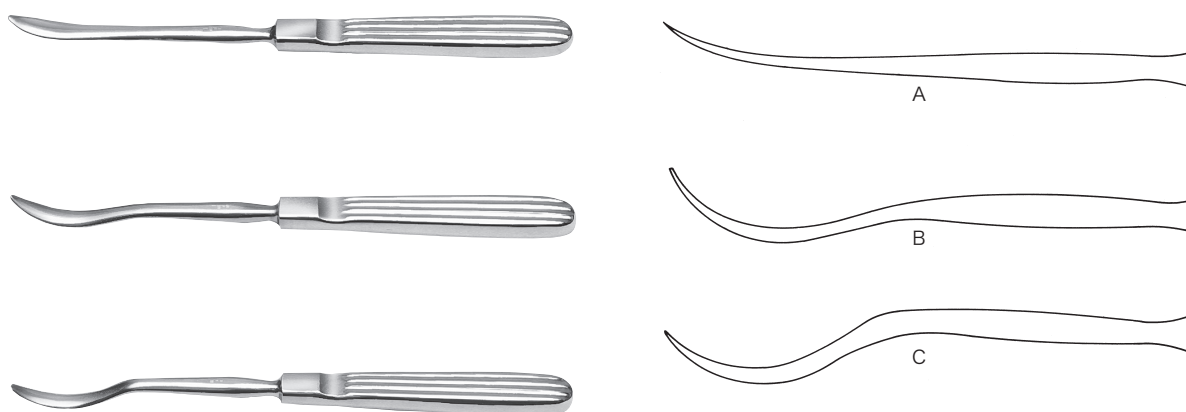

商品コード	販売名	規格/型式
0452201000	メラ 骨膜起子	A型 200mm
0452201100	メラ 骨膜起子	B型 200mm
0452201200	メラ 骨膜起子	C型 200mm

医療機器届出番号:11B1X00016000191

## メラ スパーテル(ラミネク用)




商品コード	販売名	規格/型式
0452208100	メラ スパーテル(ラミネク用)	直 233mm
0452208200	メラ スパーテル(ラミネク用)	曲 195mm

医療機器届出番号:11B1X00016000172

# 骨髓穿刺針 (Bone marrow needle)

## 東北大式骨髓穿刺針

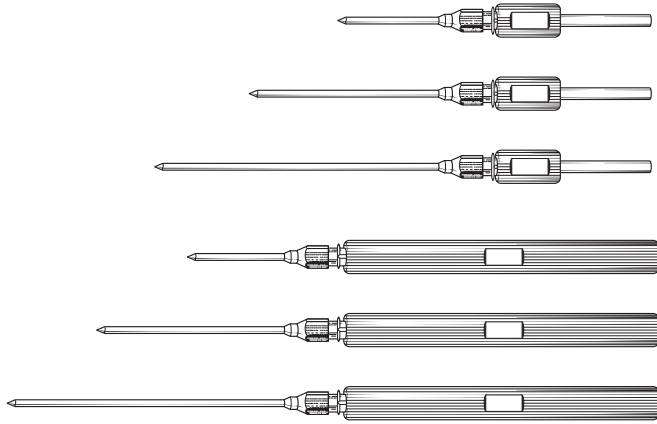



商品コード	販売名	外形
0453444300	東北大式骨髓穿刺針	柄短 針長 31mm 外径 3mm
0453444600	東北大式骨髓穿刺針	柄短 針長 61mm 外径 3mm
0453444200	東北大式骨髓穿刺針	柄短 針長 91mm 外径 3mm
0453444500	東北大式骨髓穿刺針	柄長 針長 31mm 外径 3mm
0453444700	東北大式骨髓穿刺針	柄長 針長 61mm 外径 3mm
0453444400	東北大式骨髓穿刺針	柄長 針長 91mm 外径 3mm

医療機器届出番号:11B1X00016000199

# 吸引管 (Suction)

## 心腔内吸引管 C型


(ペンコ型)

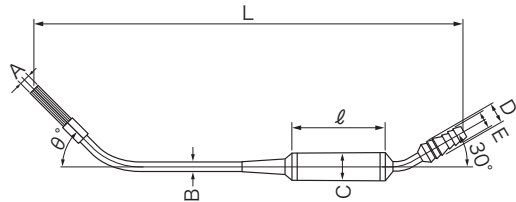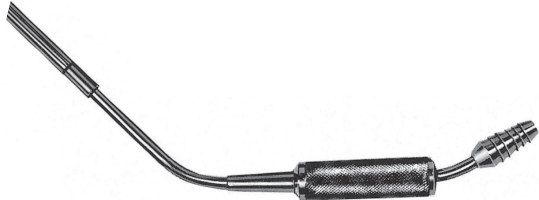

商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D	E	F	l
0452403100	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.3 45° 径4mm	4	3	10	10	5	220	70
0452403200	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.4 45° 径5mm	5	4	10	10	5	220	70
0452403300	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.5 45° 径7mm	7	5	17	13	10	220	60
0452403400	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.6 45° 径8mm	8	6	17	13	10	260	60
0452403500	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.7 45° 径9mm	9	7	17	13	10	260	60

医療機器届出番号:11B1X00016000168

## 心腔内吸引管 A型

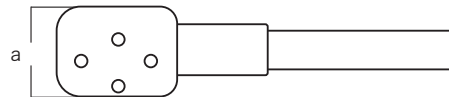

商品コード	販売名	規格/型式	a 径
0452401100	心腔内吸引管 A型	330mm	10mm

医療機器届出番号:11B1X00016000128

## メラ 吸引アダプター ドボン

径3mm

径4mm

径5mm

径6mm

径7mm

径8mm

商品コード	販売名	規格/型式	A	適正チューブサイズ(参考)
0452406400	メラ 吸引アダプター ドボン	径3mm 全長16mm	径2.5mm	メラチューブ 1.9mm×3.0mm
0452406500	メラ 吸引アダプター ドボン	径4mm 全長24mm	径4mm	トアロン 2.5mm×5.5mm
0452406600	メラ 吸引アダプター ドボン	径5mm 全長28mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm
0452406300	メラ 吸引アダプター ドボン	径6mm 全長30mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm
0452406200	メラ 吸引アダプター ドボン	径7mm 全長37mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm
0452406100	メラ 吸引アダプター ドボン	径8mm 全長43mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm

医療機器届出番号:11B1X00016000170

# 手術器具 (Operating instruments)

## メラ胸骨用骨錐



商品コード	販売名	規格/型式
0458000100	メラ 胸骨用骨錐	250mm

医療機器届出番号:11B1X00016000173

## メラ 心縫合糸保持器 ルメル氏



商品コード	販売名	規格/型式
0458001100	メラ 心縫合糸保持器 ルメル氏	内針 長 全長 220mm
0458001200	メラ 心縫合糸保持器 ルメル氏	内針 短 全長 190mm

医療機器届出番号:11B1X00016000183

## メラ 鋼線スケール



商品コード	販売名	規格/型式
0458005000	メラ 鋼線スケール	全長 150mm

医療機器非該当

## メラ ナイロンハンマー



商品コード	販売名	規格/型式
0458003500	メラ ナイロンハンマー	大 径35mm×235mm
0458003600	メラ ナイロンハンマー	小 径30mm×230mm

医療機器届出番号:11B1X00016000188









**MEMO**

A series of horizontal dashed lines for writing.

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.

製造販売業者



■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

#### 札幌支店

〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階  
TEL.011-210-2720 FAX.011-210-2721

#### 東北支店

〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田4-9-6  
TEL.022-748-1225 FAX.022-308-8820

#### 青森営業所

〒030-0919 青森県青森市はまなす2-16-15  
TEL.017-726-6730 FAX.017-737-0137

#### 盛岡連絡事務所

〒020-0834 岩手県盛岡市永井22地割3-130 コーポ芳本102  
TEL.019-601-4622 FAX.019-601-4623

#### 福島連絡事務所

〒960-0112 福島県福島市南矢野目字荒屋敷58-10 企業情報福島ビル1階  
TEL.024-555-6601 FAX.024-555-6602

#### 関東支店

〒331-0062 埼玉県さいたま市西区土屋584-2 指扇駅前ビル1階  
TEL.048-623-1530 FAX.048-623-1531

#### 松本営業所

〒399-0007 長野県松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号  
TEL.0263-29-1366 FAX.0263-29-1367

#### 新潟連絡事務所

〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-7 ウエルズ小新C号室  
TEL.025-201-3221 FAX.025-232-9105

#### 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル4階  
TEL.03-3812-3331 FAX.03-3812-3332

#### つくば営業所

〒305-0821 茨城県つくば市春日3-5-20  
TEL.029-852-7310 FAX.029-855-7175

#### 横浜営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F  
TEL.045-476-8850 FAX.045-476-8859

#### 中部支店

〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-1-15  
TEL.052-331-3121 FAX.052-339-3862

#### 静岡営業所

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田59-1  
TEL.054-287-7081 FAX.054-287-7082

#### 金沢営業所

〒920-0057 石川県金沢市桜田町2-87  
TEL.076-224-7717 FAX.076-224-7727

#### 関西支店

〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-24-2  
TEL.06-6764-8030 FAX.06-6764-8040

#### 中四国支店

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原1-3-8  
TEL.082-850-1680 FAX.082-871-2370

#### 岡山営業所

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2355-1  
TEL.086-209-0071 FAX.086-209-0073

#### 四国連絡事務所

〒760-0077 香川県高松市上福岡町816-1 マルエイビルIIビル  
TEL.087-861-2146 FAX.087-861-2150

#### 九州支店

〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町1-1-14  
TEL.092-474-0381 FAX.092-411-1325

#### 南九州営業所

〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町25-11 メソソ林A103  
TEL.099-256-7843 FAX.099-256-4789



実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読み  
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/3/0000 ●不許複製 ●S-1 ●B-122 ●BO-0476-02

[www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)