

メラ ガーゼ付着量測定装置 カウン太くん


OBM-21αV

MERA Sponge Counter



ガーゼカウントのリスクマネジメント 「カウン太くん」がカウント業務をサポートします。

- ガーゼ枚数・付着量を同時に測定記録
- カウント業務の軽減とガーゼとの接触機会を低減

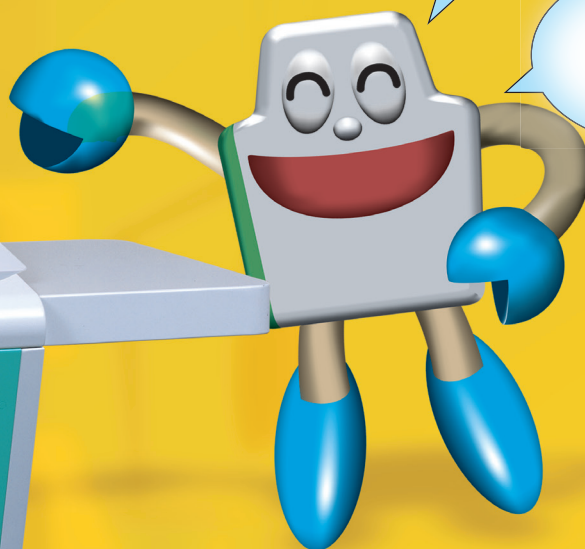

ガーゼを1枚ずつ
さばいて投入する
だけの簡単操作

省スペース
立ったまま
ガーゼを投入

●見やすいカラー液晶画面


＜メインパネル＞			
A	B	C	D
3.0g	10.0g	50.0g	0.0g
選択ガーゼの枚数	全ガーゼの総付着量		
6枚	23mL		
総枚数	異物除去	誤投入	リセット
サブパネル	ロック	設定	カウント履歴

OBM-21シリーズの継承、より使いやすく OBM-21αV 新登場!



わかりやすい・簡単

- 7.5インチ液晶カラータッチパネルで見やすく、音声・操作ガイダンスで簡単
- ガーゼの投入をカウント表示灯と通過音でお知らせ
- 最大4種類のガーゼ重量を使い分け
- 生食ガーゼ(0.0g設定)モードを搭載

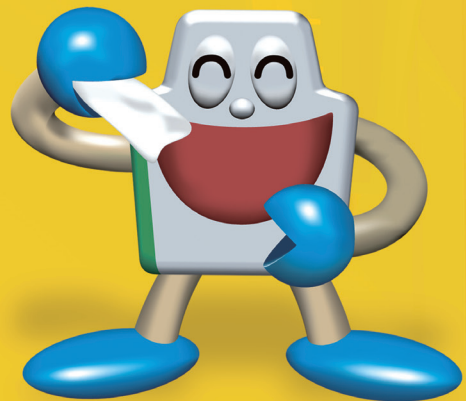

カウント履歴

日付	時刻	時間	総枚数	付着量
19/02/26	15:06	00:30	5	16
19/02/26	15:36	01:00	4	12
19/02/26	16:06	01:30	7	20
19/02/26	16:36	02:00	3	10
19/02/26	17:05	0:29	9	27

戻る 履歴リセット ▲UP ▼DOWN

カウント履歴


(自動記録で停電対策)

- ガーゼの枚数、付着量は30分毎に自動で記録
- 停電や電源コードが外れた時も内部メモリーに保存



ガーゼ種類変更センサー

(画面に触れる事無く、清潔操作でガーゼ種類が変更できます)

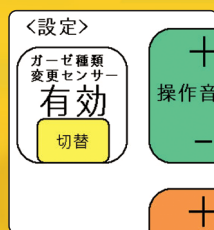

- センサー切り替え(有効・無効)設定が可能

付属品




■ガーゼ受け



■ガーゼ受け用ビニール袋



■スタイラスペン&ホルダー

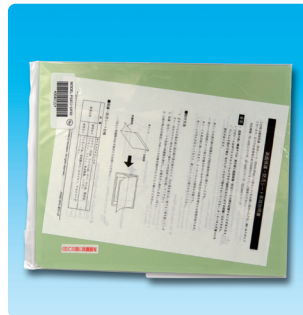

■液晶画面保護カバー



■ホッパー



■ホッパー用ビニールカバー



■サイドテーブル(A4サイズ)

仕様

ガーゼ枚数検出方法	光センサー、重量センサー
ガーゼ種類設定	4種類
ガーゼ重量設定範囲	1.0g~99.9g
ガーゼ枚数表示範囲	0~999枚
付着量計測可能範囲	0~3000mL
付着量表示可能範囲	0~9999mL
分解能	1mL
付着量測定精度	表示値と実測値の誤差率±4% ±2mL
停電対策	停電後、約5日間の表示内容とメモリー内容を保持
電源・電源入力	AC100V 50/60Hz 40VA ±15%
外形寸法	360×490(床面積)×1010(全高)mm
重量	約35Kg
主な機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ロック機能 タッチパネルの誤操作を防止 ・誤投入修正機能 複数枚のガーゼ投入、異なる種類のガーゼ投入、異物投入の修正機能 ・リセット機能 時間毎の付着量および全ての測定値をリセット ・異常ガイダンス&アラーム機能 光センサー遮光、ガーゼ受け未セット、ガーゼ廃棄、重量センサー異常など

コード番号	販売名・規格/型式	販売単位
0102000600	メラガーゼ付着量測定装置 OBM-21αV (カウンタくん21)	一式
	(標準付属) ・ホッパー 1個 ・ガーゼ受け 1個 ・サイドテーブル 1個 ・スタイラスペン、スタイラスペンホルダー 各1個 ・ガーゼ受け用ビニール 10枚 ・画面保護シート 5枚 ・ホッパー用ビニールカバー 100枚	

オプション

コード番号	販売名・規格/型式	販売単位
0102100400	メラガーゼ付着量測定装置用ガーゼ受け OBM-21シリーズ 共用	1個
0102100500	メラガーゼ付着量測定装置用スタイラスペン OBM-21シリーズ 共用	1個
0102100600	メラガーゼ付着量測定装置用サイドテーブル OBM-21シリーズ 共用	1個
0102100700	メラガーゼ付着量測定装置用スタイラスペンホルダ OBM-21シリーズ 共用	1個
0102100800	メラガーゼ付着量測定装置用ホッパー OBM-21シリーズ 共用	1個
0102100901	メラガーゼ付着量測定装置用保護シート OBM-21シリーズ 共用	5枚/袋
0102100201	ガーゼ受用ビニール袋 OBM-21シリーズ 共用	100枚/箱
0102101201	ホッパー用ビニールカバー OBM-21シリーズ 共用	100枚/袋

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意 実際のお取り扱いの際には添付文書及び取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2019/12/2000 ●不許複製 ●本機は医療機器非該当品です。●B-18 ●F-2 ●BO-0387-02 www.mera.co.jp/