

MERA SUCUUM 009

メラサキューム009 型式 MS-009T



MS-009T


メラサキュームの継承

胸腔・腹腔ドレナージに幅広く使いやすくなりました。



3色から選べるカラーバリエーション
ピンク・グリーン・ブルーから用途に合わせた選択が可能。

トレンド 胸腔ドレナージのエアリーク経過管理に便利なトレンド機能

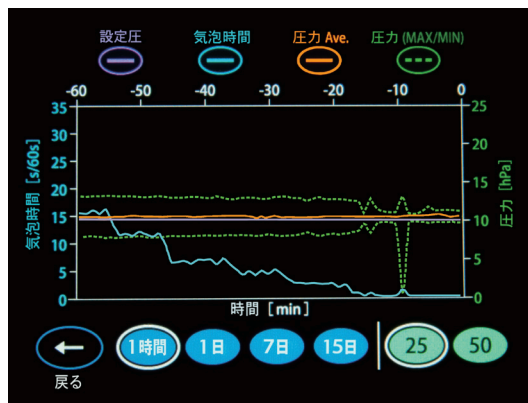

- 圧力センサで検知した気泡時間、平均圧力、最大・最小圧力をトレンド表示します。
- 気泡時間は、水封に気泡が通過したときの急激な圧力変動を検知し(吸引回路内圧)、60秒間当たりが発生した気泡時間の合計時間を表示します。
- 各パラメータのデータから安静時、咳、深呼吸などエアリークの経過観察に役立ちます。




(特許第5985996号)

ユーザビリティ 綺麗くっきり! カラー液晶タッチパネル




誤操作防止のユーザーフレンドリー設計

- 自動ロック機能を採用し、医療スタッフの目の届きにくい病棟、移動時の不意な誤操作を未然に防止します。
- 操作に困らないポップアップガイダンス機能を搭載。
- 間欠時間の設定は、アップダウンで秒から分に連続的に切り替える方式になり、また前回呼出機能を追加しました。
- 機能制限モードで使いたい機能だけ画面表示をカスタマイズして、すっきりディスプレイ。(自動ロック・間欠吸引・トレンド・アラーム音停止・中断)

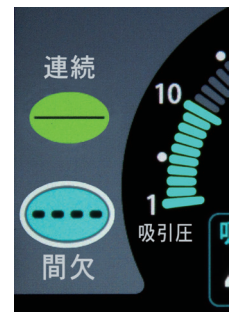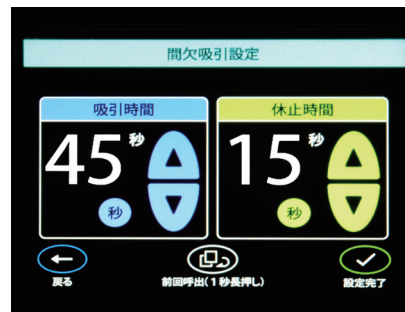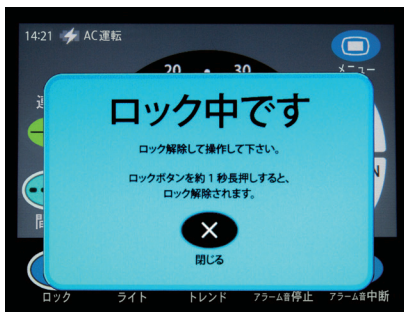

汚染感染対策 2種類の脱着交換式の吸引回路セットを1台で共有可能

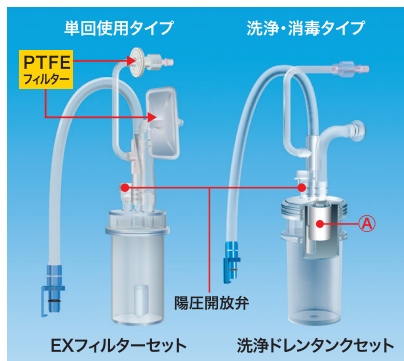


Ⓐ オーバーフロー防止フィルター(単回使用)

EXフィルターセット


- PTFEフィルター(疎水性)を搭載した吸引回路
- 洗浄、消毒が不要な単回使用タイプ。

洗浄ドレンタンクセット

- 丸洗い、浸漬洗浄、消毒で繰り返し使用できる吸引回路。
- 吸引ポンプへの排液流入による故障を防止するため、単回使用のオーバーフロー防止フィルターを採用しました。

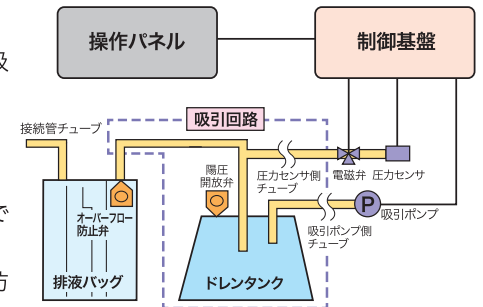

バッテリー機能 リフレッシュ機能で保守性アップ

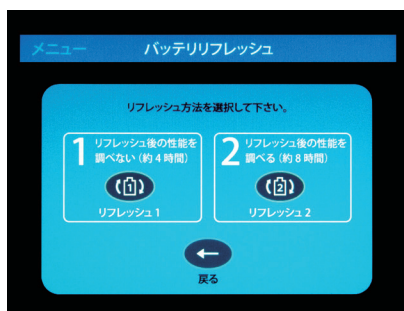

約4時間の急速充電

- 60分以上のバッテリー運転が可能。
- 3段階のバッテリー残量表示。
- 保守はバッテリーユニットを交換するだけ。

自動バッテリーリフレッシュ機能を搭載

- リフレッシュ2モード(2回の連続リフレッシュシステム)ならリフレッシュ前後の改善状態を確認できます。

オプション

吸引回路



■EXフィルターセット



■洗浄・消毒タイプ(未滅菌)

オーバーフロー防止フィルター(単回使用)

接続管チューブ



■メラコネクター付接続管



■メラコネクター付接続管

排液バッグ



■メラアクアシールド2バッグ (容量1000mL)



■メラアクアシールド2000バッグ (容量2000mL・患者側2ポート)



■メラアクアシールド逆流防止弁



■シールキャップ



■排液キャップ



■メラDバッグ

MSカート



■メラMSカート G

※ガートル台は含まれません。



■メラMSカート ST



■メラMSカート DX



■鉗子ホルダー



■バッテリーパック

その他

仕様	
設定吸引圧・最大流量	-1~-50 hPa・cmH ₂ O・mbar(選択式) 2.0L/分以上
間欠吸引の時間設定(吸引、休止)	1秒~59秒→1分~60分
定格電源・バッテリー	AC100V 50/60Hz DC12V ニッケル水素蓄電池 連続運転時間:60分以上 充電時間:約4時間
電源入力	60VA以下
外形寸法	250mm(W)×200mm(D)×480mm(H)
重量	4.3kg
防滴規格	IPX0
表示・警報作動	リーク警報・高陰圧警報・バッテリー残量警報・システムエラー・メモリエラー・圧力センサーエラー・バッテリーエラー・バッテリー未接続エラー
バックアップメモリ	トレンド画面データ15日間・履歴画面データ300件分
USB	USB2.0

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0150001400	4544753038669	メラサキュム009	MS-009Tグリーン	1式/箱	228ADBZX00080000
0150001500	4544753038676		MS-009Tピンク		
0150001600	4544753038683		MS-009Tブルー		
0150501401	4806019614513		EXフィルターセット(MS-008EX, MS-009, MS-009T 対応)	10個/箱	
0150501501	4806019614520		オーバーフロー防止フィルター	1個/箱	
0150501600	4806019614537	洗浄ドレンタンクセット(MS-009, MS-009T 対応)	1個/箱		
0159535000	-	バッテリーパック	MS-009T/MS-009用	1個/袋	-

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	届出番号
0150100101	4806019600493	メラアクアシールド	D2バッグ	20個/箱	11B1X00016000001
0150100201	4806019600509		2000バッグ	12個/箱	
0158001501	4544753018333		逆流防止弁	10個/箱	
0150100301	4806019600516	メラDバッグ	1000	20個/箱	11B1X00016000004
0150204501	4806019604859	メラコネクター付接続管	US×P×1.5m	10本/箱	11B1X00016000002
0150204701	4806019604873		UL×P×1.5m		
0150200601	4806019600578		8×10×1.5m		
0150503101	4806019607041	メラ アクアコンフォート	シールキャップ	10個/箱	11B1X00016000226

コード番号	JANコード(13)	製品名	規格/型式	包装(数量)
0150502401	4806019605849	排液キャップ	排液キャップ(大) (白ポート・患者側)	50個/箱
0150502501	4806019605856		排液キャップ(小) (青ポート・器械側)	
0150500200	4544753167710	メラMSカート DX	ガートル棒付(両サイド) 取付可能)	1式/箱
0150500300	4544753167727	メラMSカート ST	ガートル棒付	
0150500400	4544753167734	メラMSカート G	ガートル台 取付タイプ	
0150501100	4544753018173	鉗子ホルダー	-	1個/袋

※医療機器非該当品

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 www.mera.co.jp

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254

お問い合わせ



注意

実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/11月/2000 ●不許複製 ●F-4 ●B-76 ●BO-0327-03