

# ZERUK-mini

電気手術器 ZERUK-mini



## ZERUK シリーズ 小型電気手術器

- 各科外来等での多様なニーズに応える機能を搭載
- 場所を取らないコンパクト設計
- 操作は簡単、使いやすさを追求しました。

**Compact/Safety/Easy to use**



● **モノポーラカットモード**  
純粋切開/混合切開の2種類のモードを搭載。

● **モノポーラコアグモード**  
ノーマル凝固/スプレー凝固の2種類のモードを搭載。

● **メモリ機能**  
使用した出力は常にバックアップされ最新のデータに更新されます。  
メモリは2パターン(メモリA/B)で、瞬時に呼び出しが可能です。  
あらかじめ「起動時メモリ呼出設定」を行うと、本体の起動時に登録されている設定値・モードを自動的に呼び出します。

● **対極板接続切り換えスライドスイッチ**  
スライドを切り換えるだけであらゆる対極板がアダプタなしで使用することが出来ます。  
(SASマトリックス/NEジェルパッド対極板使用可能)

### 【適応分野】

- 一般的な外科手術・小外科手術・形成外科・美容外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科・整形外科・内視鏡など

● **安全サポート**  
不良モニターが作動した場合には、各アラーム警報画面がポップアップ表示されアラーム音と同時に出力で自動停止します。



電気メス本体のQRコードより取り扱いを確認できます。

## ■ スペック

出力形式	出力回路形式	フローティング形	
	分類	クラスI CF形	
出力モード	モノポーラ切開 (500Ω負荷)	モード	最大出力
		純粋切開(Pure)	80W
		混合(Blend)	80W
	モノポーラ凝固 (500Ω負荷)	ノーマル(Normal)	60W
		スプレー(Spray)	40W
	バイポーラ凝固 (100Ω負荷)		60W
安全機能	基本周波数	472kHz ±20%	
		対極板接触状態検知モニター / 対極板コード断線モニター / 連続出力モニター / 出力エラーモニター アクセサリエラーモニター / セルフチェックモニター / CPU エラーモニター / オーバーヒートモニター他	
電源	電源	AC100V ± 10% 50-60Hz	
	電源入力	300VA以下	
外形寸法	本体:W266×D300×H154mm		
重量	本体:4.1kg		

## ■ オーダーインフォメーション

商品コード	JANコード	販売名	構成	クラス分類
0120103700	4562147795080	電気手術器 ZERUK-mini	1セット(本体・標準付属品)	II

### ■ 標準付属品

・電源コード(CPメディカルプラグ:5m) 1本

### ■ オプション

商品コード	JANコード	販売名	構成	クラス分類
0120904500	4562147794939	1ペダルフットスイッチ GS1	5m	I
0120904600	4562147794946	2ペダルフットスイッチ GS2	5m	I

●届出番号:GS1/13B2X00035FS0012 GS2/13B2X00035FS0013

## ■ 電気手術器専用架台 Uni-carts

仕様	
ベーシックフレーム	サイズ:W542×D584×H843mm キャスター径:φ100mm(前輪ストッパー付き) 耐荷重:50kg
天板	サイズ:W400×D360mm 耐荷重:10kg
バスケット	サイズ:W250×D140×H148mm 耐荷重:2kg
固定ベルト	1本付属



### ■ オーダーインフォメーション

商品コード	販売名	構成	クラス分類
0120904300	電気手術器専用カート Uni-Cart	1セット(オプション)	非該当

※本製品は医療機器ではありません。

●認証番号:305AGBZX00071000

製造販売業者

株式会社 **セラコ** 東京都足立区梅田4-16-8

販売業者

**MERA** 泉工医科工業株式会社 [www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)

■問い合わせ先:商品企画本部:TEL.03-4283-1005

**注意** 実際のお取り扱いの際には電子添文及び取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2023/11月/3000 ●不許複製 ●S-1 ●B-137 ●BO-0519-01

お問い合わせ

