


Phlegm Blocker

飛沫防止器具 飛沫防止シート

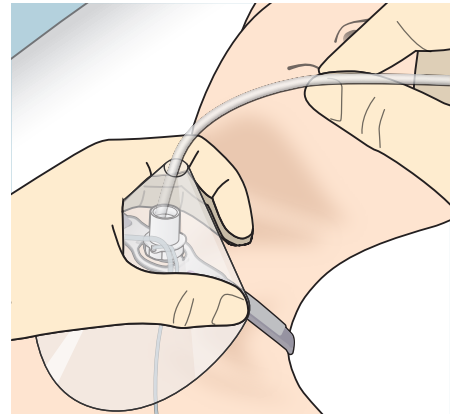


Phlegm Blocker


飛沫防止器具/シート

特徴


- 飛沫を周辺へ飛び散るのを防ぎます

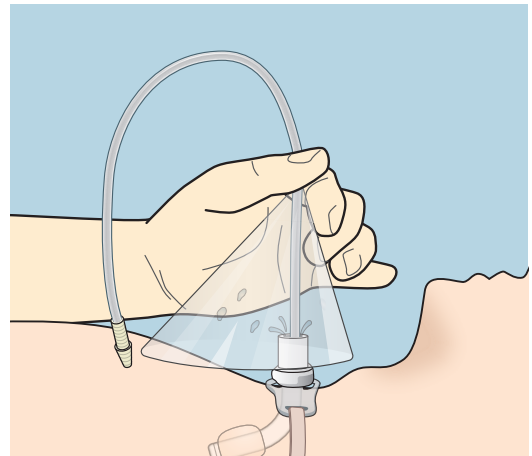


使用方法

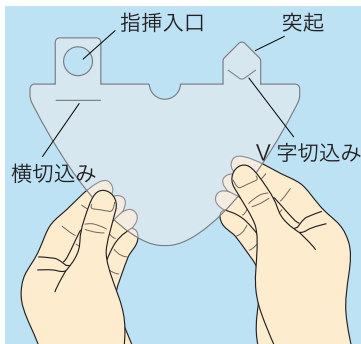


①梱包箱から製品を取り出します

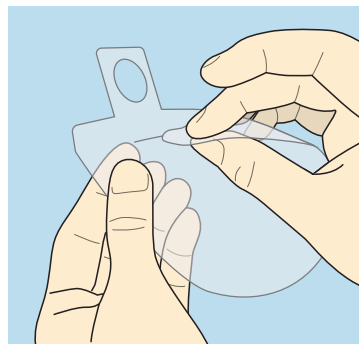


②突起を横の切り込みに挿入します

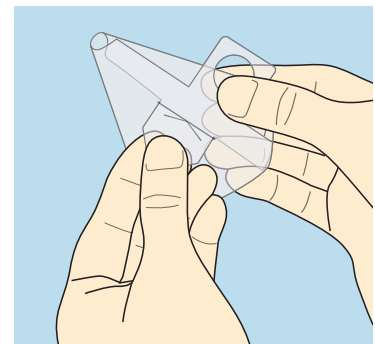


③突起下部のV字切り込みと横切り込みを引っ掛けます(挿入後に少し戻すと引っ掛かります)

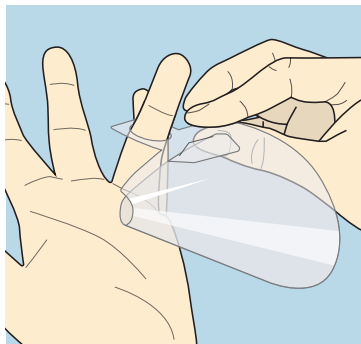

④口が小さい方を手前にして、操作側の反対の指(中指または薬指)に装着します

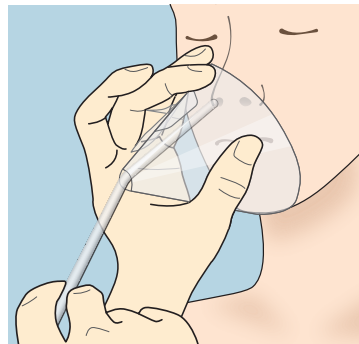

⑤吸引器具を挿入し、患者様の分泌物を吸引操作します

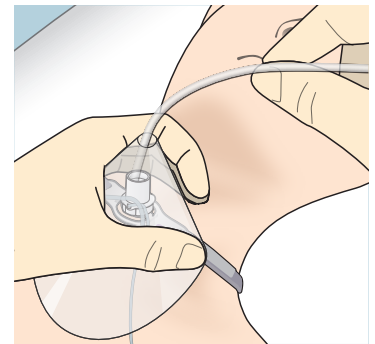

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	包装(数量)
0049001000	4544753147910	飛沫防止シート	タンブロッカー	25個/箱

製造業者

東亜パッキング工業株式会社 国名:日本

製造販売業者

MEMERA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●2024/3月/500 ●不許複製 ●A-133 ●S-1 ●BA-0522-01

お問い合わせ

