


corartBP sensor balloon P2

8Fr

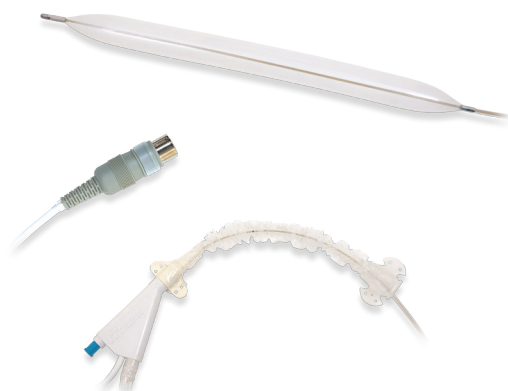


Sensor balloon P2


より正確に、より安心な補助を

■ 即座な動脈圧信号の入手


- カテーテル先端に半導体血压センサーを内蔵
- セントラルルーメン圧等と比較し、遅れや歪みのない動脈圧波形が得られます
- 弊社駆動装置との併用でセンサーの自動ゼロ点校正を行います。

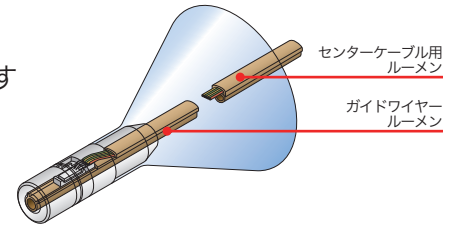

バルーン先端圧センサーとセントラルルーメン圧の比較（液体充填回路）

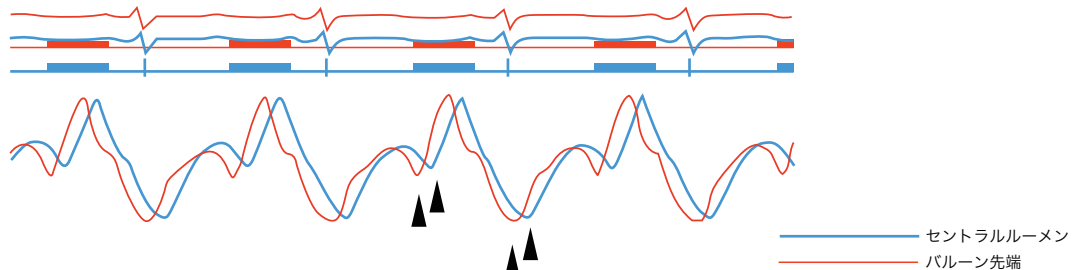


バルーン先端圧センサーと撓骨動脈圧の比較（液体充填回路）

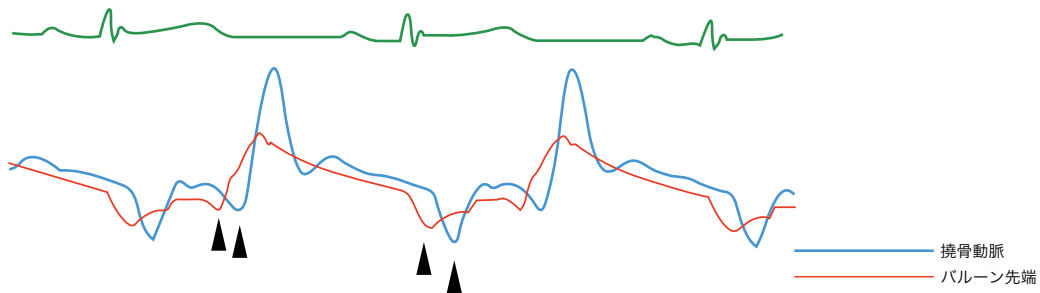

■ 的確な循環サポート

- 弊社駆動装置との併用でオートモードが使用可能です
- オートモード時は、独自のアルゴリズムを採用し補助を行えば行うほどタイミング精度が高まります
- 予測困難な不整脈時でも追従可能性を向上したアルゴリズムです

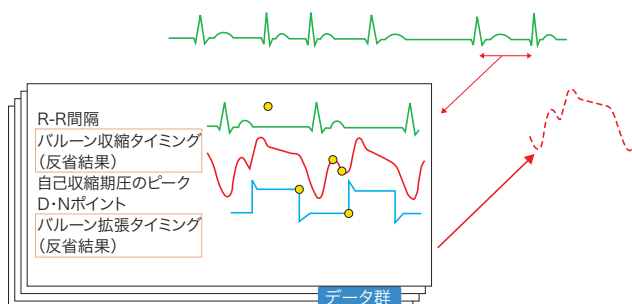


販売名：コラートBP3
承認番号：22700BZX00095000

バルーンパンピング用バルーンカテーテル 8Fr


定常流でもセンサー校正が可能

- V-A ECMO (PCPS) 併用時のわずかな脈圧差でもセンサーのゼロ点校正を行い、血圧値の表示が可能です
(この場合、補助圧欄は「---」となり、自己圧欄に最高血圧値を表示します)

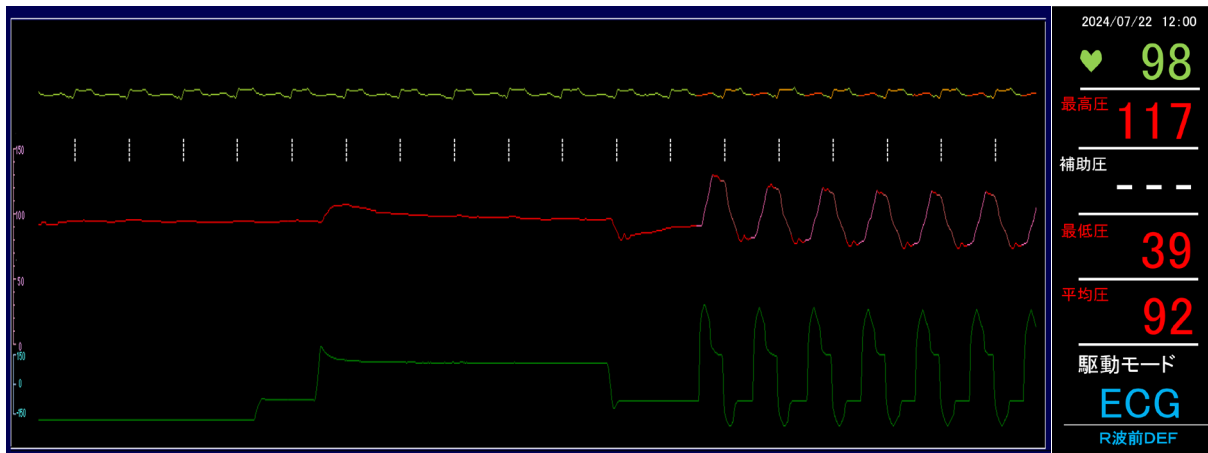


バルーンラインナップ

- 患者さんの体格に合わせ、最適なサイズが選択可能です

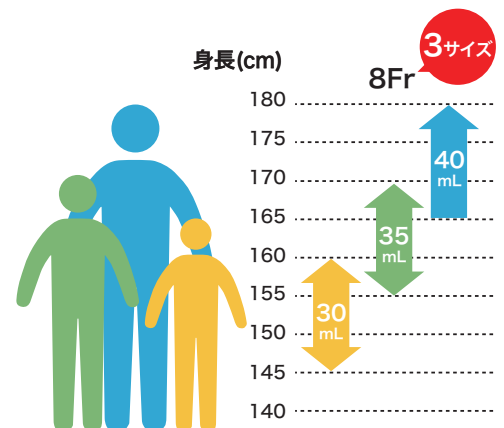


キレの良いシースを採用

- 強度向上と穿刺抵抗の軽減を図りました
- ダイレータは繊細な先端テーパ形状を実現し、ガイドワイヤーへの更なる追従性と、穿刺時の血管後壁へのダメージ軽減を追及しました

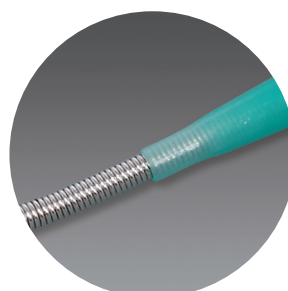


ダイレータ先端部

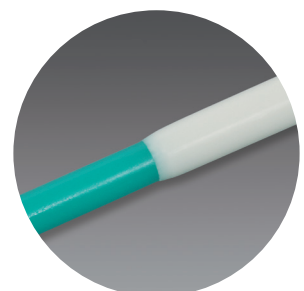


シース・ダイレーター体化部

仕様・構成

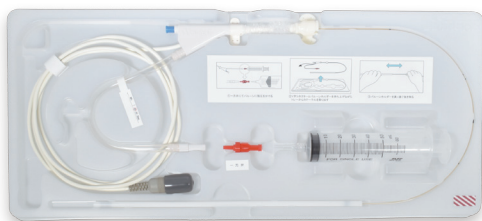

●バルーントレー

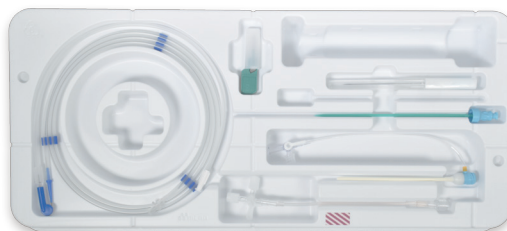

●イントロデューサーキット



●駆動ホース

バルーン容量	30mL	35mL	40mL
カテーテルサイズ	8Fr		
ルーメン	ダブル		
カテーテル長さ	690mm		
カテーテル材質	ポリウレタン		
バルーン膜外径	15mm		
バルーン膜全長	195mm	225mm	245mm
バルーン膜材質	ポリウレタン		
ガイドワイヤー(バルーン用)	0.021inch 150cm J型 マンドレルタイプ		
ガイドワイヤー(シース用)	0.035inch 45cm J型 スプリングタイプ		
シース径	8Fr		
シース長	11cm		
分野名	バルーンパンピング用バルーンカテーテル		
機能区分	一般用センサー内蔵型		

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	承認番号
0212022000	4544753201551	コラートBP センサーバルーン P2	コラートBP P2 30ml(バルーンキット、挿入キット)	1組/箱	21400BZZ00104000
0212022100	4544753201667		コラートBP P2 35ml(バルーンキット、挿入キット)		
0212022200	4544753201568		コラートBP P2 40ml(バルーンキット、挿入キット)		

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意

実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2024/12月/1000 ●不許複製 ●GR-1 ●D-27 ●BH-0074-04

お問い合わせ

