




Cricothyrotomy Kit FASTRA

輪状甲状膜切開キット ファストラ




Cricothyrotomy Kit **FASTRA**

緊急気道確保に

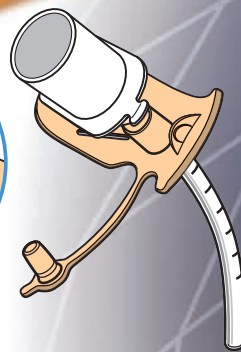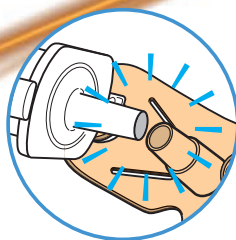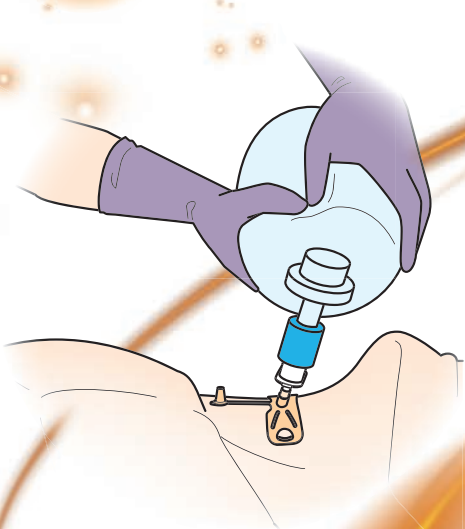

15mmコネクタを装着、取り外し可能

15mmコネクタを接続することで換気補助ができます

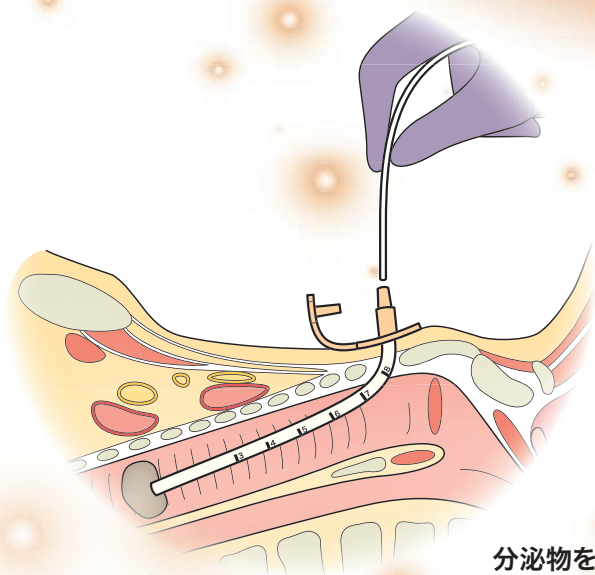

気管分泌物吸引に

分泌物を吸引することで気道クリアランスを維持できます
(気管カニューレの内径は4mm)

FAST + TRACHEA

迅速で確実な手技をサポートします

FASTRA

輪状甲状膜切開キット ファストラ




輪状甲状膜切開キット ファストラ

FASTRA


使用方法



1. 患者を仰臥位にし、枕等で首や肩を安定させ、頸部を伸展させます。術部を消毒し、触診して必要な解剖学的ランドマークに印をつけます。スカルペルで皮膚を1cm程度、縦切開します。

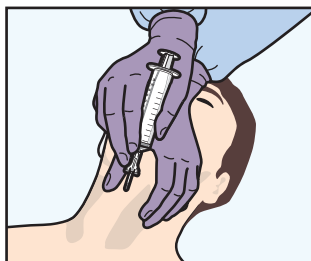


2. ツーイ針に10mLシリンジを接続します。ツーイ針の針先を尾側に向けて、ツーイ針を輪状甲状膜に穿刺します。10mLシリンジで空気を自由に吸引できることを確認します。

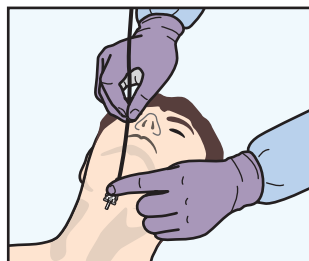

3. 10mLシリンジをツーイ針から取り外します。ガイドワイヤをツーイ針内を通して、気管内に留置します。




4. ガイドワイヤを留置したまま、ツーイ針を抜去します。ガイドワイヤを介してダイレータを気管に挿入し、切開口を拡張します。

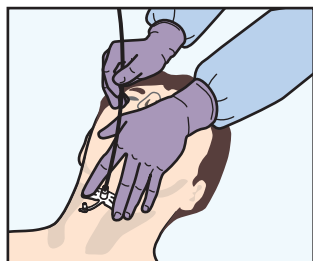

5. ガイドワイヤを留置したまま、ダイレータを抜去します。イントロデューサをセットした気管カニューレを、ガイドワイヤを介して気管に挿入します。気管カニューレを留置したまま、ガイドワイヤとイントロデューサを抜去します。綿テープを用いて、気管カニューレを患者の頸部に固定します。呼吸回路に接続する場合は、15mmコネクタを気管カニューレに接続し、呼吸回路に接続します。呼吸回路と接続しない場合は、ネックプレートのキャップで気管カニューレを閉塞します。

構成品

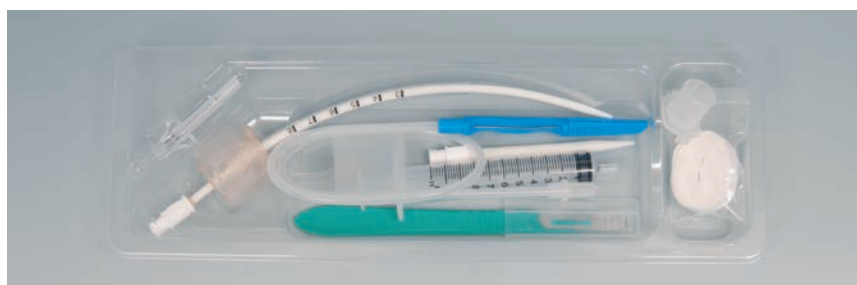

気管カニューレ



スカルペル



ツーイ針



10mLシリンジ



ガイドワイヤ



ダイレータ



イントロデューサ



15mmコネクタ



綿テープ

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0043105001	4544753147903	ファストラ	FAS-BASE	2セット/箱(1セット/袋)	307ADBZX00033000

製造業者

MERASENKO CORPORATION 国名:フィリピン

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意

ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2025/5月/3000 ●不許複製 ●A-144 ●GR-1 ●BA-0554-01

お問い合わせ

