



SASAE™ Cooling Belt




ささえ™ 冷感ベルト

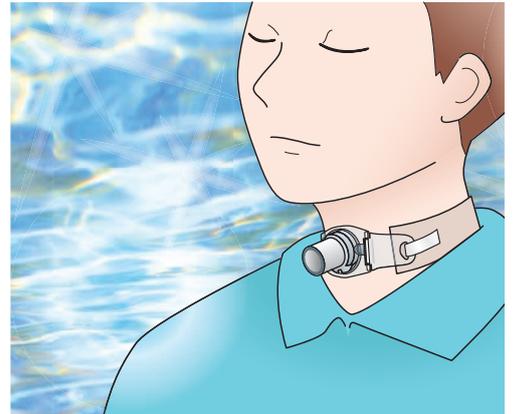

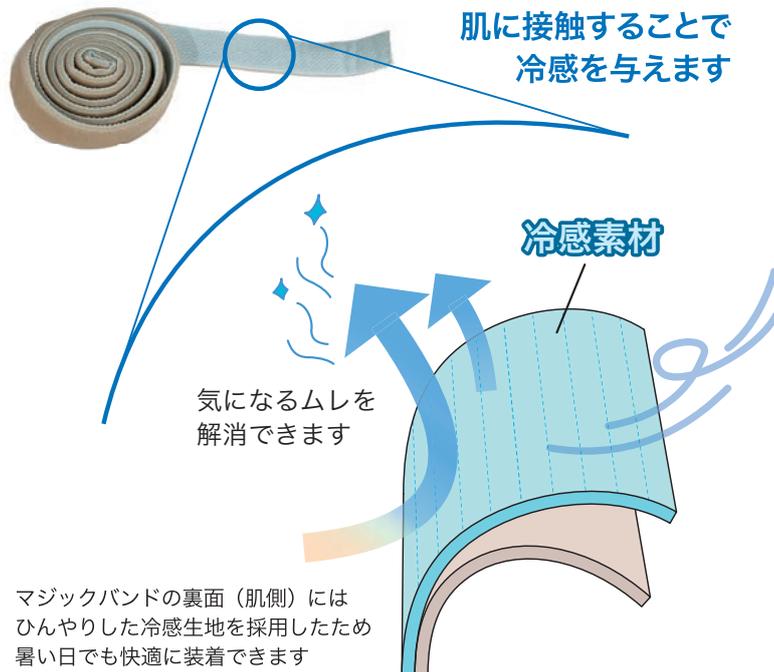


使い方

- 1) 気管切開チューブのフランジ孔両側に面ファスナーを取り付けます
- 2) 面ファスナーに固定ヒモを取り付けます。
(茶色面が外側、青色面が肌側)
- 3) 余分な固定ヒモを切り取ります
(閉めすぎないように固定してください)

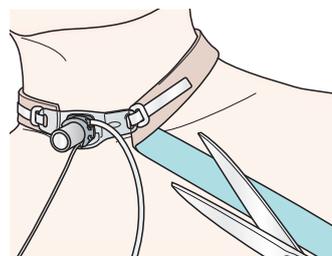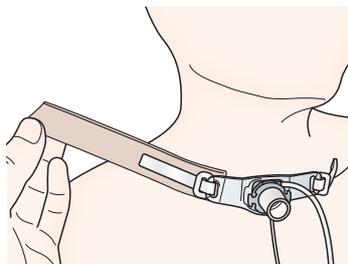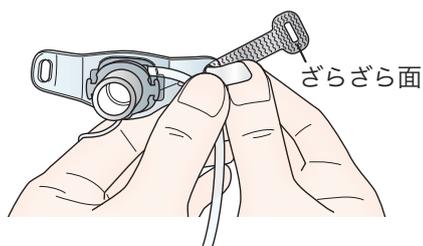

Amazon (アマゾン) からもお求めいただけます

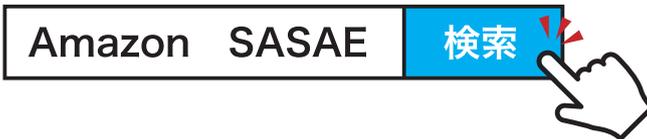

コード番号	JANコード(13)	販売名/商品名	包装(数量)	商品構成
0029003600	4544753147897	ささえ冷感ベルト	1セット/袋	面ファスナー8本 固定ヒモ (幅2.2cm×長さ120cm) 4本

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2025/7月/1500 ●不許複製 ●A-147 ●GR-1 ●BA-0559-01

お問い合わせ

