

Machine Perfusion System

腎臓用臓器保存庫 CMP-X08A

メラ臓器灌流用回路




Machine Perfusion System

日本の移植医療をさらに進めるための
HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion) システム



安全性に配慮したシステム設計


- バブルセンサにて気泡を検知すると自動でWash Lineに切替わり気泡混入を回避
- パトライトによっていち早く異常をお知らせ

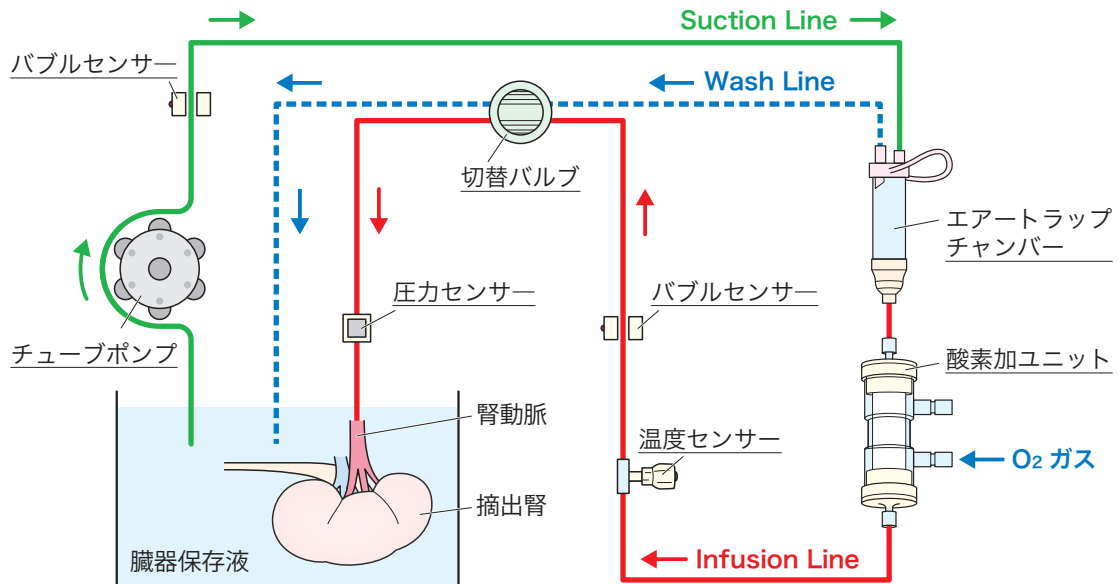

システムの概要




操作性の高いタッチパネル

ポンプON/OFF操作、ポンプ流量の設定、警報値の設定、各種パラメータの表示が一画面に集約

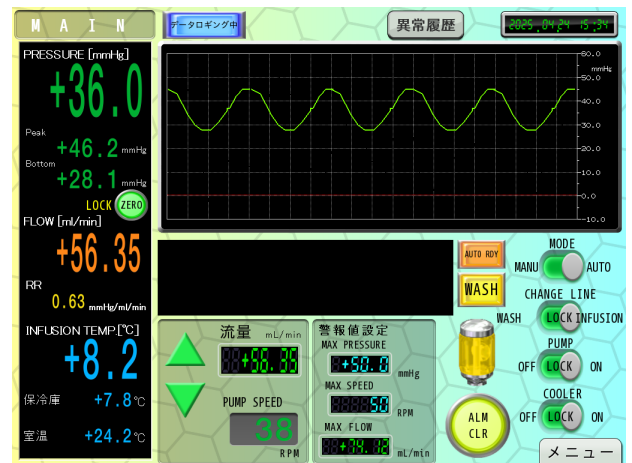

収集したデータを自動記録

- 動作中の各種パラメータ情報および異常情報 を自動記録
- 抽出したデータを解析などに活用可能

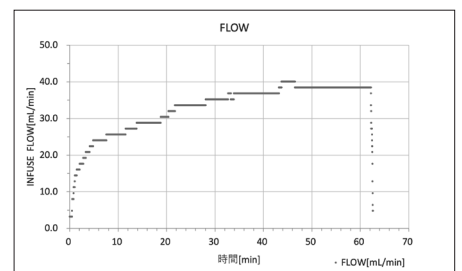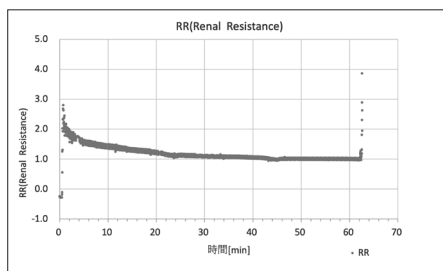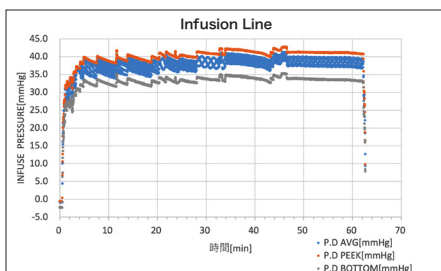

I 腎臓用臓器保存庫CMP-X08A製品仕様

保冷库設定温度	2~12℃(初期設定 4℃)	定格電圧	AC100V
温度表示	0~40℃	定格周波数	50/60Hz
圧力表示	0~300mmHg	外形寸法	幅50×奥行50×高さ159cm
ポンプ回転数	0~100rpm	保冷库寸法	幅40×奥行40×高さ 61cm
流量表示	0~150mL/min	重量	57.1kg
定格消費電力	350VA		

コード番号	JANコード(13)	販 売 名	規格/型式	認証番号
0440100100	4580771730017	腎臓用臓器保存庫 CMP-X08A※1	CMP-X08A	307AFBZX00067000

コード番号	JANコード(13)	販 売 名	規格/型式	承認番号
0440000200	4544753180894	メラ臓器灌流用回路※2	ST CMP-X08A 腎臓用	30500BZX00042000

※1 製造販売業者

 中央精工株式会社

※2 製造販売業者

 **泉工医科工業株式会社** <https://www.mera.co.jp/>

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意

ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2026/5月/500 ●不許複製 ●D-207 ●GR-1 ●BH-0567-01

お問い合わせ

